

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ アイオバン™ インサイズドレープ

3M™ Ioban™ Incise Drape

【禁忌・禁止】

- (1) 再使用禁止
- (2) プラスチック・ドレープを介して除細動をかけないこと。
[分流がおきたり、除細動の効果が不十分になる可能性があるため]
- (3) ヨウ素に過敏性が判明している患者に使用しないこと。
[ヨウ素過敏症を発症する恐れがあるため]


3M™ Ioban™ Incise Drape

3M™ アイオバン™ インサイズドレープは

皮膚常在菌の術野への移行を物理的に阻止します。

どんなに丁寧に術前術野消毒を行っても、皮膚上の細菌数はゼロにはなりません。


また、手術時間の経過とともに皮膚常在菌は再増殖し、それらが術野を汚染する危険性があります。

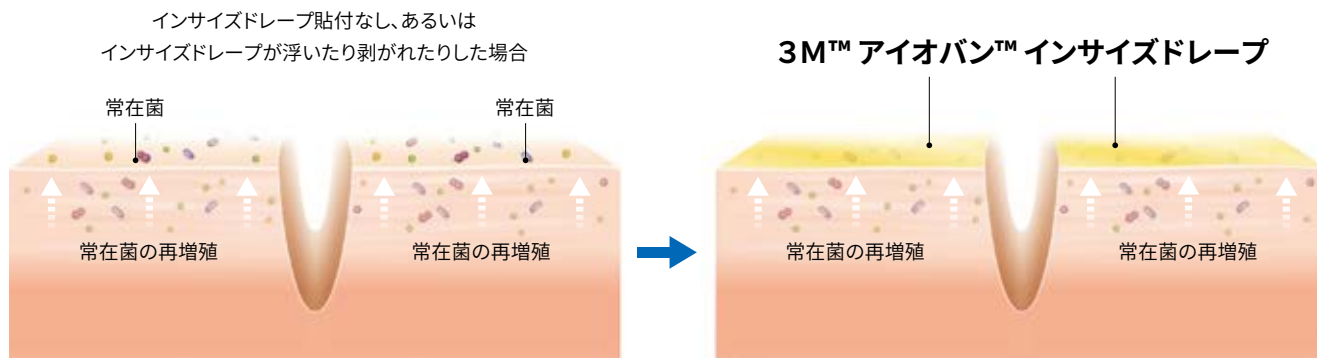

皮膚常在菌の再増殖

皮膚常在菌の
術野への移行を阻止します。

イメージ図

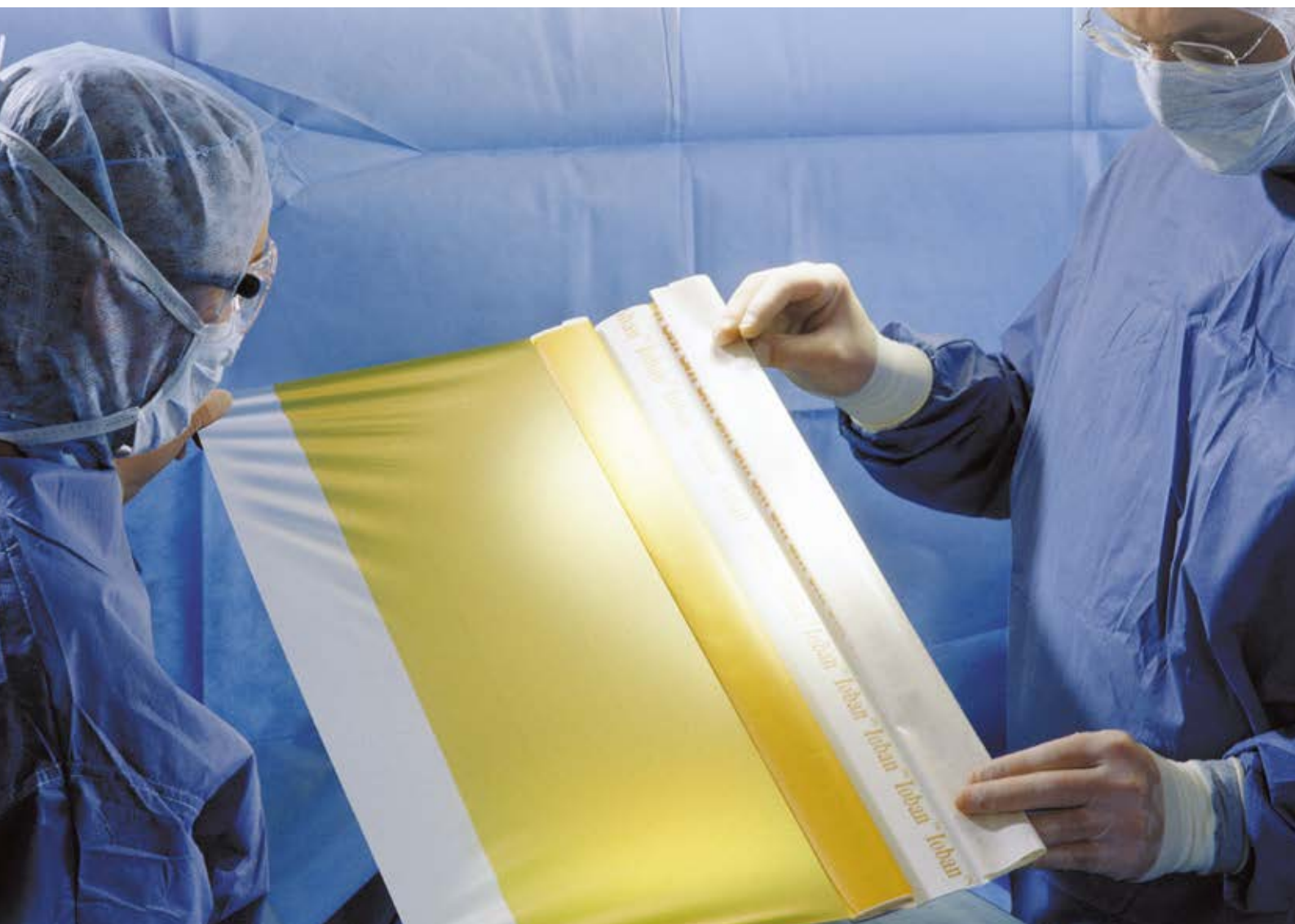


3M™ アイオバン™ インサイズドレープの貼り方／剥がし方

皮膚消毒をし、十分乾燥させます。

しっかり粘着させるため、消毒剤が十分乾燥してから貼付してください。

紙ライナータイプの貼り方

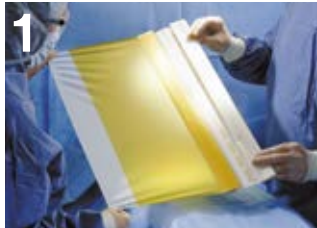

1人がフィルムの両端部分を持ち、もう1人が「Stop」マークのところまでライナー紙を剥がします。




貼付位置を決め、少したるませて、中心から外側に向かって皮膚に貼付していきます。



滅菌タオル等で、しわが入らないようにしっかり圧着し、ライナー紙を全部剥がします。フィルムを引っ張りすぎて皮膚に緊張がかからないように注意してください。

フィルムライナータイプ（片側タブ付）の貼り方

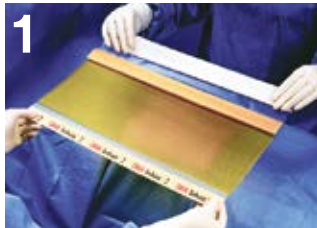

1人が3Mのロゴがプリントしてあるタブ部分を持ち、もう1人が白いライナーを剥がしながら広げていきます。




適度に引っ張りながら位置を決め、滅菌タオル等でしわが入らないように圧着しながら、貼付します。




貼付し終わった後、サイドのタブ部分を切り取ります。

フレームデリバリータイプの貼り方

一人で貼れるタイプです。

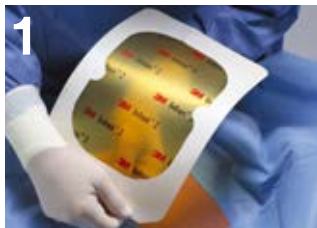

タブをつかんで持ち、貼付位置を決めます。

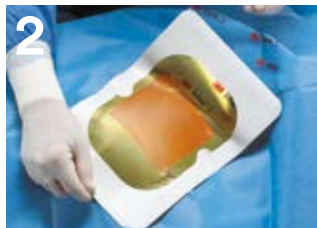

ライナーを剥がしながら術野に貼付します。



フレームを剥がします。




ドレーピング完了です。


剥がし方



縫合時
創縁部の周辺（約2～3cm）のフィルムを剥がし、切開創を縫合します。

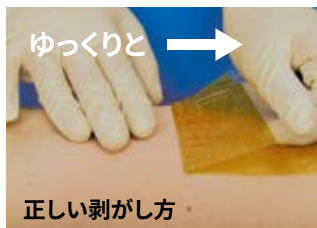

ゆっくりと →
正しい剥がし方
粘着部を180度に折り返し、すべらせるようにしてゆっくりと剥がしてください。粘着境界部を手で押さえるなどして、皮膚に緊張をかけないように注意してください。

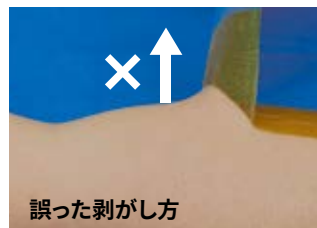

× ↑
誤った剥がし方
粘着面から上方へ垂直に引っ張らないでください。皮膚が持ち上がり、表皮剥離の原因になります。

3M™ アイオバン™ インサイズドレープ製品一覧

一般医療機器 販売名：アイオバン スペシャル インサイズドレープ
届出番号：13B1X10109000229

紙ライナータイプ

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
ライナー紙に、剥がす目安の「Stop」マークがついていて便利です。



6035




6040



6048



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6050



6051

製品番号	6035	6040	6048	6050	6051
全体サイズ (cm)	15×20	44×35	66×60	66×45	66×85
粘着部サイズ (cm)	10×20	34×35	56×60	56×45	56×85

フィルムライナータイプ (片側タブ付)

タブ付きで、貼付の際に保持しやすいのが特徴です。




6640EZ



6648EZ



6650EZ

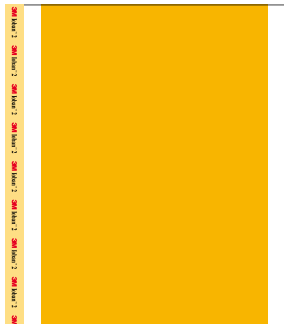


6651EZ

製品番号	6640EZ	6648EZ	6650EZ	6651EZ
全体サイズ (cm)	45×35	70×60	70×45	70×85
粘着部サイズ (cm)	35×35	60×60	60×45	60×85


フレームデリバリータイプ

一人で貼付できる、フレーム付きタイプです。

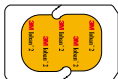

6661EZ

製品番号	6661EZ
全体サイズ (cm)	30×20
粘着部サイズ (cm)	26×20


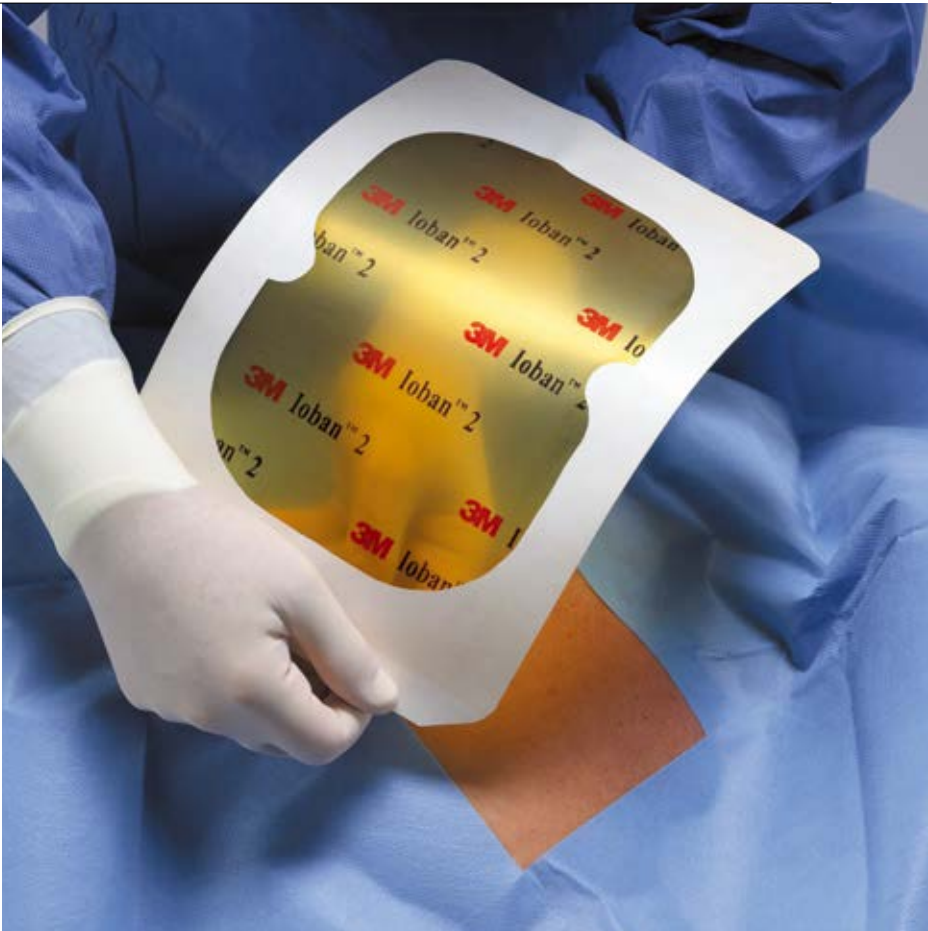


3M™ アイオバン™ インサイズドレープは

強力な粘着力が長時間持続します。

術前に貼付したドレープが剥がれてしまえば、せっかくのバリアー性が破綻してしまいます。

インサイズドレープは、長時間の手術でも粘着力が維持されていることが重要です。

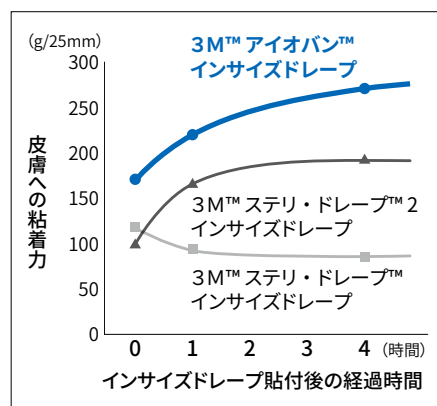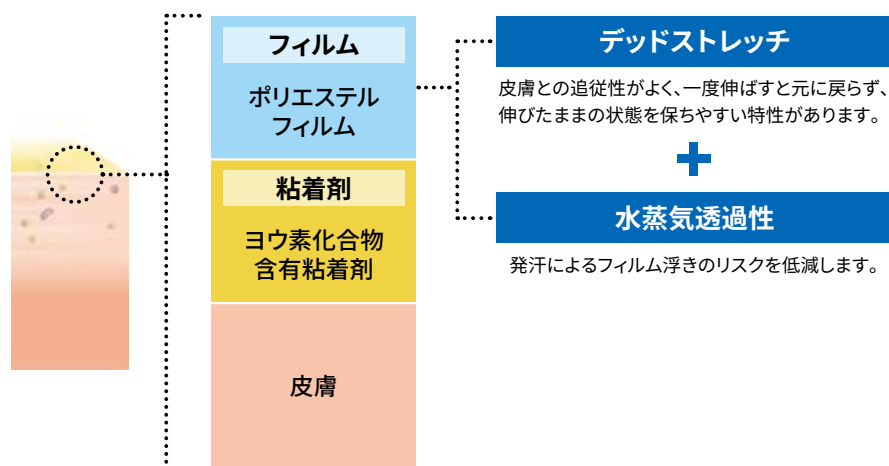



社内試験による皮膚粘着力の測定結果。
サンプルを皮膚に圧着し、一定時間経過後の剥離力を測定。

関節周囲などの湾曲した部位にもなじみ、
デッドストレッチで剥がれにくい



〔 心臓外科 〕


バイパス・弁置換用
トータルシートドレープ

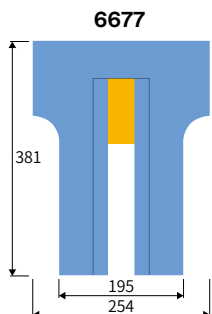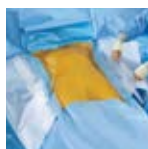

製品番号	6677
全体サイズ (cm)	254×381
粘着部サイズ (cm)	41×97

〔 一般外科・産婦人科 〕


腹腔鏡・開腹用
トータルシートドレープ

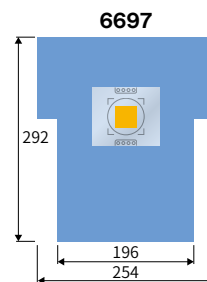

製品番号	6697
全体サイズ (cm)	254×292
粘着部サイズ (cm)	30×30

〔 整形外科 〕


牽引手術台用
垂直隔離ドレープ
(器具用ポケット2ヶ所／コードホルダー付)
インターロッキングネイル式用

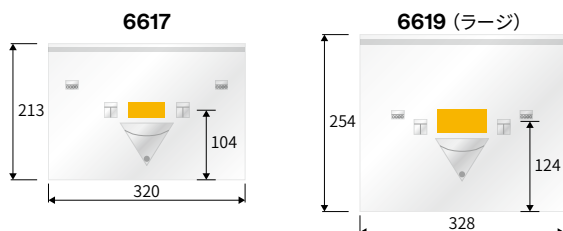

製品番号	6617	6619
全体サイズ (cm)	320×213	328×254
粘着部サイズ (cm)	50×24	70×32

〔 集液パウチ 〕

インサイズ パウチドレープ

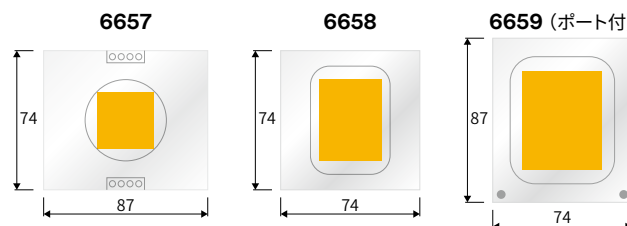

製品番号	6657	6658	6659
全体サイズ (cm)	87×74	74×74	74×87
粘着部サイズ (cm)	30×30	33×43	42×52

〔 注意 〕

本カタログ掲載品はガンマ線で滅菌しています。
包装が破損しない限り無菌状態が保たれていますが、開封後は再滅菌しないでください。
エチレンオキシドガスで再滅菌すると、ヨウ素がエチレンオキシドと反応し、
エチレンヨードヒドリンなどの有毒物質が発生するおそれがあります。
また、プラスチックフィルムは高温で変質しやすく、再滅菌には適していません。

製品の使用に際しては、添付あるいは包装に記載の注意書きをお読みください。

3M、Ioban、Steri-Drape、アイオバン、ステリ・ドレープは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.
HPM-644-E(0918)

2018年9月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます