

3M Science.
Applied to Life.™

手術室看護師の皆様へ
[アクセサリーカタログ]




3M™ ステリ・ドレープ™ インstrumentパウチ 1018/1018L

ドレープに貼付し使用する、滅菌済みのポケットです。

特長

- 後付けで任意の位置に貼付できます。
- 不織布、リネン、プラスチックのいずれにも貼付可能です。
- ロングサイズ (1018L) で内視鏡手術にも対応します。

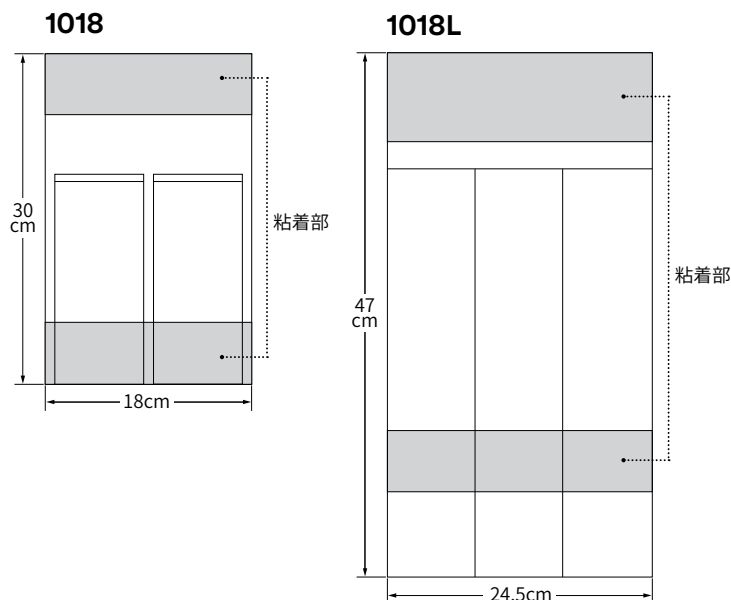

1018 適用例



1018L 適用例



1018 適用例



1018,1018L 適用例



ガンマ線滅菌


製品番号	サイズ	仕様	入れ目	
			枚/箱	箱/ケース
1018	18cm×30cm	2ポケット	10	4
1018L	24.5cm×47cm	3ポケットロングタイプ		

3M™ ステリ・ドレープ™ スペシャルティ・ドレープ 集液パウチ 1016

ドレープに貼付し使用する、滅菌済みの透明パウチです。

特長

- 排液ポートが付いています。
- 手術中の血液・体液・洗浄液を集めます。

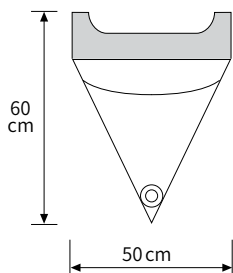


製品番号	サイズ	仕様	入れ目
			枚/箱
1016	50cm×60cm (三角形)	<ul style="list-style-type: none"> • ポート付 • 汎用 	10

3M™ アクセサリー 9097

テープで貼付できる滅菌済みの透明ポケットです。

特長

- 開口部にワイヤーが付いています。
- 術中に出た使用済みガーゼや小物を収納できます。

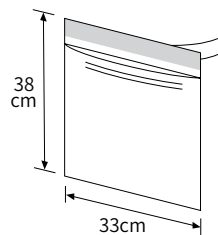


製品番号	サイズ	仕様	入れ目
			枚/箱
9097	33cm×38cm	1ポケット	100

3M™ チューブ&コード オーガナイザー 1115

電気メスや内視鏡のコード、吸引チューブ等をまとめるための専用テープです。

特長

- 従来の布鉗子とガーゼを用いてコードを束ねた場合と比較して、鉗子でリネン・不織布ドレープや患者様を傷つける心配がなく、また、ガーゼカウントの手間や鉗子の紛失も減らすことができます。
- コード類に糊が残りにくい粘着剤を使用しています。

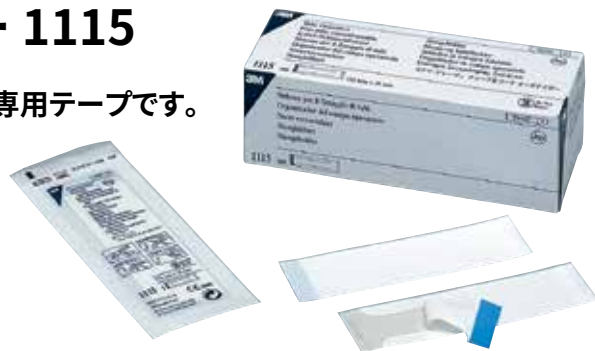

使用手順



青いタブのついていない面のライナー紙を剥がします。



粘着面を下にして適切な位置に貼り付けます。押しつけてしっかり接着します。



青いタブを持ち、中央のテープを剥がします。



テープでコードを固定すれば装着完了です。

その他の使用参考例 1



チューブ・コード類をテープの中で動くように束ねたい場合は、上図のように粘着部分同士を接着して、コード類につかないようにします。



その他の使用参考例 2



先にチューブ・コード類を挟んでからドレープに貼っても構いません。



製品番号	サイズ	入れ目
		枚/箱
1115	13.3cm×3.8cm	100


3M™ 吸汗バンダナ (手術用汗取りシート) AB-3827

バンド付の吸水パッドで、額からの汗が術野に落ちるリスクを低減します。

特長

- 高吸水パッドを使用しており、薄くても20cc程度の汗を保水します。
- バンド付で、ご使用中のずれを防ぎます。

使用方法

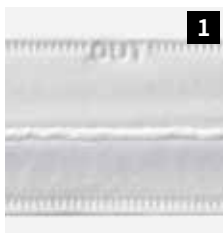

裏表の確認

箱から、吸汗バンダナを取り出し裏表を確認します。OUTの刻印のあるつるつるしたフィルム面が外側で、反対の面が肌側です。



頭部への装着

刻印のない面を額に当て、ゴムバンドを後頭部に回して頭に固定してください。



キャップの装着

本製品の上に通常ご使用のキャップをかぶってください。



製品番号	サイズ	仕様	入れ目	
			枚/箱	箱/ケース
AB-3827	38mm×27cm	吸水性不織布使用 ゴムバンド付き	100	4

- ⚠️ ●吸汗バンダナは、再使用しないでください。
- 滅菌をしないでください。
- 万一、付属のゴムバンドの取り付けが、不十分と判断されるものがあつた場合は、使用しないでください。手術中に脱落の危険があります。

3M、Steri-Drape、ステリ・ドレープは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部


<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2016. All Rights Reserved.
HPM-732-B(0219)

2019年2月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます