

# 3M™ キャビロン™ 皮膚用リムーバー

非アルコール性（低刺激タイプ）



粘着力を弱めて、  
剥がす時の刺激と  
皮膚の損傷を低減します。

## TP2 **ワイプタイプ**

- 狭い範囲や局所にも、ピンポイントで使用可能
- やわらかく、肌ざわりのよいワイプ素材
- 個包装パッケージで衛生的

### シリコン系のはくり剤

やさしく  
**パラっと**

#### “パラっと”素早く剥がれる

皮膚と粘着剤のわずかな隙間に入り、粘着剤を皮膚から浮かせて剥がします。

はがして  
**サラっと**

#### 剥がした後の洗浄がラク


ベタつきが少なく、“サラっと”した使用感です。剥がした後の皮膚の洗浄がラクに行えます。

**低刺激**

#### デリケートなお肌に安心

非アルコール性のはくり剤で、低刺激です。アレルギーテスト済み。  
(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)


#### パラっと剥がせるひみつ

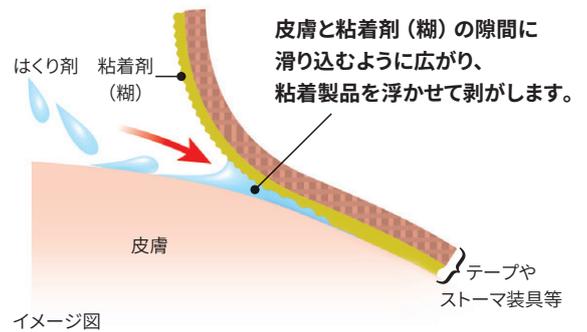

### 使い方の基本 サージカルテープ等の粘着製品を剥がす場合




#### Step 1

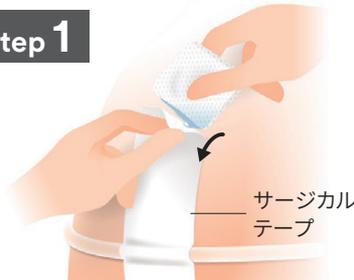

ワイプを少しつまみ、はくり剤を皮膚と粘着剤の隙間に染み込ませて端部をめくります。

#### Step 2

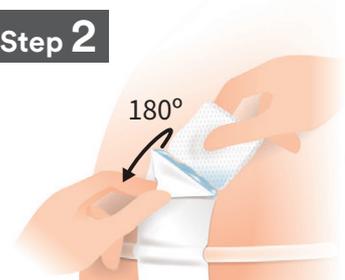

ワイプを肌に滑らせるようにして、剥がしてください。180度折り返しながら剥がします。

たっぷり3mLの  
はくり剤を  
含浸しています

- パウチの中のはくり剤がこぼれないように、パウチをまっすぐ持って開封してください。
- パウチの中に残っているはくり剤もご使用いただくことができます。
- ワイプで肌をゴシゴシ擦らないようにご注意ください。

## 使用例

### 挿管チューブ固定テープ



- 写真のように、折り返し部分が90度になるようにしてください。皮膚と粘着剤の間にはくり剤を染み込ませやすくなります。
- はくり剤が目、鼻、口等に入らないよう注意してください。

### 心電図用電極



- 剥がした後に、電極を貼付する場合は、アルコール綿ではくり剤をしっかりと拭き取ってください。はくり剤が皮膚に残っていると、電極がしっかり貼付できないことがあります。
- アルコールが完全に乾燥した後、貼付してください。

### ストーマ装具



- パウチの中のはくり剤を少量ずつ滴下し、端部をめくってください。
- ワイプを肌に滑らせるようにして、剥がしてください。

※貼付時間、皮脂や発汗などによっては、糊残りが発生する場合があります。エタノール、ベビーオイル等を使用して、皮膚に残った粘着剤を、やさしく取り除いてください。

## 3M™ キャビロン™ 皮膚用リムーバー

未滅菌

はくり剤

製品番号	タイプ/容量 (mL)	入れ目	希望病院価格
		袋/箱	円/箱
TP2	ワイプ/3	30	2,350

- 鼻や口から吸入しないよう注意してください。
- 目、鼻、口等に入らないよう注意してください。  
万一入った場合は、直ちに多量の水でよく洗浄し、医師の診察を受けてください。

### 使用上の注意

- 傷んだ皮膚、傷、粘膜、腫れ物、湿疹、皮膚の感染部位、刺入部等へは使用しないでください。
- 粘着製品の剥離時に傷口が発見された場合には、傷口にかからないように使用してください。また傷口にかかる可能性がある場合には、使用を中止してください。
- お肌に異常が生じていないかをよく注意して使用してください。
- 本製品の使用によって皮膚の赤み、はれ、かゆみ、色抜け(白斑等)、黒ずみ、炎症の兆候(腫れ、熱感等)が現れた場合には、直ちに使用を中止してください。赤みや炎症が続く場合は、医師の診察を受けてください。
- 生後1ヶ月未満の乳児または体が小さい乳児への使用の可否は、医師の判断を仰いでください。

成分 ヘキサメチルジシロキサン、ソルビタンモノオレエート、トリカプリリン



滴下ボトルタイプ  
もごさいます。

滴下ボトルタイプ

ボトルを傾けるだけで滴下できます。

## 火気厳禁 第4類第一石油類 危険等級II

手術室での滴下ボトルタイプの使用は避けてください。  
手術室で使用される場合は、ワイプタイプをご使用ください。

添付の取扱説明書を、必ず読んでからご使用ください。

3M、Cavilon、キャビロンは、3M社の商標です。

# 3M

スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2019. All Rights Reserved.  
HPM-742-D(0319)

2019年3月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます