

3M™ ジェントルフィックス™ さくっと楽に切れるテープ

さくっと!ピタッと!やさしくフィット



安心安全
品質の
日本製



やわらか
アクリル系
粘着剤使用



天然ゴム
ラテックス
不使用



3M™ ジェントルフィックス™

さくっと楽に切れるテープは、

「さくっと! ピタッと! やさしくフィット」


肌にフィットするしなやかな不織布でありながら、
手で楽にキレイに切れるテープです。しなやかな不織布により
貼付中の皮膚のつっぱり感を軽減し、やわらかアクリル系粘着剤により、
肌にピタッと密着し、剥離時に皮膚を傷つけにくく、痛みも軽減します。

Point 1 皮膚のつっぱり感を軽減 ▶ しなやかな不織布

しなやかな不織布により、皮膚への高い追従性を実現。

しなやかさの違い

- 皮膚のつっぱり感・違和感を軽減します。
- テープの端からの浮きやはがれを軽減します。

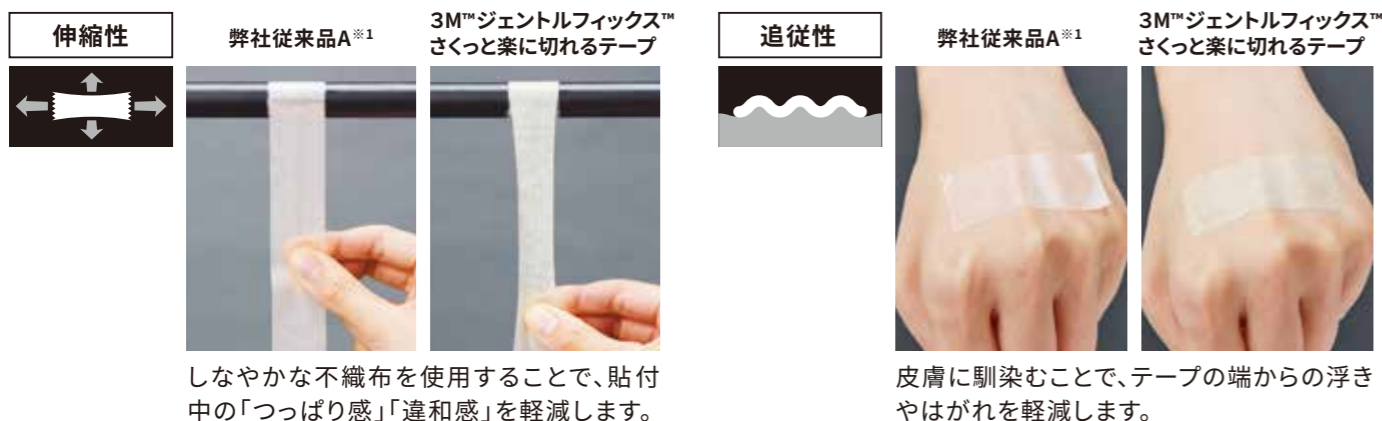

Point 2 はさみを使わなくても手で楽にキレイに切れる ▶ 独自の「ミシン目加工」技術

しなやかな不織布でありながら手で楽に、キレイに切れるテープを実現。

「さくっと!」の秘密



肌になじむしなやかな不織布でありながら、ちぎれにくく手でキレイに切れる独自の加工を施しています。

手で切った時の切れ目の違い



はさみを使わなくてもキレイに切れるため、操作性・安全性の向上に繋がります。


※1 3M™ ベビースキン サージカルテープ

Point 3 肌への優しさ ▶ やわらかアクリル系粘着剤

やわらかアクリル系粘着剤により、肌への優しさで皮膚からの浮きやはがれの少なさを実現。

■しっかり密着


肌にピタッと密着することで皮膚の凸凹に馴染みやすく、貼付直後からしっかりと密着します。また、経時的に粘着力が上がりやすいため、はがす時の皮膚トラブルリスクの軽減にも繋がります。

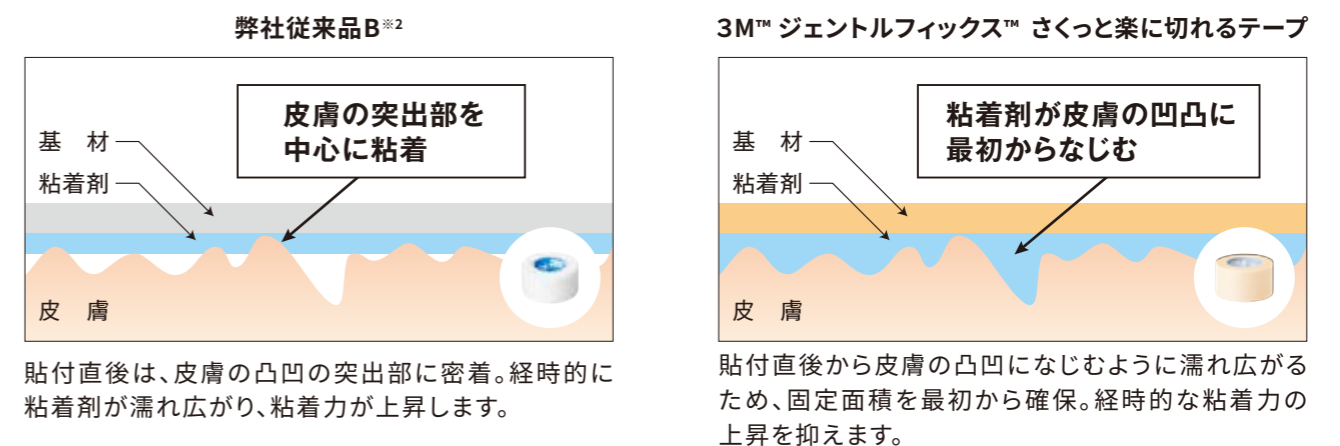

■皮膚を傷つけにくく・はがす時の痛みを軽減


はがす時に角質剥離が少ないため皮膚を傷つけにくく皮膚トラブルリスクを軽減します。また、粘着剤が伸びて皮膚からはがれることで、皮膚の変形が起きにくく痛みを軽減します。

角質剥離が少ない

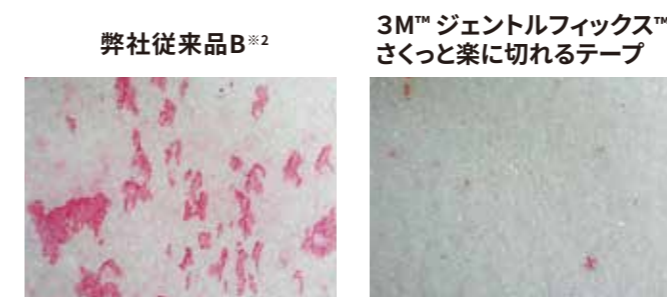

貼りはがしを繰り返しても角質剥離が少ないため、皮膚を傷つけにくいです。上記の写真で赤く見える部分が角質です。

はがす時に痛みが少ない

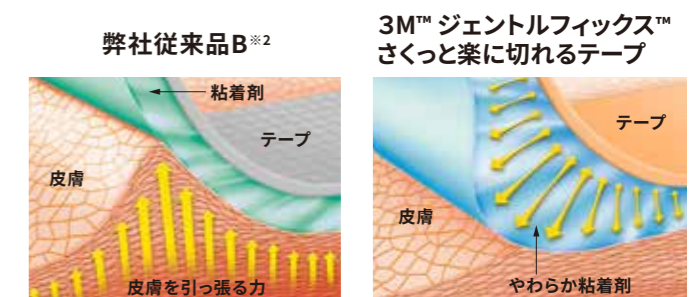

やわらか粘着剤により、はがす時に粘着剤が伸びることで皮膚を引っ張りにくくやさしくはがせるため、患者様の痛みを軽減できます。

※2 3M™ マイクロポア™ サージカルテープ
*掲載データは全て社内資料に基づくものです。



■ 3M™ ジェントルフィックス™ さくっと楽に切れるテープ

スタンダードパック

製品番号	テープ幅×全長	入れ目 巻/箱	希望病院価格(税抜)
	mm×m		円/箱
3969-0	12.5×7	24	3,600
3969-1	23×7	12	3,600
3969-2	46×7	6	3,600

スモールパック

製品番号	テープ幅×全長	入れ目 巻/箱	希望病院価格(税抜)
	mm×m		円/箱
3969SP-0	12.5×7	12	2,000
3969SP-1	23×7	6	2,000

価格は税抜きです。



ご使用上の注意及び保管上の注意

貼付時

- 本品はISO-10993に従った生物学的安全性評価済み*のアクリル系粘着剤を使用しておりますが、粘着性製品により皮膚トラブルを起こしやすい方や、アレルギー体質の方は事前に医師にご相談ください。
- 本品は未滅菌です。創部、穿刺部などの無菌手技が必要とされる部位や皮膚に異常のある部位に直接貼らないで下さい。
- テープを貼る前に、皮膚を清潔にし、消毒薬などの液体は完全に乾かしてください。
- 皮膚の状態や医療器材の材質によってはつきにくい場合があります。シリコン素材、フッ素系樹脂の表面にはほとんど粘着しません。
- 貼付箇所の表面に油分や水分があるとつきにくい場合があります。
- 臨床上必要な場合以外はテープや皮膚をひっぱらずに貼り、しっかりと圧着してください。
- 同一箇所への繰り返しの貼付は皮膚にダメージを蓄積させる場合がございます。
- 本品を重ねて貼る場合には、固定力を十分にするためにしっかりと圧着して下さい。

貼付中

- 貼り直したり、発汗などにより皮膚が蒸れた場合は粘着力が低下し剥がれやすくなる場合があります。
- 過度な動きや負荷がかかると剥がれることがあります。
- 汚れたり、濡れたりした場合は新しいものに取り替えてください。
- 長時間皮膚が蒸れた状態になると皮膚トラブルの原因となります。
- 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみなど皮膚症状が現れた場合には使用を中止し、医師の診察を受けてください。

剥離時

- 本品を剥がす場合は、皮膚の負担を軽くするため、テープを約180度に折り返し、皮膚が持ち上がらないように手で押さえながら、体毛の方向に逆らわずゆっくりと剥がしてください。

保管時

- 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所で保管してください。

*3Mのテープ製品は、細胞毒性、皮膚刺激性、皮膚感作性(アレルギー反応)が低いことが確認された材料を使用しています。(全ての方にアレルギーが起きないという訳ではありません。)

3M、ジェントルフィックス、マイクロポアは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
HPM-842-A (011910) HP

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金(土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

2019年1月発行