

末梢動脈カテーテル (Aライン) の固定方法


3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング 1683 を使用

3つのポイント

- 接続部分が切り込みから出るように位置を合わせる
- フィルムの上からカテーテル周囲をつまみ、よく密着させる
- フィルムを皮膚に密着させるように、内側から外側に向かって空気を押し出しながら貼付する

動画(使用方法)のキャプチャー画像を掲載した資料です。
動画の視聴とあわせてご活用ください。

動画 URL : <http://go.3M.com/medical/Aline1683/> (再生時間: 2分17秒)

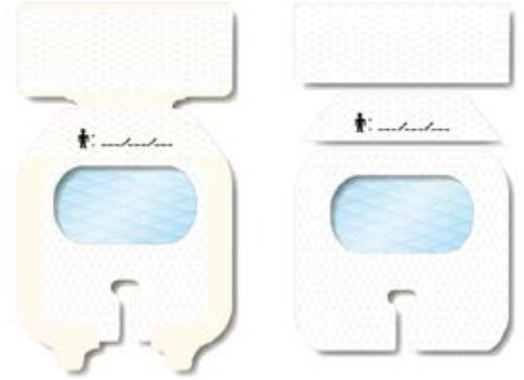

貼り方



1 付属の記録用ラベルで留置針を先に固定します。



2 印刷のあるライナー紙を剥がし、粘着面を出します。




3 粘着剤のない部分を持ち、



4 接続部分が切り込みから出るように位置を合せます。片手でフィルムをそらせて持つと、しわになりにくいです。



5 針の角度を保ちながら、フィルムの上からカテーテル周囲をつまみ、よく密着させます。固定力を上げるために必ず実施して下さい。

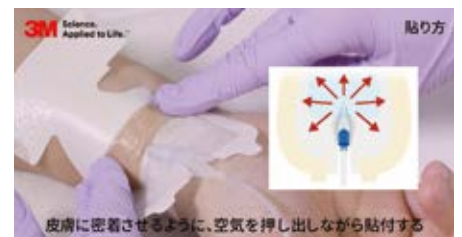

6 フィルムを皮膚に密着させるように、内側から外側に向かって空気を押し出しながら貼付します。



7 針の角度を保ちながら、切り込み部分をカテーテルの下で沿わせるように貼付します。無理に重ね合わせる必要はありません。



8 周囲をしっかりと密着させ、全体を貼付した後、フィルム部分を押しえながら、ゆっくりとフレーム部分を剥がします。



9 付属の固定用テープで接続部分を上からΩ固定します。



10 必要に応じてご施設で使用しているサージカルテープなどで補強してください。

剥がし方



1 補強のテープ類や固定用テープを剥がします。手袋をはめた指の腹でなでるようにすると剥がしやすくなります。



2 切り込み部分を片方ずつ、カテーテルと皮膚を押さえながら、ゆっくりと剥がします。



3 片手でカテーテルを押さえながら、残りの部分を約180度に折り返し、ゆっくりと剥がします。

※ 本資料は使用方法の一例であり、本品およびカテーテル等の添付文書、取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご検討ください。

販売名:テガダーム I.V. コンフォートフィルム ドレッシング 届出番号:13B1X10109000232

3M、テガダーム、マイクロフォームは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部


<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
CAPT-070-A

2019年4月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます