

Přímá rekonstrukce s 3M™ Filtek™ One Bulk Fill na dolních molárech z důvodu primárního a sekundárního kazu.

Klinický případ a fotografie: MDDr. Tomáš Buchta, Česká republika

O případu:

U pacientky (23 let) byla potřebná sanace z důvodu přítomnosti primárních i sekundárních kazů zjištěných při prohlídce na BTW snímku. Rekonstrukce probíhala ve dvoum návštěvách, kdy v první se řešily aproximální am ve druhé okluzální defekty.

Výzva:

Minimálně invazivní přístup do kazivé léze zubu 37 se zachováním přechodové sklovinné lišty.

Krok za krokem:



Obr. 1: Počáteční stav po izolaci zubů kofferdamelem.



Obr. 2: Přístupová kavita na zubu 36 se zbytky kazivé léze pro ošetření aproximálního kazu na zubu 37.



Obr. 3: Situace po odstranění kazivé léze. Následovalo pískování aluminiumoxidovým práškem a dostavba aproximálních kavit.



Obr. 4: Situace po exkavaci kazů a adhezivní přípravě. Na zub 37 byl aplikován opákní flow materiál k zakrytí tmavého dna.



Obr. 5: Rekonstrukce okluzních ploch bulkfillovým materiálem 3M™ Filtek™ One odstín A2.



Obr. 6: Stav po přidání pigmentu pro zvýraznění anatomie.



Obr. 7: Doleštění spirálkami 3M™ Soflex.



Obr. 8: Finální stav po 7 měsících.



Obr. 9: Porovnání BTW snímků před a po zhotovení.



3M Oral Care Solution Division
3M Česko spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00, Praha 4



My uMíMe zuby

www.3M.cz/dental

3M a Filtek jsou ochranné známky
3M nebo 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2019. Všechna práva
vyhrazena.