

# 3M™ キュロス™ プロテクタ (オスルアーロックコネクタ用)

3M™ Curost™ Protectors for male lure lock connectors

## オスルアーコネクタ部の汚染防止・保護に

オスルアーコネクタ部 (ロックタイプ) に接続して使用する、イソプロピルアルコールを充填したキャップです。輸液セット等に接続して、汚染防止・保護に用います。

### Step1

シール材を剥がして開封する。



### Step2

オスルアーコネクタ部に押し回して接続する。



| 製品番号     | 仕様    | 入れ目 |     |
|----------|-------|-----|-----|
|          |       | 個/箱 | 本/箱 |
| CM5-200R | 5連タイプ | 200 | 40  |

一般医療機器 (保護栓) 医療機器届出番号: 13B1X10109000262  
販売名: キュロス™ プロテクタ

**【警告】**  
火気厳禁 [引火性液体を含有しているため。]

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

#### 【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 接続する部分が汚染されている場合には、アルコール綿などで清拭、消毒してから接続すること。
- 2) 接続する機器の材質を確認し、接続部分への保護キャップ装着や、アルコール剤使用による影響が予想される場合には充分検討の上使用すること。
- 3) 本品を接続している輸液セットの三方活栓やシリンジを操作する際に製品中のイソプロピルアルコールが輸液セット中に逆流しないよう注意すること。クランプがある場合には閉じてから操作を行うこと。
- 4) 製品中のイソプロピルアルコールが眼に入らないように注意すること。万一眼に入った場合にはすぐに数分間注意深く洗うこと。(数分間の洗浄後、コンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。) その後も洗浄を続けたあと、眼科医の診断を受けること。

(注) 添付文書をよく読んでからご使用ください。