

## 末梢動脈カテーテル (Aライン) の固定方法

### 3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング 1681 を使用

#### 3つのポイント

- 接続部分が切り込みから出るように位置を合わせる
- フィルムの上からカテーテル周囲をつまみ、よく密着させる
- フィルムを皮膚に密着させるように、内側から外側に向かって空気を押し出しながら貼付する



動画 (使用方法) のキャプチャー画像を掲載した資料です。  
動画の視聴とあわせてご活用ください。

動画 URL : <http://go.3M.com/medical/Aline1681/> (再生時間 : 2分2秒)




### 貼り方



- 1** 付属の1本目の固定用テープで、留置針を先に固定します。



- 2** 印刷のあるライナー紙を剥がし、粘着面を出します。

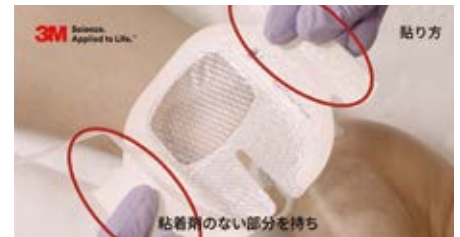

- 3** 粘着剤のない部分を持ち、



- 4** 接続部分が切り込みから出るように位置を合せます。



- 5** 針の角度を保ちながら、フィルムの上からカテーテル周囲をつまみ、よく密着させます。固定力を上げるために必ず実施して下さい。



- 6** フィルムを皮膚に密着させるように、内側から外側に向かって空気を押し出ししながら貼付します。



- 7** 針の角度を保ちながら、切り込み部分をカテーテルの下で沿わせるように貼付します。無理に重ね合わせる必要はありません。



- 8** 周囲をしっかりと密着させ、全体を貼付した後、フィルム部分を押しえながら、ゆっくりとフレーム部分を剥がします。



- 9** 付属の2本目の固定用テープで切り込みが開かないように固定します。



**10** 付属の記録用ラベルに日付などを記入して、



**11** 観察の妨げにならない位置に貼付します。



**12** 必要に応じてご施設で使用しているサージカルテープなどで補強してください。

## 剥がし方



**1** 補強のテープ類や固定用テープを剥がします。手袋をはめた指の腹でなでるようにすると剥がしやすくなります。



**2** 切り込み部分を片方ずつ、カテーテルと皮膚を押さえながら、ゆっくりと剥がします。



**3** 片手でカテーテルを押さえながら、残りの部分を約180度に折り返し、ゆっくりと剥がします。

※ 本資料は使用方法の一例であり、本品およびカテーテル等の添付文書、取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご検討ください。

販売名:テガダーム I.V. コンフォート フィルム ドレッシング 届出番号:13B1X10109000232

3M、テガダームは3Mの商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部


<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2019. All Rights Reserved.  
CAPT-053-A

2019年4月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます