

フィルテック™ シュープリーム ウルトラフロー コンポジットレジン

光重合型低粘度ナノフィラーコンポジットレジン

トリプルバリューパック

1本で!スピーディなCR修復を実現!



同色3本セットで
**1本につき
800円
お得!**

単品製品1本
3,400円
希望医院価格(税抜き本体価格)
↓
トリプルバリューパック
**1本あたり
2,600円**
希望医院価格(税抜き本体価格)



■ フィルテック™ シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン
トリプルバリューパック (同色3本セット)

■ ご注文は下記歯科器材店まで

製品番号	ご注文数量
6032A1T (A1 ボディシェード)	
6032A2T (A2 ボディシェード)	
6032A3T (A3 ボディシェード)	
6032A3.5T (A3.5 ボディシェード)	
6032A4T (A4 ボディシェード)	

■ 各内容 : 2g×3本、チップ×20個

■ 希望医院価格(税抜き本体価格) : 各7,800円

販売名：フィルテック シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン 認証番号：222AKBZX00110000
希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。掲載の情報は、2018年10月現在のものです。ご使用に際しては、添付文書を必ずお読みください。

3M

高齢化社会時代における材料の選択について

これからの高齢化社会時代においては、Att.のような咬耗症や、胃酸による切端部の脱灰による実質欠損や審美障害に対して、どのように対応していくかが重要である。これらを修復するにあたり、色調・操作性・簡便性(流動性が良く、押し出しやすく留まる)に優れたフロアブルレジンを選択する。また、この部位は咬合時に応力がかかる部分なので、しっかりとした接着操作を行うことが肝要であり、セレクティブエッチングは必須であると考えている。



松本 勝利 先生

【略歴】
1989年 医療法人 慈愛恵眞会
あらかい歯科医院（福島県）開業
GLOBAL DENTAL SYSTEM 代表
明海大学歯学部 生涯研修担当講師

神奈川歯科大学
顎口腔機能修復科学講座
有床義歯補綴学分野非常勤講師

日本顎咬合学会認定医・学術委員
日本審美歯科協会 会員

1 術前



下顎前歯の切端部にAtt.が認められる。

2 歯面清掃／セレクティブエッチング



MIの観点から、余分な歯質削除をしなくても十分な接着を得ることを目的に、マイクロエッチャーア II A (株式会社 モリムラ)を使用する。^{※1}
エナメル質部分には接着力向上のためにエッティング操作を行う。^{※2}

3 アドヒーシブ塗布／光照射



水洗乾燥した後に被着面全体にスコッチボンド™ユニバーサル アドヒーシブを塗布する。

十分に乾燥した後に光照射を10秒行う。



4 フィルテック™ シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジンの塗布



オペーカーとしてフィルテック™ シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン(OA3)を使用し、光照射する(ファンデーションレイヤー)。切端部分にフィルテック™ シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン(A1)を使用する。



5 光照射



エリパー™ ディープ キュア
LED 光重合器を用いて
しっかりと光照射する。



6 研磨



シリコンポイントなどを使用して研磨する。

7 術後



下顎左側2、3番のAtt.の処置が完了した。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

歯科用製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

販売名: フィルテック シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン 認証番号: 222AKBZX00110000

販売名: スコッチボンド ユニバーサルアドヒーシブ 認証番号: 224AKBZX00054000

販売名: スコッチボンド ユニバーサルエッチャント シリンジ 認証番号: 224AKBZX00142000

販売名: エリパー ディープ キュア LED 光重合器 展示番号: 13B1X10109000261

ご使用に際しては、添付文書を必ずお読みください。

3M、フィルテック、スコッチボンド、エリパーは、3M社の商標です。

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.
DEN-1359-GJ(101815)PN/e.

Web [3M歯科](#)

3M コールセンター

0120-332-329

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
フリーダイヤルが繋がらない場合は、
03-6409-3157をご利用ください。