



Tegaderm™

I.V. Management

Produktinweise



3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced
Fixierverband 1685 für großlumige Katheter

3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Fixierverband 1685

Bei der Entwicklung von 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Fixierverband 1685 wurde auf eine moderne Katheterfixierung und ein sanftes Entfernen Wert gelegt, um höchsten Patientenkomfort zu gewährleisten.



Großlumige Katheter

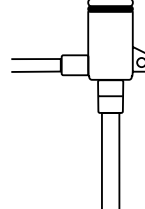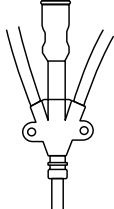

Sichtbarkeit der Einstichstelle

Der transparente Verband ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Komplikationen an der Einstichstelle.

Katheterfixierung

Entwickelt, um Bewegung und Dislokation von Kathetern zu minimieren.

Gleichmäßige Applikation


Sichere und einfache Platzierung dank Applikationsrahmen für gleichmäßige Applikation.

Patientenkomfort


Der Verband kann bis zu 7 Tage getragen werden, die Häufigkeit von Verbandswechseln und des Legens neuer Katheter wird so potenziell reduziert.

*In-vitro-Versuche belegen, dass die Folie eine Barriere gegen Viren mit einem Durchmesser von 27 nm und größer bildet, solange der Verband intakt und nicht durchlässig ist.

1685

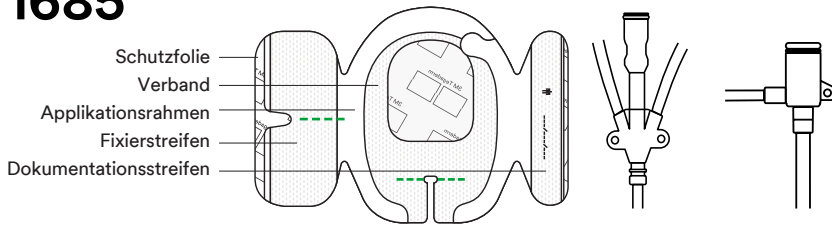

Vorbereiten

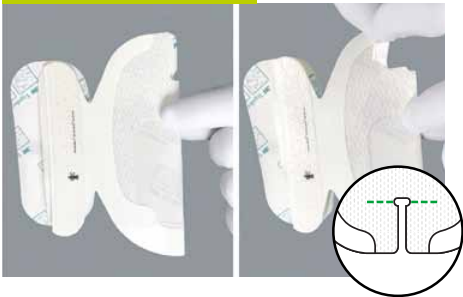


Bereiten Sie die Einstichstelle gemäß Ihrem Pflegestandard vor. Der Bereich muss vollständig trocken und fettfrei sein. Vor dem Abziehen der Schutzfolie muss die Schlüssellockkerbe an der Perforation geöffnet werden. Ziehen Sie erst danach die Schutzfolie vom Verband ab.

Anmodellieren



Platzieren Sie das Sichtfenster über der Einstichstelle. Achten Sie darauf, den Verband beim Applizieren nicht zu dehnen. Modellieren Sie den gesamten Verband gut an, damit er nach dem Entfernen des Applikationsrahmens sicher haftet.

Fixieren

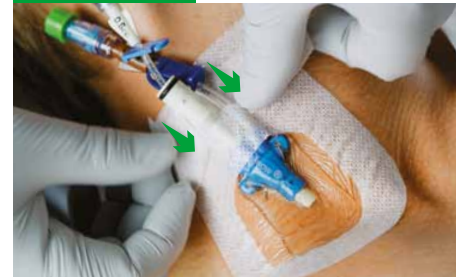

Bringen Sie den Fixierstreifen unter dem Schlauch und überlappend mit dem Verband an. Entfernen Sie die klebstofffreien Laschen.

Fixieren



Bringen Sie den Dokumentationsstreifen wie im Bild gezeigt an. Entfernen Sie die klebstofffreien Laschen.

Kontrollieren



Wechseln Sie den 3M™ Tegaderm™ Advanced Fixierverband alle sieben (7) Tage, wenn sich der Verband lockert oder er verschmutzt ist oder im Fall einer Schwellung, einer sichtbaren Drainage oder bei Verlust der Sichtbarkeit der Einstichstelle.

Entfernen



Öffnen Sie den Fixierstreifen an der Perforation. Nach dem Öffnen an der Perforation halten Sie den Fixierstreifen und lösen den Verband bis zur Kathetereinstichstelle langsam und in einem flachen Winkel ab. Vermeiden Sie eine Verletzung der Haut, indem Sie den Verband zurückziehen, anstatt ihn von der Haut nach oben abzureißen.

Weitere wichtige Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Produkts.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Gesamtgröße Verband	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
1685	8,5 cm x 11,5 cm	50	07644752	5021923	7079140	35.05.10.03.1



3M Medica – Zweigniederlassung der 3M Deutschland GmbH
 Hammfelddamm 11
 41453 Neuss
 Telefon +49 2131 14 48 18
 Fax +49 2131 14 44 32
 3Mmedica.de@mmm.com
 www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH Health Care
 Kranichberggasse 4
 1120 Wien
 Telefon +49 2131 14 48 18
 Fax +43 186 68 63 30
 Medizin-at@mmm.com
 www.3Maustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH Health Care
 Eggstrasse 93
 8803 Rüschlikon
 Telefon +41 44 724 90 90
 Fax +41 44 724 92 38
 Innovation.ch@mmm.com
 www.3MSchweiz.ch/medicalsolutions

3M und Tegaderm sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von 3M. Bitte nach dem Gebrauch recyceln. © 3M 2019. Alle Rechte vorbehalten. #2019-0050