

Système de traitement des  
déchirures cutanées 3M

## La solution tout indiquée pour le traitement des déchirures cutanées

Une peau fragilisée, une diminution de la sensibilité  
et une mobilité réduite peuvent contribuer à la  
formation de déchirures cutanées.

Le système de traitement des déchirures cutanées  
3M constitue un moyen simple et économique de  
traiter ces plaies, qui peuvent s'avérer douloureuses.



### 1<sup>RE</sup> ÉTAPE : Protecteur cutané non irritant Cavilon<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Le protecteur cutané non irritant Cavilon<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> forme une barrière protectrice transparente entre la peau et les irritants qui risquent d'en causer la dégradation.

- Aide à prévenir la macération de la peau
- Exempt d'alcool; n'irrite pas la peau rougie ou dénudée
- Non cytotoxique; ne nuit pas à la cicatrisation de la peau
- Offre une excellente protection contre les traumatismes cutanés causés par le ruban adhésif

Appliquer une couche uniforme de protecteur cutané non irritant  
Cavilon<sup>MC</sup> sur tout le pourtour de la plaie. Laisser sécher complètement  
avant d'appliquer le pansement.



### 2<sup>E</sup> ÉTAPE : Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Le pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> offre un rendement clinique optimal et un temps de port prolongé.

- Permet une surveillance facile de la plaie, de l'exsudat et du pourtour de la plaie
- Peut être porté plus longtemps que les autres pansements de marques populaires
- Est confortable pour les patients

Centrer le pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> sur  
la plaie. Appuyer délicatement sur le pansement pour le mettre en place. Retirer  
lentement le cadre tout en appuyant sur le pansement et en lissant la bordure.

# Algorithme décisionnel relatif aux déchirures cutanées de l'ISTAP

Utilisé avec la permission de l'International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP)

MAÎTRISER LE SAIGNEMENT

DÉCHIRURES CUTANÉES

ÉVALUER

NETTOYER

RAPPROCHER LES LÈVRES DE LA PLAIE

CLASSIFIER (mesurer et documenter)

## OBJECTIFS DU TRAITEMENT

- Traiter la cause
- Mettre en œuvre un protocole de prévention
- Cicatrisation des plaies en milieu humide
- Éviter les traumatismes
- Protéger la peau du pourtour de la plaie
- Gérer l'exsudat
- Éviter l'infection
- Soulagement de la douleur

## OPTIONS DE TRAITEMENT CONFORMÉMENT À L'ÉTAT DE LA PLAIE

ÉTAPE 1 :  
AUCUNE PERTE  
DE PEAU



ÉTAPE 2 :  
PERTE PARTIELLE  
D'UN LAMBEAU



ÉTAPE 3 :  
PERTE TOTALE  
D'UN LAMBEAU



## Algorithme de traitement des déchirures cutanées de 3M

### DÉCHIRURES CUTANÉES

Plaie causée par la friction et/ou un traumatisme contondant qui résulte en la séparation des couches de la peau

- Consultation avec un diététiste
- Recommandation sur le travail/la physiothérapie
- Évaluation de la sécurité
- Mise en œuvre de stratégies pour les déchirures cutanées

- Réponse aux besoins du patient
- Évaluation de la douleur
- Consultation d'un médecin/d'une infirmière praticienne au sujet du soulagement de la douleur

### GESTION DE LA PLAIE

Irriguer la plaie conformément à la politique/au protocole  
Appliquer le protecteur cutané non irritant Cavilon<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> sur les tissus du pourtour de la plaie

#### SAIGNEMENT

Pansement d'alginate à haute intégrité/hautement gélifiant Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Options de pansement protecteur:

- Pansement adhésif de toile souple avec compresse Medipore<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>
- Pansement transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> avec compresse non adhérente
- Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>
- Pansement en mousse avec bordure de silicone Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

#### LAMBEAU PRÉSENT Refermer le lambeau

Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>  
ou  
Pansement en mousse avec bordure de silicone Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

#### LAMBEAU ABSENT

Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>  
ou  
Pansement en mousse avec bordure de silicone Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

## Renseignements pour commander

Protecteur cutané non irritant Cavilon<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

N° de référence	Format	Articles/boîte	Boîtes/caisse
3343E	Tube-applicateur de 1,0 ml	25	4
3344E	Lingette de 1,0 ml	30	6
3345E	Tube-applicateur de 3,0 ml	25	4
3346E	Flacon pulvérisateur de 28,0 ml	12	1

**3M**

Offert au Canada par la :

Division des solutions pour  
soins aigus et continus de 3M

Compagnie 3M Canada  
C.P. 5757  
London (Ontario)  
N6A 4T1  
1800 364-3577  
www.3M.ca/Skinwound

3M Soins de santé  
2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN 55144-1000  
É.-U.

Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

N° de référence	Dimensions de la compresse du pansement	Dimensions globales du pansement	Pansements /boîte	Boîte /caisse
90800, ovale	3,8 x 5,7 cm 1,5 x 2,25 po	7,6 x 9,5 cm 3,0 x 3,75 po	5	6
90801, ovale	6,0 x 7,6 cm 2,4 x 3,0 po	11,1 x 12,7 cm 4,4 x 5,0 po	5	6
90802, carré	9,8 x 10,1 cm 3,9 x 4,0 po	14,9 x 15,2 cm 5,9 x 6,0 po	5	6
90803, ovale	8,5 x 10,7 cm 3,4 x 4,25 po	14,2 x 15,8 cm 5,6 x 6,25 po	5	6
90805, carré	14,9 x 15,2 cm 5,9 x 6,0 po	20,0 x 20,3 cm 7,9 x 8,0 po	5	4
90807, région sacrée	11,75 x 14,3 cm 4,5 x 5,6 po	16,8 x 19 cm 6,6 x 7,5 po	5	4

3M, 3M Science. Au service de la vie., Cavilon, Medipore et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2017, 3M. Tous droits réservés. BA-16-22543 161207193 F