

**3M**

**Cavilon™**

# Como Aplicar o 3M™ Cavilon™ Advanced Protetor de Pele

Redução do Risco, Tratamento e Gerenciamento da  
Dermatite Associada à Incontinência (DAI)



# Como Aplicar o 3M™ Cavilon™ Advanced Protetor de Pele

Redução do Risco, Tratamento e Gerenciamento da Dermatite Associada à Incontinência (DAI)

## Materiais necessários:

- 3M™ Cavilon™ Limpador de Pele sem Enxágue ou água, conforme protocolo institucional
- Lenços secos macios
- 3M™ Cavilon™ Advanced Protetor de Pele
- Luvas para procedimentos

## Prepare os materiais



**1** Abra o pacote de Cavilon Advanced Protetor de Pele e mantenha o aplicador na embalagem.



**2** Umedeça previamente vários lenços com Cavilon Limpador de Pele Sem Enxágue ou água e separe.

## Posicione e limpe o paciente



**3** Posicione o paciente.




**4** Limpe a pele delicadamente com Cavilon Limpador de Pele sem Enxágue conforme protocolo institucional. Se necessário, seque delicadamente as áreas de pele intacta. Se existirem áreas de erosão (desnudadas), o excesso de drenagem serosa ou sero-sanguínea pode ser eliminado com uma gaze, se necessário.

## Troque as luvas



**5** Troque as suas luvas.

## Área de aplicação\*

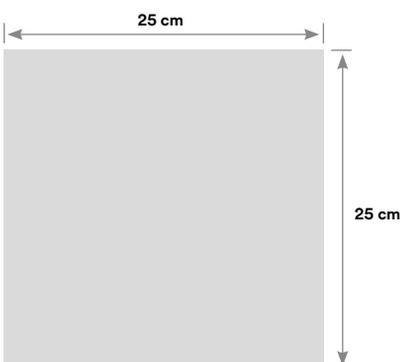

**Mais de um aplicador pode ser usado se for preciso cobrir áreas maiores.**

Consulte as instruções de uso do produto Cavilon Advanced Protetor de Pele para obter informações adicionais relacionadas a contraindicações, precauções e advertências.

\* Cada aplicador cobrirá aproximadamente 625 cm<sup>2</sup> (25 × 25 cm)

## Aplicando Cavilon Advanced Protetor de Pele



**6** Aponte a extremidade da esponja do aplicador para baixo e pressione firmemente a alavanca para quebrar a ampola interna. Um ruído ou estalar será notado com a quebra da ampola. Não é necessário continuar pressionando a alavanca.



**7** Mantenha o aplicador apontado para baixo por, aproximadamente, 10 segundos para permitir que a solução desça para a esponja. Não é necessária pressão contínua sobre a alavanca. Evite que o fluido sature a esponja.



**8** Aplique Cavilon Advanced Protetor de Pele passando delicadamente a esponja ao longo da área afetada e da pele adjacente. Use um movimento uniforme, de varredura, com sobreposição mínima do produto. O aplicador pode ser usado em qualquer direção.

*Não é preciso pressionar o aplicador. A pressão adicional pode resultar em excesso indesejado de produto e/ou desperdício.*



**9** Continue a aplicação até que toda a área envolvida tenha sido coberta. É importante aplicar o produto em toda a pele que está exposta a fezes e/ou urina.



**10** Deixe a área secar por, pelo menos, 30 segundos. Se alguma área for esquecida, espere até que o fluido tenha secado completamente antes de aplicar mais produto.



**11** Se Cavilon Advanced Protetor de Pele for aplicado em uma área de dobra ou outra área de contato pele com pele, certifique-se que as superfícies tenham sido separadas para permitir que o fluido seque completamente (pelo menos 30 segundos) antes de deixar a pele voltar à posição normal.

## Informações Adicionais



Reaplique o produto de 2 a 3 vezes por semana. Cavilon Advanced Protetor de Pele é resistente à umidade e não é removido pela limpeza rotineira. Maior frequência de aplicações pode resultar em acúmulo e excesso do produto.



Deixe o produto secar por, pelo menos, 60 segundos antes de aplicar uma fita ou curativo adesivo sobre Cavilon Advanced Protetor de Pele.

A película se desgastará gradualmente e não precisa ser removida. Se for preciso remover o produto, use um removedor de adesivo que contenha hexametildisiloxano (HDMS) ou polímero de silicone.

# Descubra como 3M™ Cavilon™ Advanced Protetor de Pele pode ajudá-lo a transformar a integridade da pele de seus pacientes.

Para mais informações acesse [3M.com.br/CavilonAdvanced](http://3M.com.br/CavilonAdvanced)

Contate seu representante de vendas 3M ou fale com a 3M em **0800-0132333** ou [falecoma3M@mmm.com](mailto:falecoma3M@mmm.com)



## Informação para pedido

3M™ Cavilon™ Advanced Protetor de Pele

Código	Núm. Cat.	Tamanho	Itens/caixa
HB004616247	5050	Aplicador de 2,7 ml	20

Fale com a 3M

**0800-0132333**

falecoma3m@mmm.com  
Divisão Soluções Médicas  
3M Health Care  
3M do Brasil Ltda.  
Via Anhanguera, km 110  
13181-900 - Sumaré/SP

 [facebook.com/3MCuidadosSaudeBrasil](https://facebook.com/3MCuidadosSaudeBrasil)  
 [youtube.com/3MCuidadosaSaude](https://youtube.com/3MCuidadosaSaude)  
 [3m.com.br/hospitalar](http://3m.com.br/hospitalar)