

手袋につきにくい、伸縮テープ剥離紙の剥がし方

3M™ マルチポア™ 高通気性撥水テープ EX (5cm 幅) を使用

ポイント

- 始めから剥離紙を全て剥がさない

動画(使用方法)のキャプチャー画像を掲載した資料です。
動画の視聴とあわせてご活用ください。

動画 URL : <http://go.3M.com/maedical/liner4733/> (再生時間 : 34 秒)



このような経験はありませんか？



端から剥がしにくい




接着面同士がくっついてしまう

伸縮テープの剥離紙を剥がす時に剥がしにくかったり、接着面同士がくっついてしまうことはありませんか？

手袋につきにくい剥離紙の剥がし方



1 剥離紙の2カ所に切れ目を入れ、左右に引っ張り、

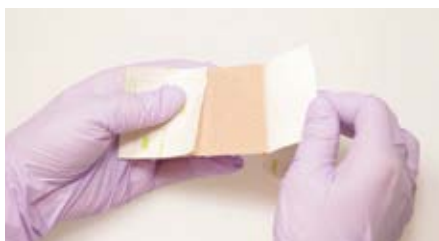

2 中央の剥離紙を剥がします。



3 手袋をしていても、べたつかず貼ることが出来ます。