

伸縮テープの貼り方・剥がし方

3M™ マルチポア™ 高通気性撥水テープ EX (5cm幅) を使用

ポイント

- テープは中央部から伸ばさないで貼る
- 貼った後は確実に圧着
- テープを約 180 度に折り返し、ゆっくり剥がす

動画(使用方法)のキャプチャー画像を掲載した資料です。
動画の視聴とあわせてご活用ください。

動画 URL : <http://go.3M.com/medical/std4733/> (再生時間 : 50 秒)



貼り方



- 1** 皮膚に負担がかかりにくくするために、テープを中央部から引っ張らずに貼ります。



- 2** しっかり貼るためには、指の腹でやさしく圧着し、なじませるようにします。こうすることで、より安定した粘着力が得られます。



- !** 临床上必要な場合以外は、テープを伸ばさずに貼ってください。

剥がし方



- 1** 皮膚に負担がかかりにくくするために、テープを約 180 度に折り返し、



- 2** 皮膚が持ち上がらないように手で押さえながら、体毛の方向に逆らわず折り返してゆっくりと剥がします。

※ 本資料は使用方法の一例であり、本品の取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご検討ください。

3M、マルチポアは、3M社の商標です。

2019年10月発行