

伸縮テープのチューブ固定方法 (Ω固定)

3M™ マルチポア™ 高通気性撥水テープ EX (5cm 幅) を使用

ポイント

- 始めから剥離紙を全て剥がさない
- 粘着面同士を貼り合わせる

動画(使用方法)のキャプチャー画像を掲載した資料です。
動画の視聴とあわせてご活用ください。

動画 URL : <http://go.3M.com/medical/omega4733/> (再生時間 : 1分7秒)



貼り方



1 テープを適切な長さに切り、剥離紙のついた状態で3等分に折り目をつけます。テープの四隅を丸く切ることで、剥がれにくくなります。



2 剥離紙の中央に切れ目を入れ、左右に引っ張り(次へ)



3 剥離紙を3等分の折り目で折り返します。



4 テープを中央からチューブに巻き付けて、粘着面同士を貼り合わせます。




5 剥離紙を剥がしながら、テープを伸ばさずに皮膚へ貼ります。



6 しっかり貼るためには、指の腹でやさしく圧着し、なじませるようします。こうすることで、より安定した粘着力が得られます。

Ω (オメガ) 固定の効果

- チューブが直接皮膚に触れないため、皮膚が圧迫されにくい
- 隙間無く貼れるため剥がれにくい

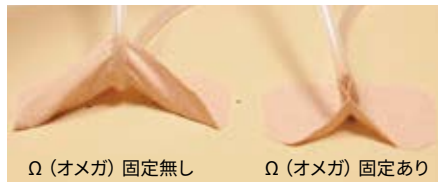

※ 本資料は使用方法の一例であり、本品およびチューブ等の取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご検討ください。