

ルート固定用テープの交換方法のコツ

3M™ マルチポア™ 高通気性撥水テープ EX (5cm 幅) を使用

ポイント

- テープを片側ずつ剥がす
- 剥がした部分を折り返し、粘着面同士を貼り合わせる
- 貼り合せた部分を持ち、左右に引っ張る

動画（使用方法）のキャプチャ画像を掲載した資料です。
動画の視聴とあわせてご活用ください。

動画 URL : <http://go.3M.com/medical/root4733> (再生時間 : 1分8秒)



このような経験はありませんか？



テープを皮膚から剥がす時、このようになってしまった経験はありませんか？



こうなるとチューブから取れにくくなり、ハサミが必要になる場合があります。
次にご紹介する方法でテープを剥がせば、このような粘着面同士が付いてしまう事を防げます。

交換方法のコツ



1 はじめに、テープの片側をチューブの近くまで剥がします。



2 剥がした部分を折り返し、粘着面同士を5～10mm程度貼り合わせます。



3 次に、反対側も同様にテープを剥がし、



4 粘着面同士を貼り合わせます。



5 続いて、残りの部分を皮膚から剥がします。



6 最後に、貼り合わせた粘着剤が付いていない部分を持ち、



7 左右に引っ張り、



8 チューブからテープを剥がします。ハサミを使わずにチューブからテープを簡単に剥がすことができます。

※ 本資料は使用方法の一例であり、本品およびチューブ等の取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご検討ください。

3M、マルチポアは、3M社の商標です。

2019年10月発行


3M

スリーエム ジャパン株式会社
医療用製品事業部
<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
CAPT-038-A

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)