

経鼻チューブの固定方法

3M™ マルチポア™ 高通気性撥水テープ EX (7.5cm 幅) を使用

3つのポイント

- 伸びない方向が長くなるように、テープを切る
- 始めから剥離紙を全て剥がさない
- 遊びを持たせて、テープをチューブに巻きつける

動画 (使用方法) のキャプチャー画像を掲載した資料です。
動画の視聴とあわせてご活用ください。

動画 URL : <http://go.3M.com/medical/nasal4733/> (再生時間 : 2分8秒)




このような経験はありませんか？




経鼻チューブ固定を行うと鼻翼に潰瘍が出来る事はありませんか？
鼻翼の圧迫に配慮した、経鼻チューブの固定方法をご紹介します。

テープの準備

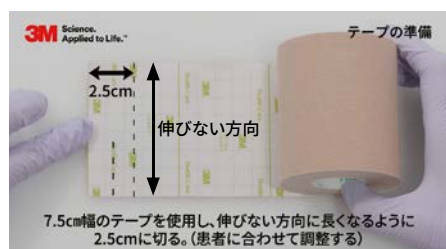

1 7.5cm 幅のテープを伸びない方向が長くなるように、2.5cmに切ります。こうすることで、固定した後のチューブ先端位置の変動を抑えることができます。

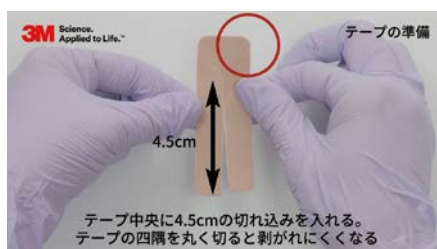

2 テープの中央に4.5cmの切れ込みを入れます。テープの四隅を丸く切ると、剥がれにくくなります。

皮膚の準備



テープを貼付する前に、皮膚を清拭し油分を取り除きます。

貼り方



1 切り込み部分の付け根を手でちぎるように切れ目を入れます。



2 切り込みのない部分の剥離紙を剥がします。



3 鼻尖部分に、テープを伸ばさずに貼ります。



4 片方の剥離紙を3分の2程度剥がした位置に、



5 鼻尖部の端から約1cm離れチューブの下側を外側から合わせ、テープに遊びを持たせます。



! 遊びを持たせずにテープをきつく巻きつけると、鼻翼の圧迫につながります。



6 残った剥離紙を剥がしながらチューブにしっかり巻き付けます。



7 もう片方の剥離紙の3分の2程度剥がした位置に、鼻尖部の端から約1cm離れたチューブの下側を外側から合わせ、テープに遊びを持たせます。



8 残った剥離紙を剥がしながら、先程とは逆向きに、チューブに巻き付けます。



9 遊び部分の粘着面同士を貼り合わせます。



10 鼻翼を圧迫していないか確認し、遊びの部分も含めて全体を圧着し、なじませるようにします。

※ 本資料は使用方法の一例であり、本品およびチューブ等の取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご検討ください。

3M、マルチポアは、3M社の商標です。

2019年10月発行

3M

スリーエム ジャパン株式会社
医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
CAPT-039-A

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)