

圧迫止血時の固定方法

3M™ マルチポア™ 高通気性撥水テープ EX (5cm 幅) を使用

3つのポイント

- 始めから剥離紙を全て剥がさない
- 圧迫が必要な部分のみ、テープを伸ばして貼る
- 皮膚に貼るテープの両端は、伸ばさずに貼る

動画（使用方法）のキャプチャー画像を掲載した資料です。
動画の視聴とあわせてご活用ください。

動画 URL : <http://go.3M.com/medical/appaku4733/> (再生時間：1分32秒)




このような経験はありませんか？




圧迫止血のために伸縮性のあるテープを引張って貼り、発赤や水疱などの皮膚トラブルが、発生する事はありませんか？
皮膚への負担を軽減する、圧迫止血の固定方法をご紹介します。

テープの準備

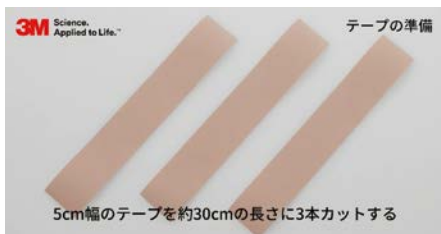

1 テープを約30cmの長さに3本切ります。

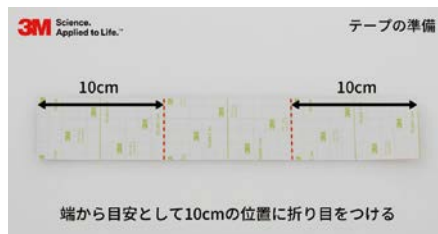


2 3本とも、端から10cmの位置2ヶ所に、折り目をつけます。



3 2ヶ所の折り目をつけた部分で、テープを手でちぎるように剥離紙に切れ目を入れてから



4 左右に引っ張ります。

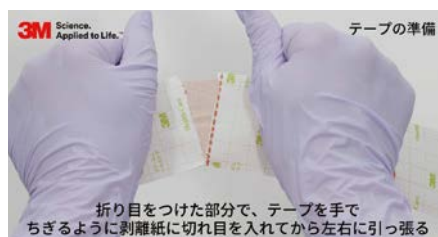

5 中央の剥離紙を剥がします。

貼り方



1 圧迫が必要な、止血綿にあたる部分のテープを伸ばし、



2 止血綿の両端に貼ります。



3 皮膚に貼るテープの両端は、剥離紙を剥がしながら、伸ばさずに貼ります。



4 指の腹でやさしく圧着し、なじませるようにします。こうすることでより安定した粘着力が得られます。



5 残りの2本も同様に止血綿があたる中央の剥離紙を剥がした部分だけを伸ばして貼り、両端は伸ばさずに貼ります。

※ 本資料は使用方法の一例であり、本品およびチューブ等の取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご検討ください。

3M、マルチポアは、3M社の商標です。

2019年10月発行

3M


スリーエム ジャパン株式会社
医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
CAPT-040-A

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)