

気管内チューブの固定方法

3M™ マルチポア™ ドライ サージカルテープ (1.25cm 幅) を使用

ポイント

- 始めから剥離紙を全て剥がさない
- テープは伸ばさないで貼る
- 貼った後は確実に圧着


動画(使用方法)のキャプチャー画像を掲載した資料です。
動画の視聴とあわせてご活用ください。



動画 URL : <http://go.3M.com/medical/intubation3730/> (再生時間 : 1分39秒)




テープの準備

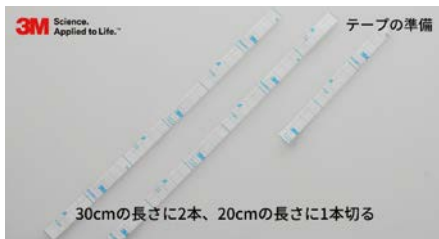

テープを30cmの長さに2本、20cmの長さに1本切ります。

貼り方

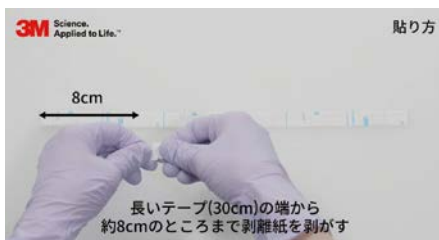

- 1** 30cmのテープの端から約8cmのところまで剥離紙を剥がします。



- 2** 剥がす長さは、口角から頬骨突起までの長さを目安に調節します。



- 3** 口角から頬骨突起に向かって、テープを伸ばさずに貼り、指の腹でやさしく圧着します。



- 4** 剥離紙を剥がしながら、チューブに2周巻きつけます。



- 5** 反対側の頬骨突起に向かって、テープを伸ばさずに貼ります。



- 6** 2本目の30cmのテープも、端から約8cmのところまで剥離紙を剥がします。



7 口角から右下顎に向かって、テープを伸ばさずに貼り、指の腹でやさしく圧着します。



8 剥離紙を剥がしながら、1本目とは逆方向にチューブに2周巻き付けます。



9 反対側の下顎に向かって、テープを伸ばさないように貼ります。



10 バイトブロックを20cmのテープで固定します。



11 安定した粘着力を得るためには、指の腹でやさしく圧着し、なじませるようにします。



12 こうすることで安定した粘着力が得られます。

※ 本資料は使用方法の一例であり、本品およびカテーテル等の取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご検討ください。

3M、マルチポアは、3M社の商標です。

2019年10月発行

スリーエム ジャパン株式会社
医療用製品事業部
<http://go.3M.com/medical-jp/>

© 3M 2019. All Rights Reserved.
CAPT-044-A

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
 **0570-011-321**
8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)