

## 基本のテープの貼り方

### 3M™ トランスポア™ ホワイト サージカルテープ (2.5cm 幅) を使用

#### ポイント

- 予めテープを適切な長さに切る
- テープは引っ張らないで貼る
- 貼った後は確実に圧着

動画(使用方法)のキャプチャー画像を掲載した資料です。  
動画の視聴とあわせてご活用ください。

動画 URL : <http://go.3M.com/medical/std1534/> (再生時間 : 38 秒)



## 良い貼り方



**1** テープを予め適切な長さに切ります。



**2** 皮膚に負担がかかりにくくするために、テープを中央部から外側に引っ張らずに貼ります。



**3** 安定した粘着力を得るために、指の腹でやさしく圧着し、なじませるようになります。

## 悪い貼り方



**!** テープを予め切らずに、端からテープを引っ張って貼ると皮膚に不要な「ひずみ」や「緊張」を与え、皮膚トラブルの原因となります。

※ 本資料は使用方法の一例であり、本品の取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご検討ください。

3M、トランスポアは、3M社の商標です。

2019年10月発行