

## 胸腔ドレーンの固定方法

### 3M™ マルチポア™ 高通気性撥水テープ EX (10cm 幅) を使用

#### ポイント

- 始めから剥離紙を全て剥がさない
- テープは伸ばさないで貼る
- 貼った後は確実に圧着

動画(使用方法)のキャプチャー画像を掲載した資料です。  
動画の視聴とあわせてご活用ください。

動画 URL : <http://go.3M.com/medical/breast4733/> (再生時間 : 1分35秒)




### このような経験はありませんか？



胸腔ドレーンを固定するとき、テープを2枚重ねることによって、剥がれやすくなることはありませんか？  
テープ1枚で、カテーテルが皮膚に直接当たらないように固定する方法をご紹介します。

### テープの準備

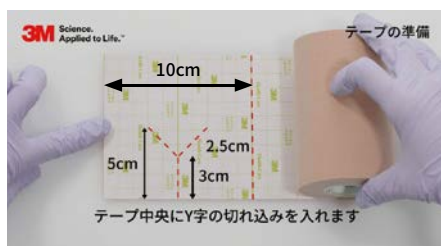

**1** 10cm幅のテープを10cmの長さに切り、テープ中央にY字の切れ込みを入れます。



**2** テープの四隅を丸く切ると、剥がれにくくなります。


### 貼り方



**1** 端から3cmの位置2ヶ所に、折り目をつけます。



**2** テープ中央をちぎるように剥離紙に切れ目を入れてから左右に引っ張ります。

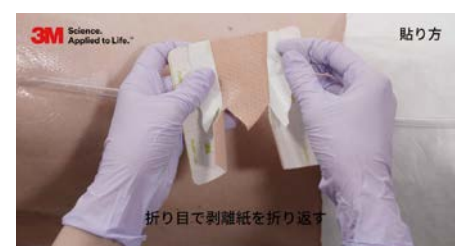

**3** 折り目で剥離紙を折り返します。



**4** 切れ込みが入っていない側をチューブ挿入部の方向に向けます。



**5** テープの中央からチューブに巻き付けて、Ω(オメガ)固定し粘着面同士を貼り合わせます。



**6** 片方の剥離紙を剥がしながら、テープを伸ばさずに皮膚へ貼ります。



**7** もう片方の剥離紙を剥がしながら、切れ込み部分のテープ同士が重なり合うように伸ばさずに皮膚へ貼ります。



**8** 安定した粘着力を得るために、指の腹でやさしく圧着し、なじませるようにします。

※ 本資料は使用方法の一例であり、本品およびカテーテル等の取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご確認ください。

3M、マルチボアは、3M社の商標です。

2019年10月発行

スリーエム ジャパン株式会社  
医療用製品事業部  
<http://go.3M.com/medical-jp/>

© 3M 2019. All Rights Reserved.  
CAPT-047-A

カスタマーコールセンター  
製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
 **0570-011-321**  
8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)