



210 mm

105 mm



10) Use um removedor de adesivo contendo HMDS para remover um produto adesivo que tenha sido colocado sobre o filme. Isto é especialmente importante para pacientes com pele frágil.

Armazenamento / Prazo de validade:

Para obter melhores resultados, o produto deve ser armazenado em um ambiente fresco e seco. Evite o calor excessivo.
Para a vida útil, consulte a data de validade em cada embalagem.
Os aplicadores são embalados individualmente para uso único. O fluido dentro da ampola não é estéril. O aplicador é estéril se a embalagem estiver intacta. Não use o produto se a embalagem estiver danificada ou aberta.
Para mais informações, entre em contato com o representante local da 3M ou Fale com a 3M.
Não é fabricado com látex de borracha natural.
Não utilize se a embalagem estiver danificada.
Não reutilizar.
O aplicador é esterilizado por óxido de etileno. O aplicador é estéril desde que sua embalagem esteja intacta. Não reesterilizar

Cadastro ANVISA 80284930372

Farmacêutica Responsável:
Roberta F. F. Marsaioli
CRF-SP 15095

Fale com a 3M

0800-0132333
www.3m.com.br
falecoma3M@mmm.com

Fabricado por 3M Health Care
2510 Conway Ave.,
St. Paul, MN 55144 U.S.A.

Importado e distribuído por:
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, km 110 - Sumaré - SP
CNPJ 45.985.371/0001-08
Indústria Brasileira

3M

**Cavilon™ Advanced
Protetor de Pele**

Instruções de uso

FL1128 (A)

148,5 mm



Qualquer dúvida referente à reprodução
deste material contacte Eng. Embalagem 3M.
Tel.: (19) 3838-6724



FL1128 (A) (FEV/19)



black



210 mm

105 mm



Descrição do Produto:

3M™ Cavilon™ Advanced Protetor de Pele é uma solução polimérica de cianoacrilato, destinada à proteção da pele intacta ou danificada por dermatites associadas à umidade e ou por lesões de perda superficiais ou parciais de espessura da pele. Após a aplicação, o líquido seca rapidamente formando um filme protetor cutâneo com maior durabilidade* e resistente à umidade. É elastomérico, ou seja, possui propriedades elásticas que proporcionam um filme flexível cobrindo os contornos da pele. O filme é transparente, uniforme, não citotóxico e hipoalergênico. Adere-se à pele seca ou úmida e permanece intacto durante condições de contínua ou repetida exposição à umidade ou irritantes cáusticos (tais como urina, fezes, e líquidos digestivos). O produto não requer remoção, possui boa permeabilidade ao oxigênio e vapor.

Ingredientes: Solução: Hexametildisiloxano, Tetrapolímero acrílico, 2-octilo Cianoacrilato. **Aplicador:** Polietileno de alta densidade, ampola de vidro, polietileno de baixa densidade e espuma de poliuretano.

Indicações de uso:

3M™ Cavilon™ Advanced Protetor de Pele forma um filme protetor da pele intacta ou danificada por dermatites associadas à umidade e ou por lesões de perda superficiais ou parciais de espessura da pele. É eficaz em condições em que a pele é frequentemente exposta à umidade e substâncias irritantes como urina, fezes, (reduzindo e revertendo os efeitos da dermatite associada à incontinência), líquidos digestivos e exsudato de feridas. 3M™ Cavilon™ Advanced Protetor de Pele pode ser usado em áreas expostas ao atrito e cisalhamento como roupas, roupas de cama, sapatos ou qualquer outro material que fricção a pele.

Contra-indicações:

O Cavilon Advanced Protetor de Pele NÃO deve ser usado:
• em feridas de espessura total
• dentro ou ao redor dos olhos (provoca irritação ocular grave)

Atenção:

1. PERIGO! LIQUIDO E VAPORES ALTAMENTE INFLAMÁVEIS!
2. Cavilon Advanced Protetor de Pele é altamente inflamável até secar completamente na pele.
3. O produto só deverá ser aplicado apenas quando fontes de ignição ou dispositivos de produção de calor não estiverem em uso.
4. Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume.
5. Use o produto apenas em áreas bem ventiladas.
6. Evite usar em pessoas que são alérgicas a qualquer um dos componentes.
7. O produto é embalado individualmente para uso único. Após aberto a reutilização pode resultar em um aumento do risco de infecção ou desempenho inadequado do produto.
8. O produto não se destina às aplicações que necessitem de produtos estéreis (por exemplo, proteção pericater vascular ou proteção peri incisão cirúrgica).
9. Mantenha fora do alcance das crianças.

Precauções:

• A absorção da pele e a eficácia de medicamentos tópicos (incluindo antimicrobianos, antifúngicos e analgésicos) podem ser reduzidas pela presença do Cavilon Advanced Protetor de Pele.

- O uso de outros produtos protetores, pomadas, cremes ou loções pode reduzir significativamente a eficácia do produto.
- O produto pode aumentar a adesão de alguns produtos, como por exemplo: fitas e curativos adesivos, particularmente nos primeiros dias de uso. Ao remover um produto adesivo, é importante seguir as instruções de uso (etapa 10 especificada abaixo).

Instruções de uso:

- 1) A pele deve estar limpa antes da aplicação do 3M™ Cavilon™ Protetor de Pele. Portanto, limpe suavemente a pele, conforme necessário. Em caso de perda da integridade da pele (perda de espessura parcial da pele), o excesso de drenagem serosa ou sanguinolenta deve ser removido.
- 2) Abra o pacote e acione o aplicador. Veja a Figura 1. Coloque o polegar no final da alavanca. Aponte a extremidade da esponja do aplicador para baixo e pressione firmemente a alavanca para quebrar a ampola interna. Um ruído ou estalar será notado com a quebra da ampola. Não é necessário continuar pressionando a alavanca.
- 3) Mantenha o aplicador apontado para baixo por aproximadamente 10 segundos para permitir que a solução desça para a esponja; não é necessária pressão contínua sobre a alavanca e nem que o líquido sature a esponja completamente.
- 4) Usando um movimento uniforme e de varredura (Figura 2), passe suavemente a esponja na pele com sobreposição mínima. A pressão firme e / ou pressão para baixo na alavanca ou no aplicador não é necessária e pode resultar em excesso de produto ou molhabilidade local. Continue a aplicação até que toda a área necessária tenha sido coberta. O aplicador pode ser usado em qualquer direção. Aplique o produto em toda a pele exposta às fezes e / ou à urina, ou a um fluido corporal irritante. Deixe a área secar por pelo menos 30 segundos (Figura 3). Se uma área for esquecida, aguarde até que o líquido seque completamente antes de aplicar o produto adicional.
- 5) Se o Cavilon Advanced Protetor de Pele for aplicado em áreas de dobra da pele, certifique-se de que as superfícies estejam separadas para permitir que o líquido seque completamente (pelo menos 30 segundos) antes de retornar à posição normal.
- 6) Quando for usado sob adesivos médicos deixe o produto secar por aproximadamente 1 minuto antes de cobri-lo. Consulte a parte de Precauções nº 3.
- 7) Limpe a área afetada conforme necessário. O Cavilon Advanced Protetor de Pele é resistente à umidade e aos processos de higienização.
- 8) Reaplique o produto duas a três vezes por semana. Uma aplicação excessiva pode resultar no acúmulo do produto.
- 9) O filme desaparecerá da pele e não requer remoção. Se a remoção for desejada, o filme deve ser removido com um removedor de adesivo contendo hexametildisiloxano (HMDS).



Figura 1



Figura 2



Figura 3

148,5 mm



black



Qualquer dúvida referente à reprodução
deste material contacte Eng. Embalagem 3M.
Tel.: (19) 3838-6724



FL1128 (A) (FEV/19)