## New | 60mLサイズ

# 3M™ キャビロン™ 皮膚用リムーバースプレー

(ノンガスタイプ)

# 軽く握って、どの角度でも 狙った箇所にスプレーできる

ノンガスタイプでありながら、どの角度でもスプレーできる製品です。 体の向きを変えなくても、粘着製品の横・斜め・下からはくり剤を塗布できます。









特徴1

#### 軽く握るだけ

しっかり握ると約0.3mL、軽く握ってより 少量出すことも可能。



特徴2

### どの角度でも

患者様の体位を変えなくても、粘着製品 が剥がしやすい。



特徴3

#### 狙ってスプレーできる

噴口が見やすく、狙った箇所にスプレー しやすい。

その他特徴

● 液量が見えるパッケージデザイン ●プラスチック容器のため、廃棄しやすい



1 使用前にストッパーを矢印の方向にスライドしてください。初めてお使いになる時は、容器を正立にした状態で、液が出るまで数回スプレーしてください。



皮膚と粘着剤の隙間に染み込ませるように スプレーしながら、剥がしてください。



180度折り返しながら剥がします。

## 使い分けのポイント

		スプレータイプ	ワイプタイプ 🧾	滴下ボトルタイプ	
粘着製品 の例	対極板など <b>手術室</b> で 使用される製品	ワイプタイプの使用を推奨 (飛散性があるため)	0	ワイプタイプの使用を推奨 (滴下ボトルは使用しないでください)	
	電極などの モニタリング	0	0	$\circ$	
	サージカルテープや 貼付剤など	$\circ$	0	$\circ$	
	ストーマ装具1枚の はくり目安	2.0- 2.5mL使用	1袋3mL使用	1.0- 1.5mL使用	
顔への使用		ワイプタイプの使用を推奨 (飛散性があるため)	0	ワイプタイプの使用を推奨 (滴下ボトルの使用は避けてください)	
使用できる皮膚状態		健常皮膚 (薬機法対象外)			

⚠ 引火性のため、火気類の近くでの使用は避けてください。

## 3M™ キャビロン™ 皮膚用リムーバーシリーズの特長

やさしく パラっと "パラっと"素早く剥がれる

皮膚と粘着剤のわずかな隙間に入り、 粘着剤を皮膚から浮かせて剥がします。

はがして サラっと 剥がした後の洗浄がラク


ベタつきが少なく、"サラっと"した使用感です。 剥がした後の皮膚の洗浄がラクに行えます。

低刺激

デリケートなお肌に安心

非アルコール性のはくり剤で、低刺激です。 アレルギーテスト済み。

(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)

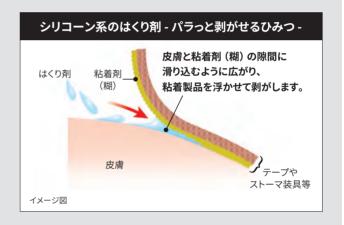

#### 3M™ キャビロン™ 皮膚用リムーバー

未滅菌	はくり剤

制口亚口	タイプ/容量(mL)	入れ目		希望病院価格 (税抜き)
製品番号		本/箱	袋/箱	円/箱
TP1	滴下ボトル/30	1	_	1,300
TP1-L50	滴下ボトル/ 50	1	_	1,650
TP3	スプレー (ノンガスタイプ) / 60	1	_	2,160
TP2	ワイプ/3	_	30	2,350



#### ●目、鼻、口等に入らないよう注意してください。万一入った場合は、直ちに多量の水でよく洗浄し、医師の診療を受けてください。

使用上の注意

火気厳禁

- ●傷んだ皮膚、傷、粘膜、腫れ物、湿疹、皮膚の感染部位、刺入部等へは使用しないでください。
- 粘着製品の剥離時に傷口が発見された場合には、傷口にかからないように使用してください。また傷口にかかる可能性がある場合には、 使用を中止してください。
- ●生後1ヶ月未満の乳児または体が小さい乳児への使用の可否は、医師の判断を仰いでください。

成分

ヘキサメチルジシロキサン、ソルビタンモノオレエート、トリカプリリン

第4類第一石油類 危険等級Ⅱ

添付の取扱説明書を、必ず読んでからご使用ください。

3M、キャビロンは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社 医療用製品事業部 http://go.3M.com/medical-jp/

Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2019. All Rights Reserved. HPM-893-A(0919)SE カスタマーコールセンター 製品のお問い合わせはナビダイヤルで 0570-011-321 8:45~17:15 /月~金(土日祝年末年始は除く)

2019年9月発行