



Achtung V.A.C.[®] Anwender aufgepasst!

Wie gehen Sie in Zeiten eines stark beanspruchten Gesundheitssystems mit Wunden um, deren Zustand sich unter klassischer V.A.C.[®] Therapy nicht zügig verbessert?

Probieren
Sie die
einwöchige
V.A.C.
VERAFLO™
Challenge!



In einer Retrospektiven Single Center Studie wurden 142 Patienten mit V.A.C. VERAFLLO™ Therapy mit Prontosan® Wundspüllösung und der V.A.C.[®] Therapy verglichen. Nachfolgend die klinischen Vorteile:¹

- **Verkürzte** Krankenhausaufenthaltsdauer um ca. **4 Tagen**
- **Weniger OP Eingriffe** unabhängig von der Verweildauer
- **80% - 94% Wundverschluss bei Entlassung vs. 62%** for V.A.C.[®] Therapy
- **Verkürzte Zeit bis zum finalen chirurgischen Eingriff um ca. 2 Tage**, welches zu einem schnelleren Wundverschluss führen kann und so Patienten schneller nach Hause entlassen werden können

Ermöglichen Sie Ihren Patienten durch den Einsatz der V.A.C. VERAFLLO™ Therapy eine frühe Entlassung und erzeugen Sie so zusätzlich freie Kapazitäten für Ihre Klinik



Probieren Sie die einwöchige V.A.C. VERAFLOR™ Therapy Challenge!



Dressing Auswahl

Wenn sich in der Wunde Fremdkörper oder Ablagerungen, wie beispielsweise infektiöses Material oder Beläge befinden, sollten Sie eine Anwendung des V.A.C.VERAFLO CLEANSE™ Dressings oder des V.A.C.VERAFLO CLEANSE CHOICE™ Dressings erwägen. Nutzen Sie V.A.C. VERAFLOR™ Dressings wenn Sie eine Granulation in der Wunde fördern und eine Reinigung der Wunde mit Hinblick auf den primären oder sekundären Wundverschluss erreichen wollen.

Dressing-Wechsel

Zu einem Verbandswechsel wird mindestens drei Mal wöchentlich (alle 48-72 Stunden) geraten.

Voreingestellte (anpassbare) Systemkonfiguration:

Einwirkzeit: 10 Minuten

V.A.C.® Therapy Zeit: 3.5 Stunden bei -125mmHg Unterdruck

Der Wundstatus ist an Tag 7 der Therapie zu bewerten.

Erwägen Sie für eine Überleitung von V.A.C. VERAFLOR™ in den ambulanten Versorgungsbereich ACTIV.A.C.™ Therapy oder SNAP™ Therapy

ACTIV.A.C.™
THERAPY SYSTEM



SNAP™
THERAPY SYSTEM



Für weitere Informationen, kontaktieren Sie Ihren 3M + KCI Ansprechpartner oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter der Telefonnummer 0800 7833524.

References

1. Kim PJ, Attinger CE, Steinberg JS, et al. The Impact of Negative-Pressure Wound Therapy with Instillation Compared with Standard Negative-Pressure Wound Therapy: A Retrospective, Historical, Cohort, Controlled Study. *Plast. Reconstr. Surg.* 2014; 133:709-716.

HINWEIS: Bitte beachten Sie die für diese Produkte und Therapien geltenden Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen. Bitte ziehen Sie vor der Anwendung einen Arzt zurate und lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Produkts. Diese Informationen sind für medizinisches Fachpersonal bestimmt.

©Copyright 2020 3M. Alle Rechte vorbehalten. 3M und die anderen gezeigten Marken sind Marken und / oder eingetragene Marken. Nicht autorisierte Verwendung verboten. PRA-PM-AT-00124 (04/20)

