

# KCI-Produkt Überprüfung und Reinigung/Desinfektion

Rev F Überprüfung und Reinigung/Desinfektion von KCI-Produkten Bestell-Nr. 48604-DE (ECO-013896)

1 UNTERNEHMENSEIGENE & VERTRAULICHE INFORMATIONEN VON KCI (nur für den internen Gebrauch)  
Die Verwendung oder Veröffentlichung außerhalb der KCI-Unternehmen ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist verboten.

KCI PROPRIETARY & CONFIDENTIAL INFORMATION (For Internal Use Only)  
Use or disclosure outside the KCI companies without express written authorization is not permitted.



# Wichtige Informationen

In dieser Präsentation wird die Überprüfung, Reinigung und Desinfektion von KCI® Produkten behandelt.


KCI® Produkte (ACTIV.A.C.™ Therapiesystem (Standard & RTM), V.A.C.RX4™ Therapiesystem, V.A.C.ULTA™ Therapiesystem (Akutpflege & Heimpflege; Standard & 4 Therapiesystem), INFOV.A.C.™ Therapiesystem, V.A.C. FREEDOM™ Therapiesystem, V.A.C. SIMPLICITY™ Therapiesystem, CELLUTOME™ Epidermis-Entnahmesystem und ABTHERA™ Unterdruckwundtherapie-System) sich in technischer Hinsicht voneinander unterscheiden, ist dieser Prozess für alle Produkte gleichermaßen durchzuführen. Gegebenenfalls sind zusätzlich Leitlinien auf den entsprechenden produktspezifischen Seiten zu konsultieren.

**Therapiesysteme und physische Komponenten, die direkt ab Werk oder von einem Reparaturzentrum aus versandt werden, gelten als frei von Mängeln. Bei diesen Systemen und Komponenten genügt es, eine Checkliste für die Qualitätskontrolle auszufüllen, damit sie einsatzbereit sind.**

# Vorsichtsmaßnahmen

- **Teams, die Arbeiten an Einheiten vornehmen, die außerhalb von Bereichen liegen, in denen standardmäßige Überprüfungen, Reinigungen und Desinfektionen durchgeführt werden, sollten stets in Alarmbereitschaft sein und Vorsichtsmaßnahmen treffen.**
  - Dies gilt insbesondere für:
    - Akkugehäuse/-fächer
    - Halterungsarme
    - UDI-Klappen
    - Instillationsrollenabdeckungen
- **Dabei sollte:**
  - Das Teil im betreffenden Unrein-/Arbeitsbereich deinstalliert/ausgebaut werden.
  - Die erforderliche Überprüfung, Reinigung und Desinfektion durchgeführt werden.
  - Die Installation bzw. Montage im betreffenden QK-Bereich vorgenommen werden.
- **Für den Fall, dass während der Überprüfung, Reinigung und Desinfektion Schäden bemerkt werden:**
  - Entsprechende Überprüfung, Reinigung und Desinfektion abschließen.
  - Alle Schäden dokumentieren.
    - Gegebenenfalls Reparaturhinweise in das System eingeben; dabei Informationen zu allen fehlerhaften Schritten angeben. **(Diese Anmerkungen können dem technischen Service bei der Reparatur helfen.)**
  - Einheit zur Reparatur einsenden.

# Tasten und Anzeige

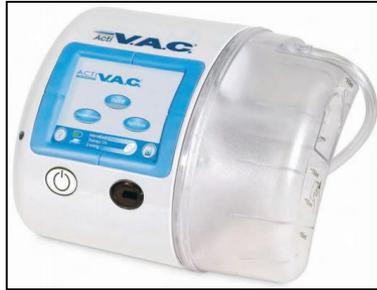

**Hinweis: Die Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Es kann sein, dass Etiketten nicht mehr aktuell sind. Für Informationen zu den Etiketten siehe entsprechende Arbeitsanweisungen.**

# Erforderliche Ausrüstung

## ➤ Dokumentationen:

- [WI-19-30](#) (Richtlinien zur Handhygiene)
- [WI-19-31](#) (Standardvorsichtsmaßnahmen und PSA)
- [WI-19-33](#) (Reinigungs-/Desinfektionsmittel)


## ➤ Materialien:

- Zugelassene Reinigungs-/Desinfektionsmittel
  - Herstellerhinweise bezüglich der Anwendung sowie der empfohlenen Kontakt-/Trockenzeit beachten.
- Gummibänder

# Prozess

- **Einheit aus der Verpackung entnehmen und alle zum KCI®-Produkt gehörigen Einwegteile entsorgen.**
  - Zurückgegebene Teile nach Materialien mit patientenspezifischen Informationen durchsuchen und diese gemäß KCI-Richtlinien entsorgen.
  - Sollte in einer von KCI zugelassenen Informationstasche Material enthalten sein, für Überprüfungs-, Reinigungs- und Desinfektionskriterien [WI-19-170](#) konsultieren.
  - Vor der Rückgabe an den Kunden mögliche Stofftragetaschen entsorgen.
- **Überprüfen, ob die Einheit außen beschädigt ist.**
  - Sicherstellen, dass es keine sichtbaren Schäden (einschließlich Absplitterungen, Sprünge, Risse, Furchen, Verfärbungen, lockere Teile, fehlende Schrauben usw.) gibt, und zwar an:
    - Oberseite/Unterseite/Seiten (einschließlich Vertiefungen)
    - Griffen/Gehäusen/Behältern
    - Displays/Schnittstellenplatten/Tasten
    - Anschlüssen/USB-Isolatoren/Filtereingängen

Beim Prüfen auf Schäden für Reparaturrichtlinien VA-QA-70 konsultieren.

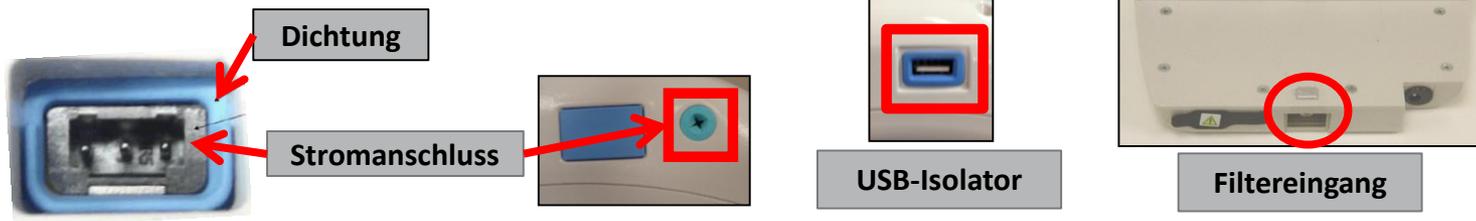

# Prozess (Forts.)


- **Die Akku-Informationen ([413885](#)) und die PM-Informationen (wenn entsprechend Gerät anwendbar). Vor dem Beginn eines QK-Verfahrens sicherstellen, dass die Angaben der Akku-Informationen oder der PM-Etikettierung auf dem Gerät mit den Informationen innerhalb des Geräts übereinstimmen.**
  - Sollten die Akkus abgelaufen sein, diese durch das Service-Zentrum austauschen lassen oder Einheit gegebenenfalls zur Reparatur einsenden.

## Prozedur:


- Etikett mit den Akku-Informationen (Battery History) entfernen.
- Akkufachabdeckung abnehmen.
- Alle Akkus, die vom Service-Zentrum ausgetauscht werden können, so weit aus der Einheit entnehmen, dass die Anschlüsse zugänglich sind.
- Die Akkus trennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.
  - Das Einlegen neuer Akkus ist im QK-Verfahren beschrieben. Akkus können vor dem Beginn des QK-Verfahrens eingelegt und/oder geladen werden.

# Prozess (Forts.)

- **Alle entfernbaren Teile entfernen (bei Bedarf eine Pinzette verwenden).**
  - Alle Oberflächendichtungen, Dichtscheiben und Gummiringe überprüfen, reinigen und desinfizieren.
    - Sollten diese beschädigt sein, entsorgen.
    - Diese Komponenten sind wiederverwendbar und werden bei der QK wieder eingebaut.

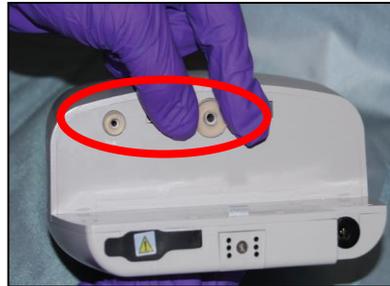

- Alle Abluftfilter entsorgen.
  - Neue Komponenten werden bei der QK eingebaut.

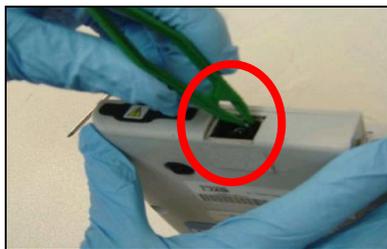

# Prozess (Forts.)

## ➤ Einheit reinigen und desinfizieren.

- Vor der Reinigung und Desinfektion Einheit abwischen, um grobe Verschmutzungen zu entfernen.
  - Seiten der Einheit abwischen.
  - Vorder- und Rückseite der Einheit abwischen.
  - Ober- und Unterseite der Einheit abwischen.
  - Alle drahtlosen Einrichtungen/Zubehörteile abwischen.
- Dichtung um das Display vorsichtig reinigen und desinfizieren.
  - Displays und Tastaturen vorsichtig abwischen, damit keine Flüssigkeit in das Display oder den Bereich um die Tastatur gelangen kann (bei Einheiten mit Displays und/oder Tastaturen).
  - Neigen Sie die Einheit so, dass die Flüssigkeit nicht auf den Displaybereich tropfen oder laufen kann (bei Einheiten mit Displays).
- Kanten von allen drahtlosen Einrichtungen/Zubehörteilen vorsichtig reinigen und desinfizieren.
- Mit einem Watteträger ggf. schwer erreichbare Oberflächen reinigen (Vertiefungen an der Seite, Unterseiten von Befestigungsvorrichtungen oder Gummifüße, Öffnungen von Stromanschlüssen, Schraubenköpfe usw.).
- Einheit in den zum Reinigen und Trocknen vorgesehenen QK-Bereich bringen und trocknen lassen.
  - Wenn die Einheit getrocknet ist, diese auf chemische Rückstände auf dem Display überprüfen.
  - Rückstände auf dem Display können mit einem nicht scheuernden Tuch entfernt werden.
- Bevor die Einheit in den QK-Bereich gebracht wird, erneut auf restliche Verschmutzungen, haftende Rückstände und auf allgemeine Sauberkeit überprüfen.

# Prozess (Forts.)

## ➤ **Netzkabel, Netzteil, Zubehörteile und Transportkoffer (insofern benutzt) überprüfen und reinigen und desinfizieren.**

- **Netzkabel und Stecker auf Beschädigungen kontrollieren.**


**Stecker, Kabel und Buchsen von abnehmbaren Kabeln auf Schäden überprüfen und gegebenenfalls gegen ein von KCI zugelassenes Ersatzkabel austauschen.**



**Geeignete Netzstecker – 230 V  
(Nur international)  
Kein Erdungsstift**




**Geeignete Netzstecker – 115 V**

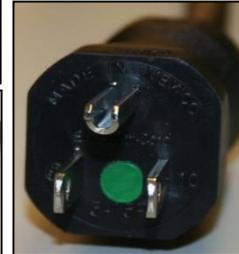

**Zulässige Netzteilstecker**



**Nicht geeignete Netzstecker (ersetzen)  
Runder/massiver Erdungsstift oder  
Beschädigung**

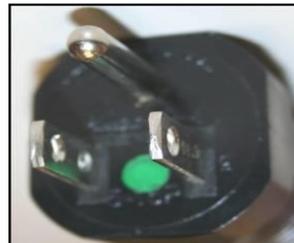


**Nicht geeignete  
Netzkabel (ersetzen)**




# Prozess (Forts.)

- **Netzkabel, Netzteil, Zubehörteile und Transportkoffer (insofern benutzt) überprüfen und reinigen und desinfizieren. (Forts.)**
  - Beim Abwischen von Netzteil und Netzkabel letzteres locker zusammenwickeln und mit einem Gummiband oder, sofern verwendet, einem Kabelbinder sichern.
    - An jedem Ende ausreichend Kabelreserve lassen, damit die Einheit (wenn nötig) vor und während der QK an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.
    - Beschädigte Netzteile gemäß den folgenden Richtlinien für die USA zurückschicken oder entsorgen (außerhalb der USA den lokalen Richtlinien des Unternehmens folgen):
      - [WI-VC-187](#) (ACTIV.A.C.™ & V.A.C. SIMPLICITY™)
      - [WI-VC-268](#) (V.A.C. FREEDOM™)
      - [Technical Bulletin 48638](#) (V.A.C. ULTA™)

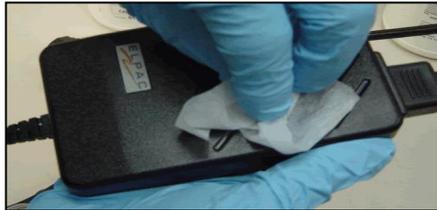

# Prozess (Forts.)

- **Netzkabel, Netzteil, Zubehörteile und Transportkoffer (insofern benutzt) überprüfen und reinigen und desinfizieren. (Forts.)**
  - Sicherstellen, dass Zubehörteile und Transportkoffer NICHT beschädigt sind. Bei Bedarf austauschen.
  - Außenbereich und Innenraum der Transporttasche mit einem zugelassenen Reinigungs-/Desinfektionsmittel reinigen und desinfizieren.
  - An der Luft trocknen lassen.

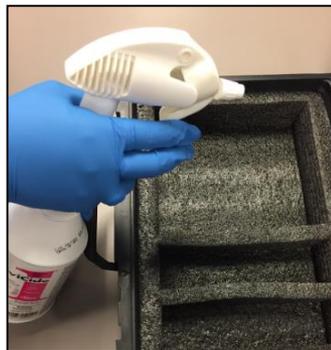



# Prozess (Forts.)

- **Für zusätzliche Hinweise zu einem Produkt produktspezifische Seiten konsultieren.**
  - [ABTHERA™ Unterdruckwundtherapie-System](#)
  - [ACTIV.A.C.™ & V.A.C. SIMPLICITY™ Therapiesysteme \(Standard & RTM\)](#)
  - [CELLUTOME™ Epidermis-Entnahmesystem](#)
  - [INFOV.A.C.™ Therapiesystem](#)
  - V.A.C. FREEDOM™ Therapiesystem (Keine weiteren Leitlinien. Weiter zur [Freigabe.](#))
  - [V.A.C.RX4™ Therapiesystem](#)
  - [V.A.C.ULTA™ Therapiesystem \(Akutpflege & Heimpflege\) \(Standard & 4 Therapie\)](#)

- **Beim Abwischen der Front der Therapieeinheit vorsichtig sein.**
- **Sicherstellen, dass der Halterungsarm fest sitzt, ordnungsgemäß funktioniert und:**
  - beim Aus- oder Einfahren nicht hängt oder klemmt.
  - keinerlei Beschädigungen oder Defekte aufweist.



- **Transportkoffer (sofern verwendet)**

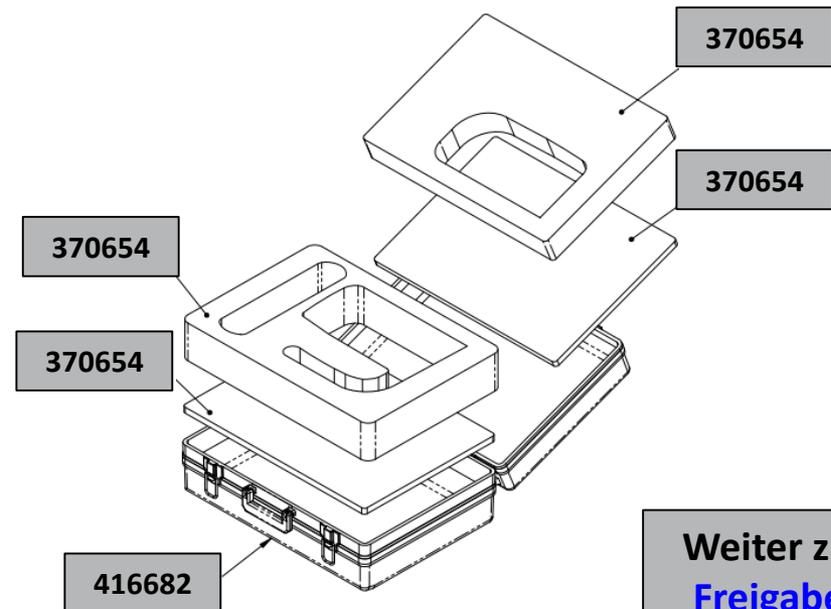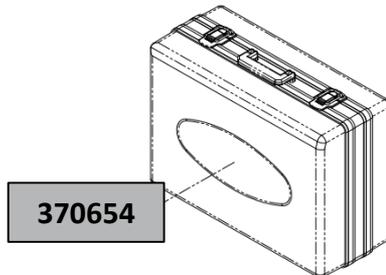

**Weiter zur  
[Freigabe.](#)**

# ACTIV.A.C.™ & V.A.C. SIMPLICITY™ (Standard & RTM)



- Die Netzkabelhaltebänder sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Nach Rückgabe entsorgen.



Weiter zur  
[Freigabe.](#)

# CELLUTOME™



## ➤ Schlauchverbindungen und Verschlüsse überprüfen auf:

- Schäden
- Schnitte
- Deformationen
- Risse

# CELLUTOME™ (Forts.)

## ➤ Saug- und Schlauchkopf überprüfen.

Verschlüsse fehlen nicht bzw. sind nicht beschädigt.



Schlauch sitzt fest und ist nicht beschädigt.

Die vier Schrauben befinden sich an der richtigen Stelle.





Glas ist weder gebrochen noch gesprungen.

## ➤ Sollten bei der Überprüfung, Reinigung und Desinfektion sichtbare Schäden am Saugknopf festgestellt werden, Baugruppe austauschen.


# CELLUTOME™ (Forts.)

- **Die inneren Kunststoffächer untersuchen.**
  - Falls beschädigt, die Kunststoffächer im QK-Bereich ersetzen.
  - Klebepunkte wie unten beschrieben anbringen.
    - Sicherstellen, dass sich die Punkte an der richtigen Stelle befinden.
    - Eine Seite der Kunststoffolie vom Klebstoffpunkt abziehen und diese an den dargestellten Stellen anbringen.
    - Die andere Seite der Kunststoffolie abziehen und das untere Fach in die Unterseite der Tragetasche und das obere Fach in das mittlere Fach drücken.

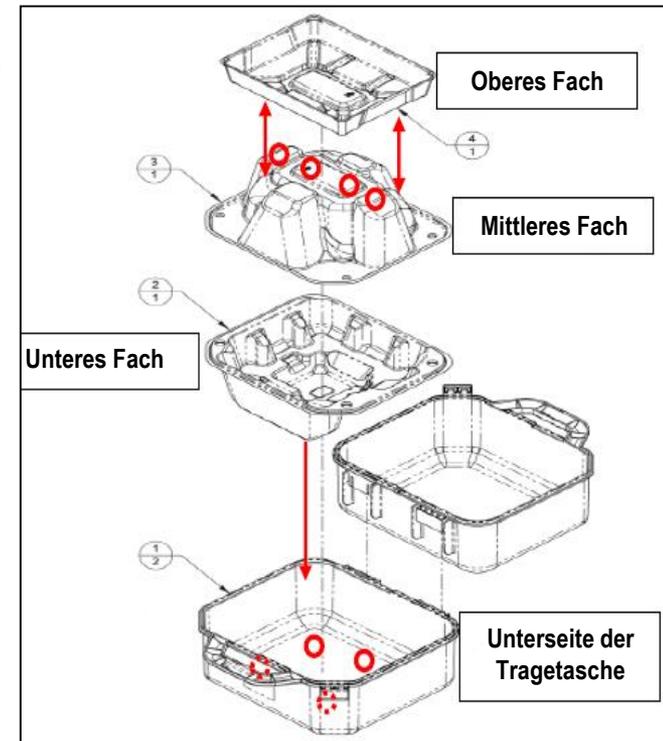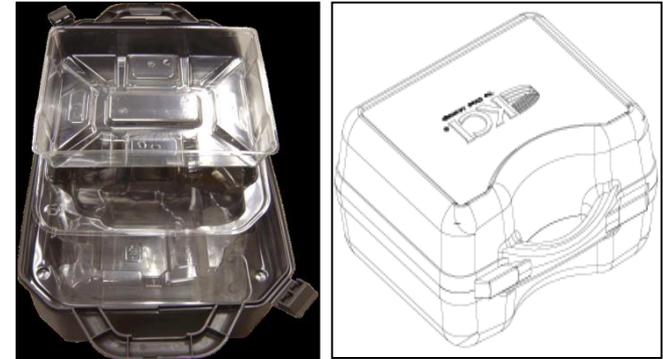

# CELLUTOME™ (Forts.)

TEILE-NUMMER	BESCHREIBUNG
415308	TRAGETASCHE FÜR CELLUTOME
350234	TRAGETASCHE FÜR ULTA EMEA
415302	UNTERES FACH FÜR CELLULOTOME
415303	OBERES FACH FÜR CELLULOTOME
415301	FACH FÜR ANWEISUNGEN FÜR CELLULOTOME (MATERIALFACH)
414763	ETIKETT FÜR CELLUTOME-LOGO (KLEIN)
414593	ETIKETT FÜR CELLUTOME-TRAGETASCHE (GROSS)
44000548	KLEBEPUNKT, GROSS, DURCHSICHTIG

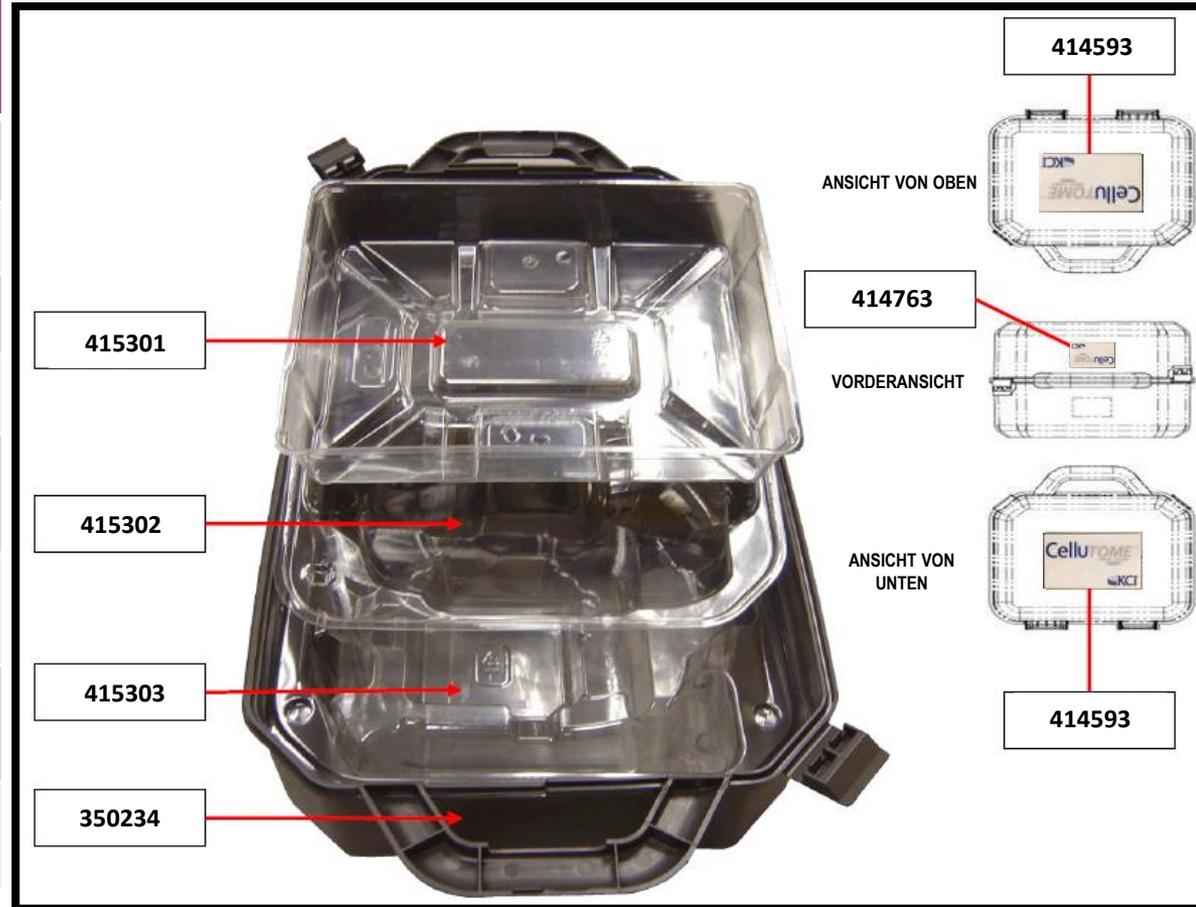

Weiter zur  
[Freigabe.](#)

Rev F Überprüfung und Reinigung/Desinfektion von KCI-Produkten Bestell-Nr. 48604-DE (ECO-013896)

19 UNTERNEHMENSEIGENE & VERTRAULICHE INFORMATIONEN VON KCI (nur für den internen Gebrauch)  
Die Verwendung oder Veröffentlichung außerhalb der KCI-Unternehmen ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist verboten.

KCI PROPRIETARY & CONFIDENTIAL INFORMATION (For Internal Use Only)  
Use or disclosure outside the KCI companies without express written authorization is not permitted.




# INFOV.A.C.™




- **Eingabestift (Bestell-Nr. M3268567) und UDI-Klappe (Benutzerdatenschnittstelle) (Bestell-Nr. M3268563) überprüfen, reinigen und desinfizieren.**
  - Sollten diese beschädigt sein, entsorgen.
- **Ein-/Ausschalt- sowie Kanistertaste kontrollieren, reinigen und desinfizieren.**
  - Falls diese beschädigt oder unleserlich sind, Einheit zur Reparatur einsenden.

# INFOV.A.C.™ (Forts.)


- **Sicherstellen, dass der Halterungsarm, der Gummiblock und der V-förmige Gummi fest sitzen, ordnungsgemäß funktionieren und nicht beschädigt sind.**

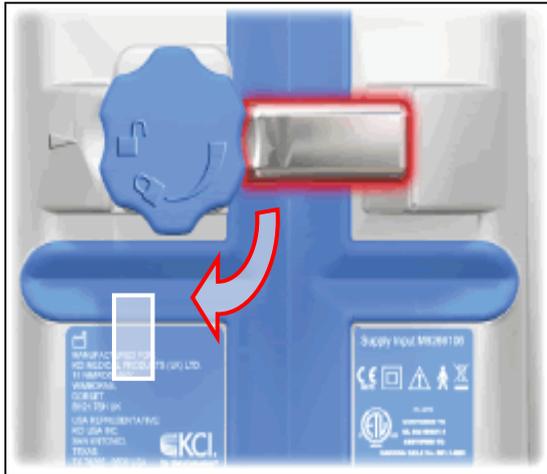

**Der Halterungsarm aus Metall kann sich wie oben dargestellt nur vor und zurück in einem 90°-Winkel bewegen. Hinweis: Der Halterungsarm kann nur schwingen, wenn er richtig eingesteckt ist.**

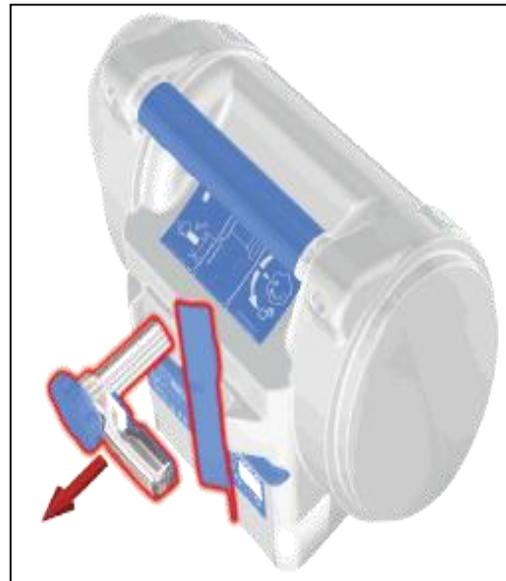



**Der Halterungsarm ist federbelastet. Sicherstellen, dass der Federmechanismus ordnungsgemäß funktioniert.**

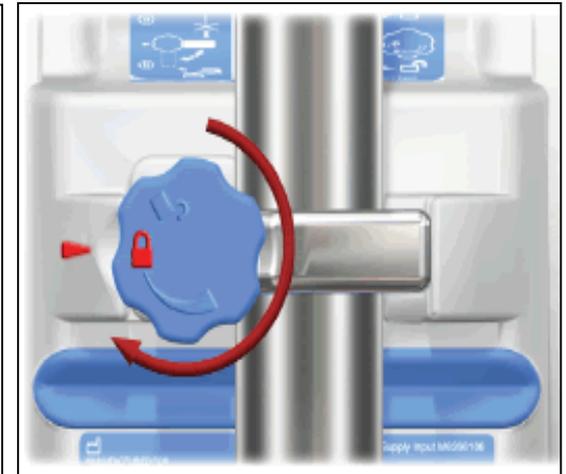

**Drehknopf in den Halterungsarm eindrehen und einrasten.**

# INFOV.A.C.™ (Forts.)

- **Sicherstellen, dass der Halterungsarm, der Gummiblock und die V-förmigen Gummiführungen festsitzen, ordnungsgemäß funktionieren und nicht beschädigt sind. (Forts.)**
  - Sollte der Gummiblock repariert oder ausgetauscht werden müssen, zur nächsten Folie gehen.
  - Wenn die V-förmigen Gummiführungen am Akkugehäuse locker oder verfärbt sind oder fehlen, Akkugehäuse ersetzen (Bestell-Nr. M3268561).

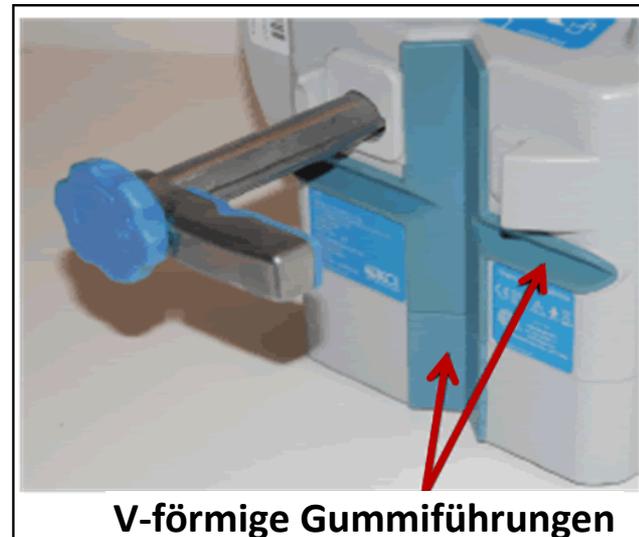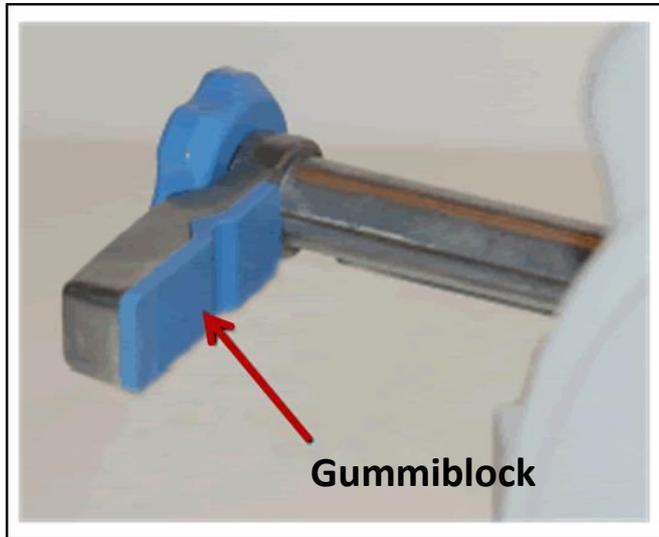

## ➤ Ersetzen des Gummiblocks:

An dieser Stelle soll eine empfohlene Methode zur Reparatur oder zum Austausch des Gummiblocks am Halterungsarm beschrieben werden.

Diese Maßnahme IST NICHT Teil der normalen Servicemaßnahmen. Sie wird jedoch hier mit aufgeführt, um eventuelle Reparaturen am Gummiblock zu erleichtern.


Erforderliche Teile und Verbrauchsmaterialien:

- Loctite® 411™ Cyanoacrylat-Klebstoff
- Isopropylalkohol
- Reinigungstuch
- Entsprechend großes Werkzeug zum Entfernen alter Klebstoffrückstände (ein standardmäßiger Schlitzschraubenzieher)
- Schutzhandschuhe
- Gummiblock (Bestell-Nr. M3240627), falls erforderlich

# INFOV.A.C.™ (Forts.)

## ➤ Ersetzen des Gummiblocks: (Forts.)


- Mit einem geeigneten Werkzeug sämtliche Heißkleberrückstände im Inneren des Metallgusshakens für den Halterungsarm entfernen.
- Das Innere des Metallgusshakens mit Isopropylalkohol reinigen.
- An der Luft trocknen lassen.
- Einige Tropfen Loctite® 411™ auf beide Innenseiten des Metallgusshakens für den Halterungsarm auftragen.

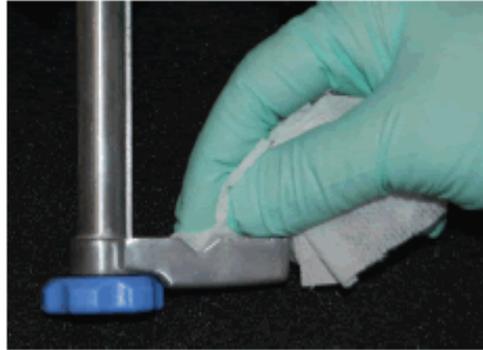

# INFOV.A.C.™ (Forts.)


## ➤ Ersetzen des Gummiblocks: (Forts.)

- Den Gummiblock in die Hakenmulde einsetzen. Sicherstellen, dass der Klebstoff in der Mulde verbleibt.
- Den Gummiblock in die richtige Position drücken.
- Sofort überschüssigen Klebstoff von Block, Halterungsarm oder Metallgusshaken entfernen.
- Herstellerhinweise bezüglich der Anwendung beachten und Klebstoff vor Einsatz komplett erhärten lassen.

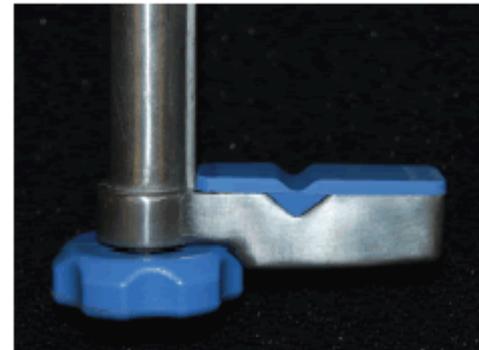

Weiter zur  
[Freigabe.](#)


# V.A.C.RX4™

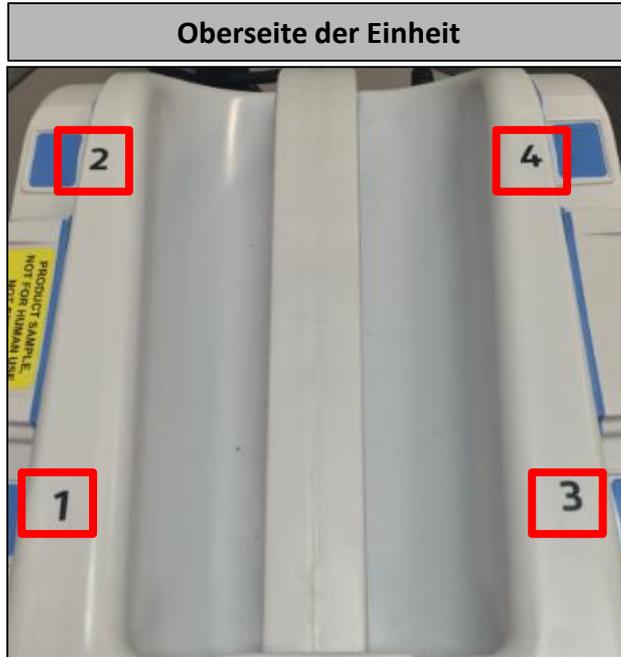

➤ **Prüfen und sicherstellen, dass die Kanalnummern lesbar sind.**

Weiter zur  
[Freigabe.](#)

# V.A.C.ULTA™ (Akutpflege & Heimpflege) (Standard & 4 Therapie)

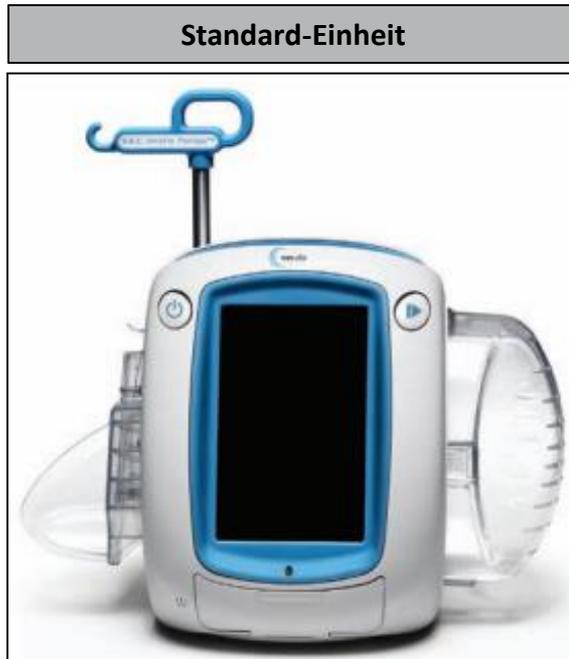

Wenn ein Drahtlos-Zubehörteil installiert ist, öffnet sich diese Tür nicht.


➤ **Eingabestift (Bestell-Nr. M3268567) und UDI-Klappe (Benutzerdatenschnittstelle) (Bestell-Nr. 350079) überprüfen, reinigen und desinfizieren. (Nicht bei Einheiten mit drahtlosen Zubehörteilen vorhanden.)**

- Austauschen, falls beschädigt.
- Falls Magnete fehlen, die Einheit zur Reparatur einsenden.
- Falls Stifte fehlen, die UDI-Klappe austauschen.




# V.A.C.ULTA™ (Akutpflege & Heimpflege) (Standard & 4 Therapie) (Forts.)

- **Instillationsrollenabdeckung (Bestell-Nr. 350039) auf Schäden überprüfen.**
  - Sollte diese beschädigt sein, entsorgen.
    - Die sechs unten angegebenen Schrauben entfernen.
    - Rollenabdeckung austauschen.

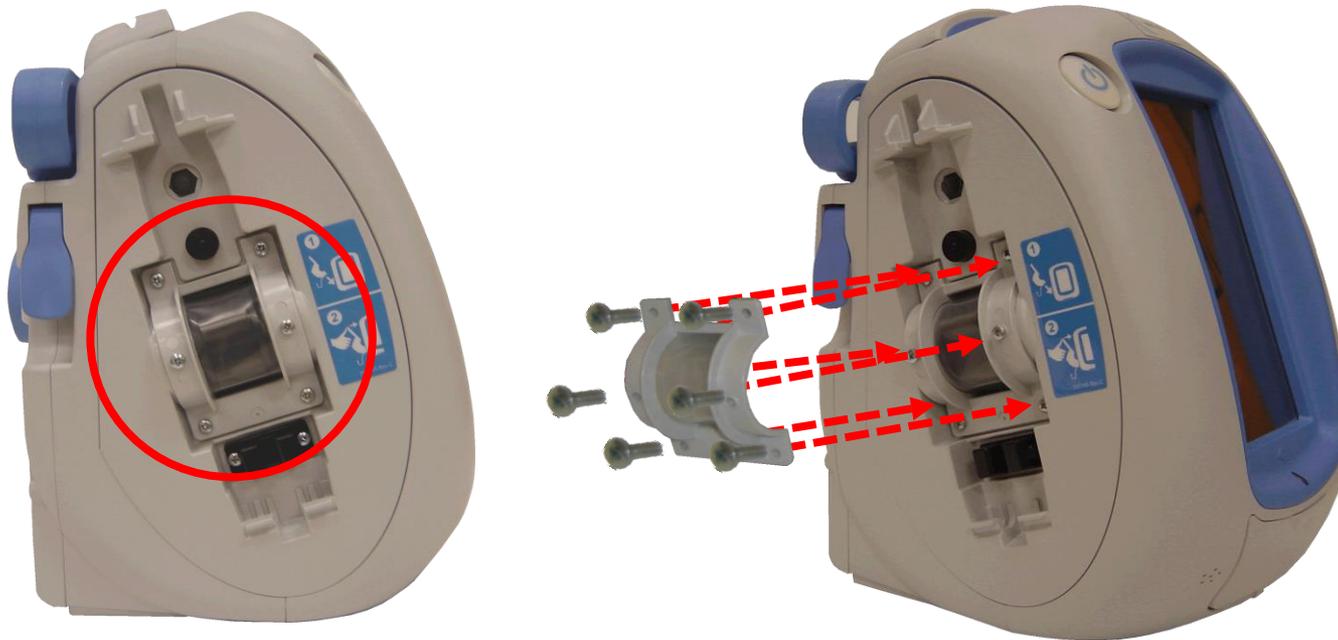

# V.A.C.ULTA™ (Akutpflege & Heimpflege) (Standard & 4 Therapie) (Forts.)

- Sicherstellen, dass die schwarze Kronenmutter auf dem Stromkabel fest sitzt. Hinweis: Mit der Zeit kann sich die schwarze Kronenmutter lösen, sodass das Netzkabel in die Einheit fallen kann. Wenn die schwarze Kronenmutter locker sitzt oder ausgetauscht werden muss, kann sie repariert werden, jedoch **NUR WENN** sowohl die silberfarbene Überwurfmutter als auch das graue Anschlussgewinde vorhanden sind, fest sitzen und unbeschädigt sind.

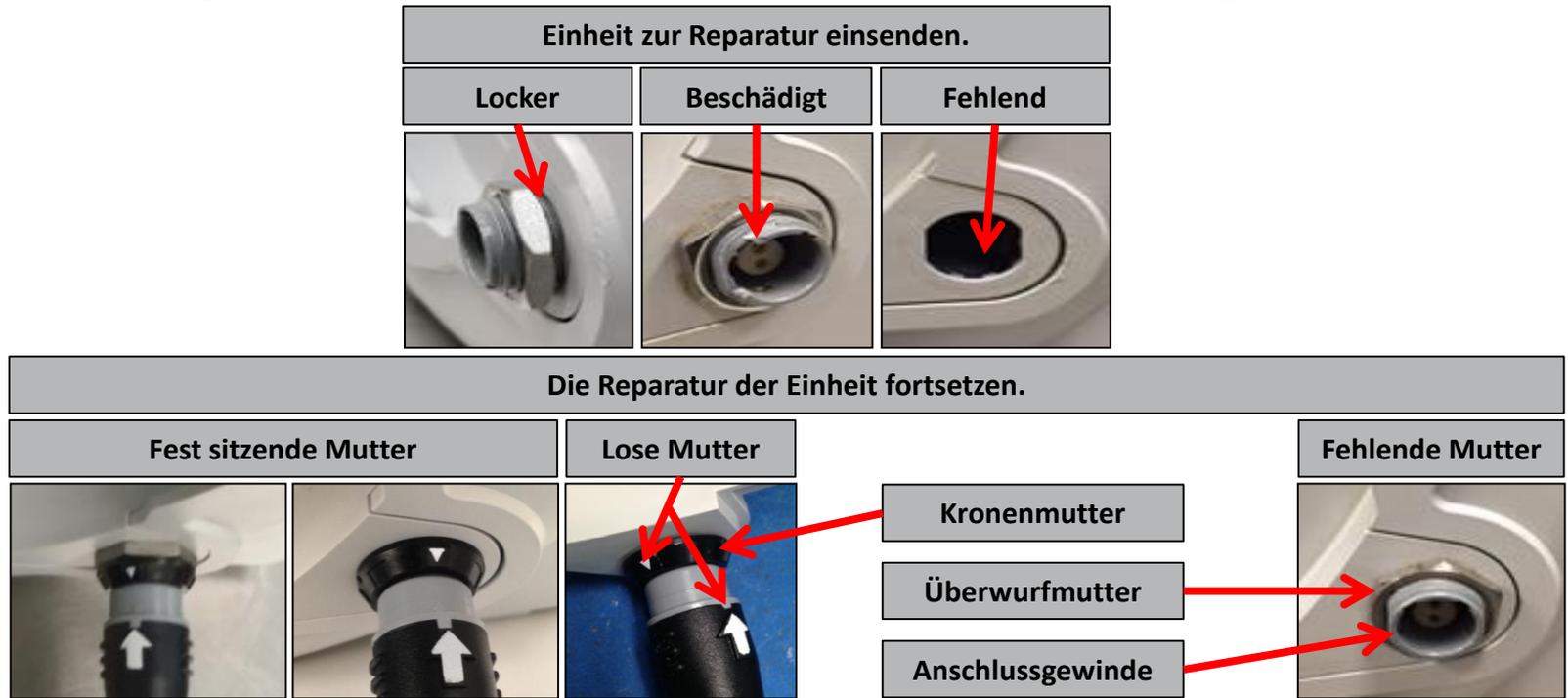

# V.A.C.ULTA™ (Akutpflege & Heimpflege) (Standard & 4 Therapie) (Forts.)

- **Sicherstellen, dass die schwarze Kronenmutter auf dem Stromkabel fest sitzt. (Forts.)**

Erforderliche Teile und Verbrauchsmaterialien:

- Schraubendreher für Kronenmutter (Bestell-Nr. 44001669)
- Castellated Nut (PN 44001660)




Reparatur oder Austausch einer schwarzen Kronenmutter:

- Sicherstellen, dass sich das weiße Dreieck oben in der Mitte befindet.
- Für den Austausch eine Kronenmutter auf den Anschlusskörper schrauben.
- Einen Schraubendreher für Kronenmuttern verwenden, um die Mutter im Gegenuhrzeigersinn zu drehen.
- Festdrehen, bis sich das weiße Dreieck wieder oben in der Mitte befindet.



# V.A.C.ULTA™ (Akutpflege & Heimpflege) (Standard & 4 Therapie) (Forts.)

- **Sicherstellen, dass der Halterungsarm, der Gummiblock und die V-förmigen Gummiführungen festsitzen, ordnungsgemäß funktionieren und nicht beschädigt sind.**
  - Ist der Halterungsarm (Bestell-Nr. 350274) beschädigt, austauschen. Mögliche beschädigte Halterungsarme an das entsprechende Reparaturzentrum zurücksenden.

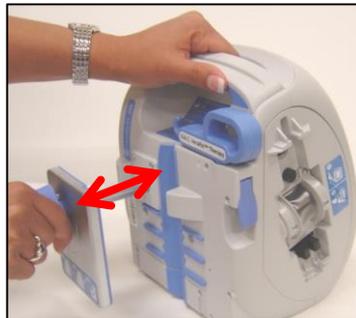

**Der Halterungsarm ist federbelastet. Sicherstellen, dass der Federmechanismus ordnungsgemäß funktioniert. Zum Feststellen des Halterungsarms muss dieser auseinandergezogen werden.**



**Schraube  
Bestell-Nr. 400372**

**Knopf im Uhrzeigersinn drehen, um den Halterungsarm zu fixieren.**




**Etikett  
Bestell-Nr. 350166**

**Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Halterungsarm zu entriegeln.**

# V.A.C.ULTA™ (Akutpflege & Heimpflege) (Standard & 4 Therapie) (Forts.)

- **Sicherstellen, dass der Halterungsarm, der Gummiblock und die V-förmigen Gummiführungen festsitzen, ordnungsgemäß funktionieren und nicht beschädigt sind. (Forts.)**
  - Wenn die obere V-förmige Gummiführung an der Einheit locker oder verfärbt ist oder fehlt, Einheit zur Reparatur einsenden.
  - Wenn die untere V-förmige Gummiführung am Akkugehäuse locker oder verfärbt ist oder fehlt, Akkugehäuse ersetzen (Bestell-Nr. 350232).

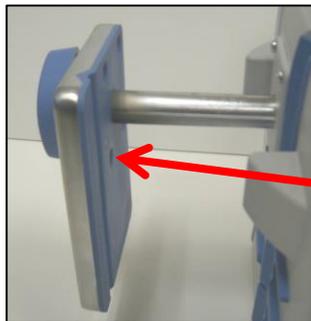

Gummi  
block



Obere  
V-förmige Gummiführung

Untere  
V-förmige Gummiführung



- Zum Vergrößern/Verkleinern des IV-Ständer-Halterungsarms an beiden Seiten feststellen.
  - Reparieren, falls beschädigt.
    - Die vier Schrauben lösen.
    - Teile austauschen, falls erforderlich. Für die entsprechenden Bestellnummern zur nächsten Folie gehen.



Zum Entriegeln  
nach oben  
drücken.  
Zum Arretieren  
nach unten  
drücken.



# V.A.C.ULTA™ (Akutpflege & Heimpflege) (Standard & 4 Therapie) (Forts.)

Teilenummer	Beschreibung
350226	IV-Halterungsarm Schweißteil
350167	Logo-Etikett für V.A.C. Ultra™-Halterungsarm
350036	Gehäuse, IV-Halterungsarm
350258	Arretierhebel
350271	Sperrklinke, IV-Ständer Halterung
350227	IV-Ständer Halterung
4000372	Schraube zur Befestigung des Arms am Ständer
4000443	Vier Gehäuseschrauben

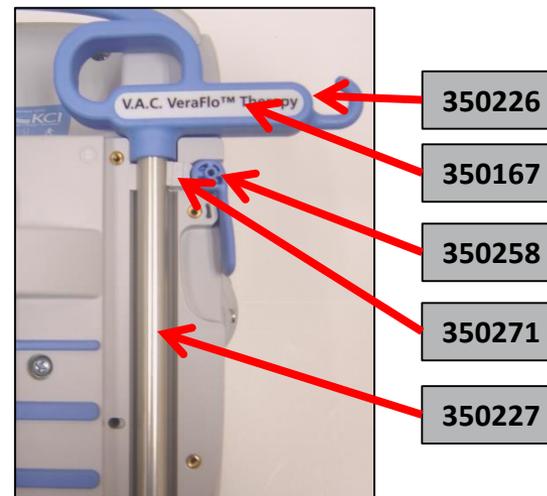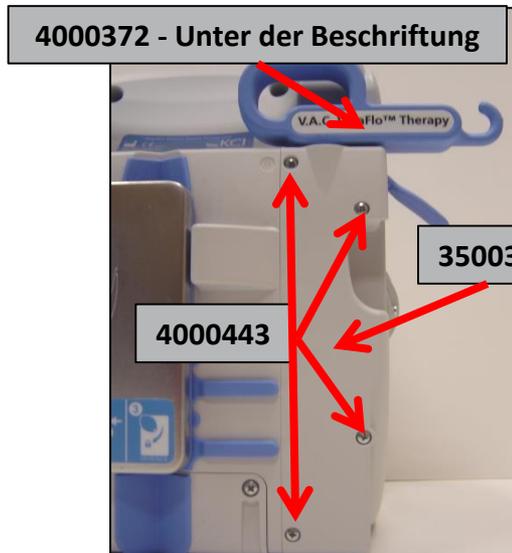


# V.A.C.ULTA™ (Akutpflege & Heimpflege) (Standard & 4 Therapie) (Forts.)

- **Die inneren Kunststoffächer untersuchen.**
  - Falls beschädigt, die Kunststoffächer im QK-Bereich ersetzen.
  - Klebpunkte wie unten beschrieben anbringen.
    - Sicherstellen, dass sich die Punkte an der richtigen Stelle befinden.
    - Eine Seite der Kunststoffolie vom Klebstoffpunkt abziehen und diese an den dargestellten Stellen anbringen.
    - Die andere Seite der Kunststoffolie abziehen und das untere Fach in die Unterseite der Tragetasche und das obere Fach in das mittlere Fach drücken.

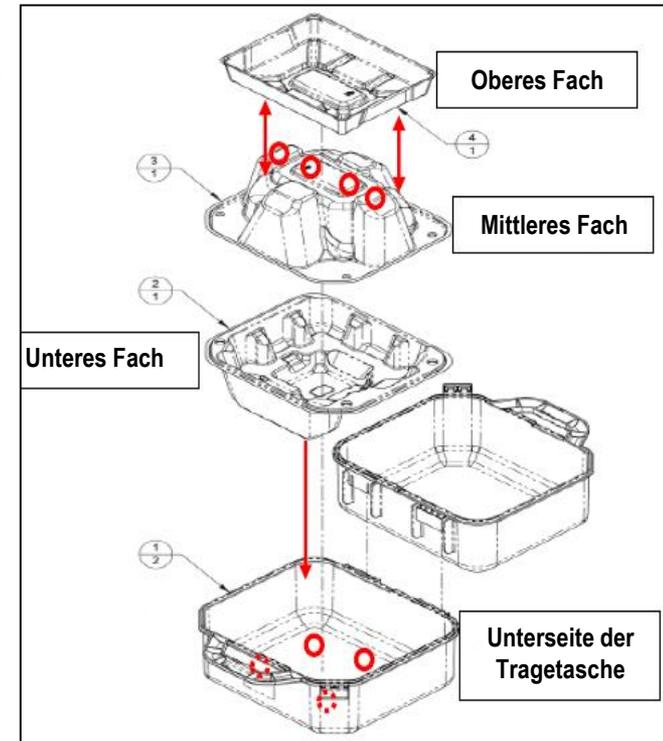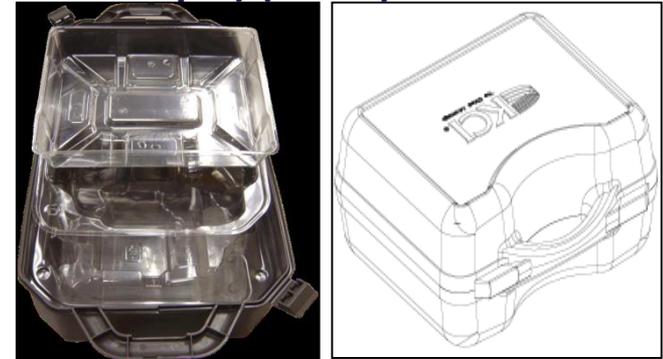

# V.A.C.ULTA™ (Akutpflege & Heimpflege) (Standard & 4 Therapie) (Forts.)

Teile- nummer	Beschreibung
350235	TRAGETASCHE KOMPLETT
350234	TRAGETASCHE, HÄLFTE (NUR KUNSTSTOFFTASCHEN)
350191	UNTERES FACH
350192	MITTLERES FACH
350299	OBERES FACH (MATERIALFACH)
350290	LOGO-ETIKETT, KLEIN
350321	LOGO-ETIKETT, GROSS
44000548	KLEBSTOFFPUNKTE FÜR FÄCHER

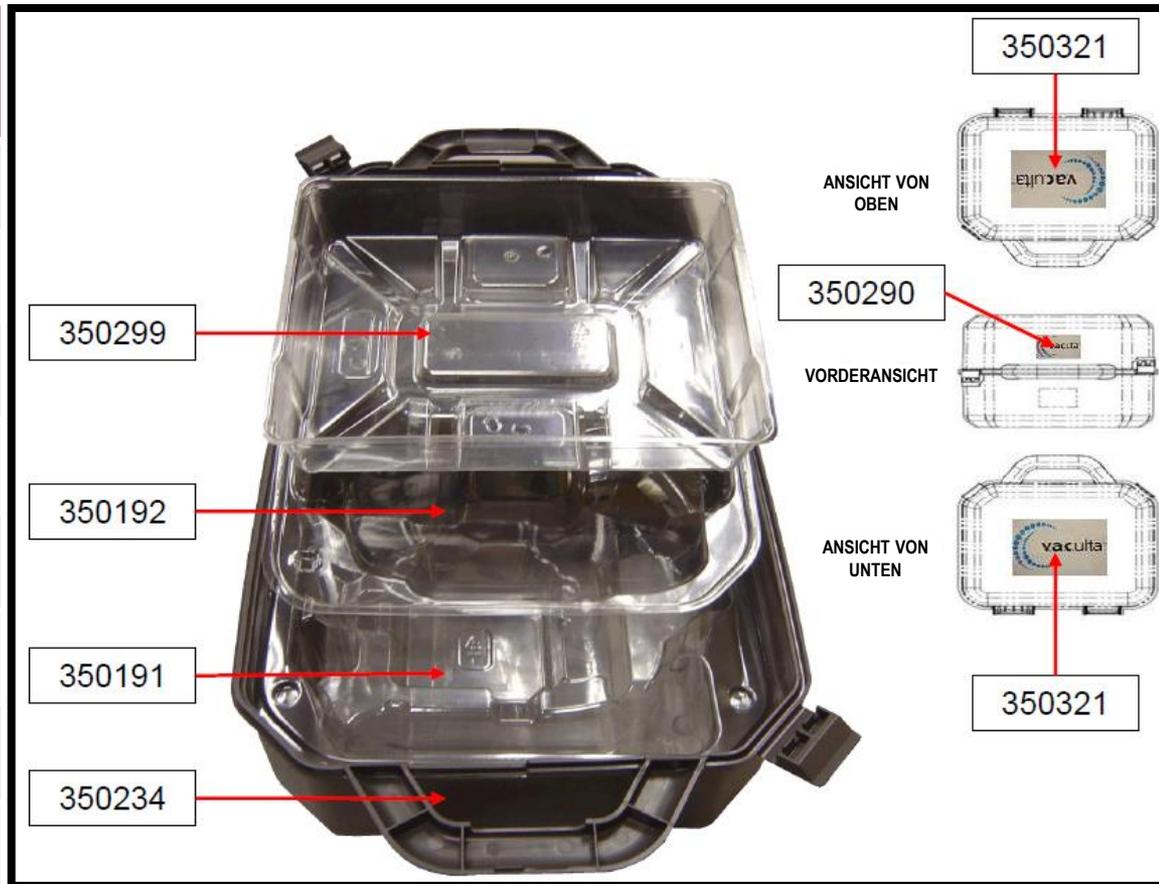

Weiter zur  
[Freigabe.](#)

# Freigabe

- **Persönliche Schutzausrüstung ablegen (entsprechend entsorgen) und Handhygiene durchführen.**
  - Dabei stets Richtlinien bezüglich der Prävention und der Kontrolle von Infektionen beachten.
- **Jede Produkt-/Seriennummer muss über einen Bericht verfügen, aus dem hervorgeht, dass das Produkt mit den Kriterien zur Inspektion, Reinigung und Desinfizierung, wie sie in diesem Verfahren festgelegt sind, übereinstimmt und wann dies festgestellt wurde. Für den nächsten Schritt der QK müssen diese Informationen verfügbar bzw. der Einheit beigelegt sein.**

[Erneut von vorne  
beginnen.](#)

