



# FUTURO™ MIĘKKKI KOŁNIERZ SZYJNY

09027

 ŚREDNI POZIOM  
STABILIZACJI



MATERIAŁ PRZEPUSZCZAJĄCY  
POWIETRZE

Zapewnia komfort i stabilizację przy zesztywnieniu i urazach szyi.

## ZASTOSOWANIE:

Korzystać zgodnie z zaleceniami lekarza: przy naciągniętych nerwach, odczuwaniu sztywności oraz po urazach kręgosłupa szyjnego.

## CECHY SZCZEGÓLNE:


- 1 Regulacja obwodu i wysokości kołnierza pozwala na indywidualne dopasowanie.
- Kołnierz można swobodnie nosić w dzień lub w nocy.

## ROZMIAR:

Numer katalogowy	CM
09027	Obwód szyi: 27.9-50.8 Wysokość: 6.35-12.7



## JAK ZAKŁADAĆ:

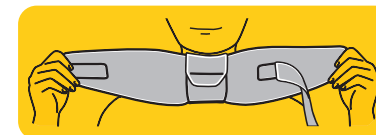

W celu założenia, rozciągnij kołnierz w obu dłoniach, tak żeby końcówka paska pod brodą skierowana była na zewnątrz, a zapięcie kołnierza znajdowało się w prawej dłoni, po zewnętrznej stronie kołnierza. Umieść kołnierz z przodu szyi, tak żeby pasek znalazł się centralnie pod brodą.



Owiń lewy koniec kołnierza wokół karku i zapnij po przeciwnej stronie.



Następnie pociągnij pasek na karku od lewej strony, tak żeby nachodził na pasek przy zapięciu. Dostosuj napięcie pasków, tak żeby kołnierz trzymał się mocno, ale nie powodował dyskomfortu.



Mocno trzymając kołnierz w miejscu, odepnij pasek pod brodą. Zwiększaj lub zmniejszaj jego napięcie, tak żeby kołnierz leżał wygodnie, ale zapewniał sztywne podparcie pod brodą. Ponownie zamknij zapięcie.