



FUTURO™ REGULOWANA OPASKA NADGARSTKA, SPORT

09033

 ŚREDNI POZIOM
STABILIZACJI



Prosta i wygodna konstrukcja zapewnia stabilizację przy urazach nadgarstka.

ZASTOSOWANIE:

Czynności codzienne i aktywność sportowa

CECHY SZCZEGÓLNE:

- 1 Otwór na kciuk i wygodna konstrukcja ułatwiają zakładanie i zdejmowanie.
- Regulowany pasek pozwala na indywidualne dopasowanie i dostosowanie siły kompresji.
- Materiał z mieszanki neoprenowej zapewnia wygodę, ciepło i stabilizację.

ROZMIAR:

Numer katalogowy	CM
09033	11.4-24.1

Miara obwodu nadgarstka.



JAK ZAKŁADAĆ:



Włóż kciuk w otwór, gładką stroną materiału do wewnątrz. Naciągnij opaskę na wierzch dłoni.



Przeciśnij opaskę pod spód nadgarstka i z powrotem na wierzch dłoni. Zamknij zapięcie.



Dostosuj siłę kompresji, żeby opaska trzymała się mocno, ale wygodnie.

Przeznaczenie: Stabilizacja przy zeszczywnieniu, osłabieniu i urazach nadgarstka.

UWAGA: Niektóre osoby mogą być wrażliwe na działanie neoprenu lub mieszanki neoprenowej. W razie wystąpienia wysypki należy zaprzestać stosowania produktu i skontaktować się z lekarzem.

Skład: Mieszanka neoprenowa, poliester, nylon

W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Poland.
www.futuro.3m.pl

3M