



FUTURO™ REGULOWANA OPASKA STAWU SKOKOWEGO, SPORT

09037

ŚREDNI POZIOM
STABILIZACJI

Zapewnia wsparcie przy urazach
stawu skokowego

ZASTOSOWANIE:

Zastosowanie ogólne, ćwiczenia fizyczne

CECHY SZCZEGÓLNE:

- 1 Regulowany pasek pozwala na indywidualne dopasowanie.
 - 2 Wytrzymałe materiały zapewniają solidną ochronę, kojące ciepło i wygodę.
 - 3 Otwór na piętę ułatwia zakładanie.
- Pasuje na lewą lub prawą stopę.

ROZMIAR:

Numer katalogowy	CM
09037	17.8-27.9



JAK ZAKŁADAĆ:



Opaskę załóż gładką stroną do skóry, umieszczając piętę w specjalnej pętli. Zobacz schemat dla lewej kostki (dla prawej kostki przekreśl opaskę na drugą stronę).



Owiń stopę opaską zgodnie z rysunkiem.



Zapnij rzep, dopasowując poziom stabilizacji. Unikaj zapinania rzepów na podbiciu, ponieważ może to powodować dyskomfort podczas noszenia butów.

Przeznaczenie: Zapewnia wsparcie przy zeszczywnieniu, bólach i urazach stawu skokowego.

Skład: Neopren, nylon, poliester.

W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Poland.
www.futuro.3m.pl

3M