



FUTURO™ REGULOWANA OPASKA KOLANA, SPORT

09039

ŚREDNI POZIOM
STABILIZACJI

Zapewnia wsparcie przy
urazach kolan

ZASTOSOWANIE:

Zastosowanie ogólne, ćwiczenia fizyczne.

CECHY SZCZEGÓLNE:


- 1 Trzy regulowane paski pozwalają na indywidualne dopasowanie.
 - 2 Otwór na rzepkę zwiększa stabilność.
- Materiał z mieszanki neoprenowej zapewnia ochronę, kojące ciepło i wygodę.
 - Pasuje na lewe lub prawe kolano.

ROZMIAR:

Numer katalogowy	CM
09039	33.0-44.4



JAK ZAKŁADAĆ:

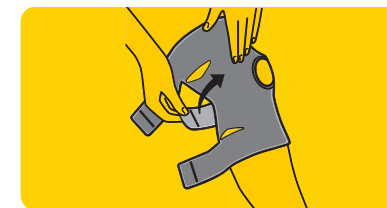

Opaskę przyłóż do kolana gładką stroną materiału zwróconą do skóry, tak aby otwór na rzepkę znajdował się na rzepce. Owiń środkowy pasek i zapnij go z tyłu kolana.



Następnie owiń pozostałe dwa paski z tyłu kolana, i przyczep je za pomocą rzepów. Opaskę należy wyregulować tak, aby przylegała ściśle, ale nie powodowała dyskomfortu.

Przeznaczenie: Zapewnia wsparcie przy zeszywnieniu, osłabieniu i urazach kolan.

Skład: Mieszanka neoprenowa, poliester, nylon, spandex.

W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Poland.
www.futuro.3m.pl

