



FUTURO™

REGULOWANY DWUSTRONNY STABILIZATOR NADGARSTKA Z SZYNĄ

10770

 ŚREDNI POZIOM
STABILIZACJI



MATERIAŁ PRZEPUSZCZAJĄCY
POWIETRZE

Pasuje na lewą lub prawą rękę.

*Lekarze często zalecają korzystanie ze stabilizatora nadgarstka podczas leczenia zespołu cieśni nadgarstka oraz innych bolesnych przypadłości

Skład: Aluminium, poliester, poliuretan, nylon, spandex.

W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

Zapewnia stabilizację przy osłabieniu,
bólach i urazach nadgarstka.

ZASTOSOWANIE:

Stabilizacja przy typowych urazach, takich jak zwichnięcia, skręcenia oraz w przypadku zespołu cieśni nadgarstka.*

CECHY SZCZEGÓLNE:

- 1 Wygodna, ergonomiczna konstrukcja zapewnia pełną swobodę ruchu palców.
- 2 Stabilizator we wnętrzu dłoni zapewnia dodatkowe wsparcie.
- 3 Konstrukcja rękawa z trzema regulowanymi paskami pozwala na indywidualne dopasowanie.

ROZMIAR:

Numer katalogowy	CM
10770	14-21.5

Miara obwodu nadgarstka w najwęższym punkcie.



JAK ZAKŁADAĆ:




Otwórz zapięcia. Wsuń dłoń do stabilizatora, tak żeby metalowa szyna przebiegała wzdłuż wnętrza dłoni.



Zamknij najpierw środkowe, a następnie pozostałe zapięcia.

Dla lewej ręki: Wysuń szynę z kieszeni. Mocno trzymając szynę, obróć stabilizator i wsuń szynę w przeciwny otwór kieszeni. Wepchnij koniec szyny w kieszeń.

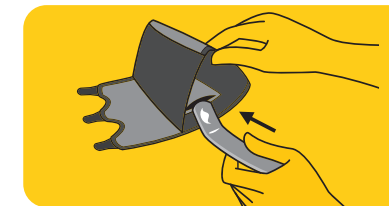

Dostosuj napięcie wszystkich pasków, tak żeby stabilizator przylegał mocno, ale nie powodował dyskomfortu.

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Poland.
www.futuro.3m.pl