



FUTURO™ STABILIZATOR KOLANA, SPORT

45694, 45696, 45697

 ŚREDNI POZIOM
STABILIZACJI

Specjalna konstrukcja stworzona z myślą o stabilizacji w trakcie aktywności fizycznej.

ZASTOSOWANIE:

Czynności codzienne i aktywność sportowa

CECHY SZCZEGÓLNE:

- 1 Wyprofilowana konstrukcja z dwoma regulowanymi paskami zapewnia idealne dopasowanie.
 - 2 Otwór na rzepkę zapewnia większą stabilność i wygodę.
- Unikalna mieszanka materiałów zapewnia większą stabilność, kojące ciepło i wygodę.

ROZMIAR:

Numer katalogowy	Rozmiar	CM
45694	S	33.0-38.1
45696	M	38.1-43.2
45697	L	43.2-48.3



ZAPOBIEGA POWSTANIU
NIEPRZYJEMNYCH
ZAPACHÓW



MATERIAŁ PRZEPUSZCZAJĄCY
POWIETRZE

Przeznaczenie: Zapewnia stabilizację przy zeszczywnieniu, osłabieniu i urazach kolan.

UWAGA: Niektóre osoby mogą być wrażliwe na działanie neoprenu lub mieszanki neoprenowej. W razie wystąpienia wysypki należy zaprzestać stosowania produktu i skontaktować się z lekarzem.

Skład: Mieszanka neoprenowa, nylon, poliester, spandex.

W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

JAK ZAKŁADAĆ:



Otwórz wszystkie zapięcia i nasuń stabilizator na nogę, zaczynając od szerszego końca. Umieść otwór na rzepce kolana.



Zabezpiecz górny pasek wzdłuż górnej krawędzi stabilizatora.



Zabezpiecz dolny pasek wzdłuż dolnej krawędzi stabilizatora. Dostosuj napięcie obu pasków, tak żeby stabilizator przylegał mocno, ale nie powodował dyskomfortu.

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Poland.
www.futuro.3m.pl

3M