



FUTURO™ STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO, SPORT

46645

 WYSOKI POZIOM
STABILIZACJI



MATERIAŁ PRZEPUSZCZAJĄCY
POWIETRZE



ODPROWADZANIE
WILGOCI

Zapewnia stabilizację i ochronę stawu przy osłabieniu, bólach i urazach kostki.

ZASTOSOWANIE:

Czynności codzienne i aktywność sportowa

CECHY SZCZEGÓLNE:

- 1 Wzmocnienia boczne zapobiegają skręceniom kostki i ponownym urazom.
 - 2 Regulowany poziom kompresji.
 - 3 Specjalne paski podnoszą i podpierają sklepienie stopy.
- Swobodnie mieści się w bucie.

ROZMIAR:

Numer katalogowy	Cale	CM
46645	8.0-10.0	20.3-25.4



JAK ZAKŁADAĆ:



Otwórz wszystkie zapięcia i wsuń stopę do stabilizatora. Umieść górny pasek w sprzączce, pociągnij i zapnij.



Pociągnij lewy pasek do góry i owiń dookoła stopy, mocując zapięcie po przeciwnej stronie stabilizatora.



W analogiczny sposób zamocuj prawy pasek. Dostosuj napięcie obu pasków, tak żeby stabilizator trzymał się mocno, ale nie powodował dyskomfortu.

Przeznaczenie: Zapewnia stabilizację przy typowych urazach, takich jak zwichnięcia i skręcenia.

Skład: polietylen, poliuretan, nylon, poliester, spandeks.

W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Poland.
www.futuro.3m.pl

3M