



# FUTURO™ REGULOWANA OPASKA NADGARSTKA

46709

 ŚREDNI POZIOM  
STABILIZACJI



MATERIAŁ PRZEPUSZCZAJĄCY  
POWIETRZE

Pasuje na lewą lub prawą rękę.

**UWAGA: Niniejszy produkt zawiera naturalny lateks kauczukowy, który może wywoływać reakcje uczuleniowe.**

Skład: nylon, guma, poliester, bawełna, poliuretan.

W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

Zapewnia stabilizację przy  
zesztywnieniu, osłabieniu i urazach  
nadgarstka.

## ZASTOSOWANIE:

Codziennie wsparcie

## CECHY SZCZEGÓLNE:

- 1 Dwa regulowane paski pozwalają na indywidualne dopasowanie i dostosowanie siły kompresji.
  - 2 Wyprofilowana konstrukcja.
- Zapewnia ochronę nadgarstka.

## ROZMIAR:

Numer katalogowy	CM
46709	14.0-24.1

Miara obwodu nadgarstka.



## JAK ZAKŁADAĆ:



Rozluźnij pasek główny i paski poboczne. Umieść wkładkę nad podstawą dłoni, w miejscu gdzie zgina się staw. Owiń i zabezpiecz pasek główny.



Owiń i zabezpiecz paski poboczne. Dostosuj ich napięcie aż do uzyskania pożądanego stopnia stabilizacji.

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117,  
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Poland.  
[www.futuro.3m.pl](http://www.futuro.3m.pl)

**3M**