



FUTURO™ PAS STABILIZUJĄCY KRĘGOSŁUP

46815-16

 WYSOKI POZIOM
STABILIZACJI



MATERIAŁ PRZEPUSZCZAJĄCY
POWIETRZE

Przeznaczenie: Zapewnia stabilizację przy zesztynieniu, napięciu i bólach pleców.

Skład: poliester, nylon, poliuretan, spandex, płyta pilśniowa, akryl.

W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

Wkładki wspomagają bolące mięśnie.

ZASTOSOWANIE:

Codziennie wsparcie

CECHY SZCZEGÓLNE:

- 1 Zaprojektowany z zastosowaniem wkładek stabilizujących bolące mięśnie, nie powodując jednocześnie bezpośredniego nacisku na kręgosłup.
 - 2 Regulowane paski pozwalają na indywidualne dopasowanie.
 - 3 Tylna część pasa równomiernie usztywnia kręgosłup.
- Zgrabne linie pasa nie ograniczają swobody ruchu.


ROZMIAR:

Numer katalogowy	Rozmiar	Cale	CM
46815	S/M	29.0-39.0	73.6-99.1
46816	L/XL	39.0-50.0	99.1-127.0



Miara obwodu talii na wysokości pępka.


JAK ZAKŁADAĆ:

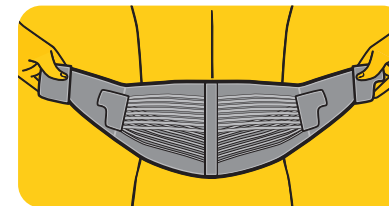

Rozluźnij paski główne i zdejmij boczne paski zaciskowe. Umieść pas stabilizujący na środku dolnej części pleców, tak żeby wkładki Support Cushion znalazły się po obu stronach kręgosłupa, a zakrzywienie krawędzi pasa skierowane było w dół.



Owiń paski główne ciasno wokół talii, a zaczep umocuj na brzuchu.

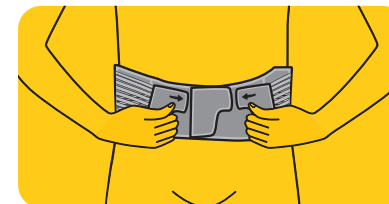

Pociągnij boczne paski zaciskowe do przodu i zabezpiecz je wzdłuż przednich części pasa. Dostosuj położenie zapięć pasków bocznych, tak żeby uzyskać pożądaną stopień stabilizacji.

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Poland.
www.futuro.3m.pl

3M