



FUTURO™ DWUSTRONNY STABILIZATOR NADGARSTKA Z SZYNĄ

47853-55

ŚREDNI POZIOM
STABILIZACJI



MATERIAŁ PRZEPUSZCZAJĄCY
POWIETRZE

Przeznaczenie: Typowe urazy, takie jak zwichnięcia, skręcenia oraz w przypadku objawów zespołu cieśni nadgarstka.*

*Lekarze często zalecają korzystanie ze stabilizatora nadgarstka podczas leczenia zespołu cieśni nadgarstka oraz innych bolesnych przypadłości.

Skład: pianka uretanowa, aluminium, poliester, nylon, klej uretanowy.

W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

Zapewnia stabilizację i ochronę przy osłabieniu, bólach i urazach nadgarstka.

ZASTOSOWANIE:

Codziennie wsparcie

CECHY SZCZEGÓLNE:

- 1 Dwustronna szyna pozwala na stosowanie na lewym i prawym ręku.
- 2 Konstrukcja rękawa z trzema regulowanymi paskami pozwala na indywidualne dopasowanie.
- 3 Stabilizator we wnętrzu dłoni zapewnia dodatkowe wsparcie.

ROZMIAR:

Numer katalogowy	Rozmiar	CM
47853	S	12.7-15.9
47854	M	15.9-19.0
47855	L	19.0-22.9

Miara obwodu nadgarstka.



JAK ZAKŁADAĆ:



Otwórz zapięcia. Wsuń dłoń do stabilizatora, tak żeby metalowa szyna przebiegała wzdłuż wnętrza dłoni.



Zamknij najpierw środkowe, a następnie pozostałe zapięcia.



Przesuń pasek na kciuku na przeciwną stronę dłoni. Dostosuj napięcie wszystkich pasków, tak żeby stabilizator przylegał mocno, ale nie powodował dyskomfortu.



Dla lewej ręki: Wysuń szynę z kieszeni. Mocno trzymając szynę, obróć stabilizator i wsuń szynę w przeciwny otwór kieszeni. Wepchnij koniec szyny w kieszeń. Zastosuj się do instrukcji zakładania powyżej.

3M Poland Sp. z o.o.,
al. Katowicka 117, Kajetany,
05-830 Nadarzyn, Poland.
www.futuro.3m.pl

3M