



FUTURO™

OPASKA STABILIZUJĄCA STAW ŁOKCIOWY Z MASUJĄCYMI PODUSZKAMI

47861-63

 ŚREDNI POZIOM
STABILIZACJI

Zapewnia natychmiastową kompresję za pomocą podwójnych wkładek, skutecznie uśmierzając bóle stawu łokciowego i przedramienia.

ZASTOSOWANIE:

Codziennie wsparcie

CECHY SZCZEGÓLNE:

- 1 Materiał rozciąga się we wszystkich kierunkach, utrzymując stabilizator na swoim miejscu.
- 2 Wyprofilowana konstrukcja zapewnia idealne dopasowanie.
- 3 Regulowany pasek zapewnia dodatkową kompresję.

ROZMIAR:

Numer katalogowy	Rozmiar	CM
47861	S	22.9-25.4
47862	M	25.4-27.9
47863	L	27.9-30.5




Miara obwodu stawu łokciowego.

JAK ZAKŁADAĆ:



Naciągnij stabilizator na łokieć.

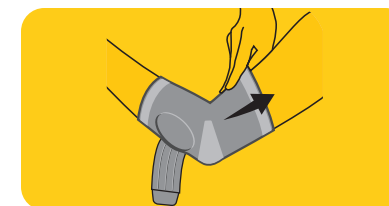

Umieść wkładki uciskowe tak, żeby znalazły się nad i pod przedramieniem (po stronie kości promieniowej i łokciowej), tuż poniżej łokcia.



Owiń pasek dookoła przedramienia. Dostosuj jego napięcie tak, żeby stabilizator trzymał się mocno, ale nie powodował dyskomfortu.



MATERIAŁ PRZEPUSZCZAJĄCY
POWIETRZE

Przeznaczenie: Zapewnia stabilizację przy zeszczywnieniu, osłabieniu i urazach stawu łokciowego i przedramienia

Skład: Nylon, Kauczuk Silikonowy, Poliester, Włókna Syntetyczne

W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Poland.
www.futuro.3m.pl