



FUTURO™ OPASKA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY

47874-76

 ŚREDNI POZIOM
STABILIZACJI



MATERIAŁ PRZEPUSZCZAJĄCY
POWIETRZE

Zapewnia ochronę stawu przy
osłabieniu, bólach i urazach kostki.

ZASTOSOWANIE:

Codziennie wsparcie

CECHY SZCZEGÓLNE:

- 1 Regulowany pasek pozwala na indywidualne dopasowanie.
- Podnosi i podpira sklepienie stopy.
- Swobodnie mieści się w butach.

ROZMIAR:

Numer katalogowy	Rozmiar	CM
47874	S	17.8-20.3
47875	M	20.3-22.9
47876	L	22.9-25.4

Miara obwodu kostki.



JAK ZAKŁADAĆ:



Wsuń stopę w elastyczną część opaski.
Rysunek pokazuje instrukcję zakładania na lewą stopę (w celu założenia na prawą stopę, odwróć opaskę na drugą stronę).



Owiń pasek wokół kostki, jak pokazano na rysunku.



Zapnij rzep, dostosowując stopień napięcia paska. Postaraj się unikać umieszczania zapięcia na podbiciu stopy, bo może to spowodować dyskomfort podczas noszenia obuwia.

Przeznaczenie: zapewnia stabilizację przy typowych urazach, takich jak zwichnięcia i skręcenia.

UWAGA: Niniejszy produkt zawiera naturalny lateks kauczukowy, który może wywoływać reakcje uczuleniowe.

Skład: nylon, guma, poliester, spandex.

W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Poland.
www.futuro.3m.pl

