

**3M™ Filtek™ Supreme Flowable**  
Flowable composiet

**UW BETROUWBARE FLOWABLE.  
NU EENVOUDIGER IN GEBRUIK.**

3M™ Filtek™ Supreme XTE Flowable Restorative is beschikbaar in een nieuwe ergonomische spuit. Deze nieuwe spuit is ontworpen voor een beter comfort en makkelijkere injectie, en heet vanaf nu 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative.

**Dring luchtbellen en  
materiaalverspilling terug**

Vrijwel geen luchtbellen en “run-on” van materiaal meer, zodat betere controle tijdens het aanbrengen mogelijk is.

**Geen foute  
inschattingen meer**

De blauwe stamper van de spuit geeft aan hoeveel materiaal er nog beschikbaar is. De spuit is volledig leeg wanneer alleen het witte gedeelte overblijft.



**Buigzame canule**

Eenvoudig te buigen  
canule voor betere toegang,  
zonder knikken.

**Makkelijker vast te  
houden en te injecteren**

De driehoekige vingerplaat en  
het grotere drukoppervlak laten toe  
om de grip vlot te personaliseren.



## Belangrijkste voordelen

- Vrijwel geen luchtballen en “run-on” van materiaal
- Buigzame canule voor een betere toegang
- Ergonomisch design: makkelijk vast te houden en te injecteren
- Past zich uitstekend aan, behoudt zijn glans en is bestand tegen slijtage
- Veelzijdig in indicaties en technieken

## Kan verwarmd worden voor injection molding

Verwarm tot 70°C gedurende max. 1 uur, tot max. 25 keer.




## Klinische casussen

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative biedt een egale overgang van het materiaal naar het gebitselement voor esthetische restauraties.



Vóór

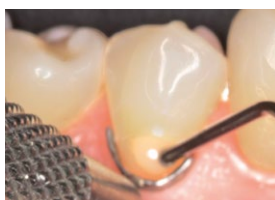

Aanbrengen van Flowable



Na

Foto's gebruikt met toestemming van Dr. Gunnar Reich, Munchen, Duitsland

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative past zich makkelijk aan en dekt de overgang af.



Vóór



Aanbrengen van Flowable



Na

Foto's gebruikt met toestemming van Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Italië

## Indicaties

(Incrementeel tot 2 mm)



Klasse III



Klasse V



Minimaal invasieve tandheelkunde<sup>1</sup>



Basis



Liner



Reparatie van kleine defecten bij indirecte restauraties



Reparatie<sup>2</sup>



Uitblokken van ondersnijdingen



Verzegelen van putjes en fissuren

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige lijst van indicaties.

## Bestelinformatie



### 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative refills

Refill bevat 2 spuitjes, met elk 2 g, en 20 dispensingtips.

KLEUR	ORDERNUMMER
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B1	6032B1
B2	6032B2
C2	6032C2
D2	6032D2
Wit	6032W
Extra Wit	6032XW
OA3	6032OA3

ORDERNUMMER	PRODUCTINFO.
3700T	3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative Dispensingtips, 20-gauge, Grijs (20)

<sup>1</sup> Inclusief kleine, onbelaste occlusale restauraties.

<sup>2</sup> Reparatie van tijdelijke acryl- en composietharsen.



3M Nederland B.V.  
Oral Care Solutions Division  
infodental.nl@mmm.com  
3M.nl/OralCare

3M Belgium bvba  
Oral Care Solutions Division  
infodental.be@mmm.com  
3M.be/OralCare

3M, 3M Science. Applied to life. en Filtek zijn merken van 3M Company.  
© 3M 2020. Alle rechten voorbehouden.