



# FUTURO™ CUSTOM DIAL HANDGELENK-SCHIENE ANPASSBAR

601602DABI, 611612DABI



**ATMUNGSAKTIVES  
MATERIAL**

**Bietet Unterstützung für  
Handgelenke mit Symptomen des  
Karpaltunnelsyndroms\*.**

## IDEAL FÜR:

Unterstützung für Handgelenke mit  
Symptomen des Karpaltunnelsyndroms\*,  
schwache oder verletzte Handgelenke

## EIGENSCHAFTEN:


- ① Zwei Einstellräder sorgen für individuelle Passform und feste Stabilisierung.
  - ② Robustes Schnür- und Einstellsystem macht Bänder unnötig und bietet sicheren Halt.
- Niedrig geschnittenes, ergonomisches Design für freie Fingerbeweglichkeit.

## GRÖSSE:


Artikelnummer	PHC	CM
601602DABI - Rechte Hand	6446702	Hand: 17.8-23.5
611612DABI - Linke Hand	6446694	Handgelenk: 14.6-19.7



## TRAGEANWEISUNG:

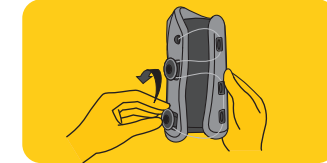

Drehen Sie die Einstellräder zum Lockern  
gegen den Uhrzeigersinn.

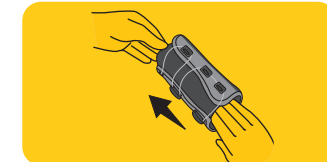

Stecken Sie Ihre Hand in die Easy-Sleeve-Bandage  
und positionieren Sie die Lasche an der Oberseite  
des Handgelenks.



Die Bandage ist in der richtigen Position, wenn  
sich der Daumen im Daumenloch befindet und die  
Schiene bequem auf der Handfläche liegt.



Drehen Sie die Einstellräder zum Festziehen im  
Uhrzeigersinn. Passen Sie alle Einstellräder an, bis  
Sie ein straffes, aber bequemes Tragegefühl haben.

Entfernen  
Drehen Sie die Einstellräder zum Lockern gegen den  
Uhrzeigersinn.

3M [Schweiz] GmbH  
Consumer Health Care  
Eggstrasse 93  
8803 Rüslikon  
www.3mschweiz.ch/futuro



Empfohlene Anwendung: Unterstützung von steifen, schwachen oder verletzten Handgelenken.

\*Zur Behandlung des Karpaltunnelsyndroms oder anderer schmerzhafter Handgelenksverletzungen empfehlen Ärzte oft eine steife Handgelenk-Schiene.

Zusammensetzung: Aluminium, Polyester, Nylon, Polyurethan, Polycarbonat, PVC, Stahl, Thermoplastisches Elastomer, Spandex, Rayon.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.