



FUTURO™ ATTELLE DE POIGNET AJUSTABLE CUSTOM DIAL

601602, 611612



MATÉRIAU
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé.

*Les médecins recommandent généralement l'utilisation d'une attelle rigide pendant le traitement du syndrome du canal carpien, ou d'autres problèmes de poignet douloureux.

Composition: Aluminium, Polyester, Nylon, Polyuréthane, Polycarbonate, PVC, Acier, Élastomère Thermoplastique, Spandex, Rayon.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Fournit un soutien aux poignets présentant des symptômes du syndrome du canal carpien.*

INDIQUÉ POUR:

Soutien pour poignets présentant des symptômes du syndrome du canal carpien*, poignets faibles ou blessés

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Deux molettes réglables offrent un ajustement personnalisé et une stabilisation ferme.
 - 2 Le système de laçage à molette élimine les sangles et reste sécurisé.
- Design ergonomique permettant un mouvement libre des doigts.

TAILLES:


Référence	PHC	CM
601602 - Main Droite	6446702	Main: 17.8-23.5
611612 - Main Gauche	6446694	Poignet: 14.6-19.7




MODE D'EMPLOI:



Tournez les molettes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer.

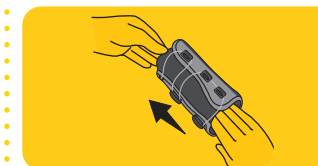

Faites glisser la main dans le fourreau en centrant la languette sur le dessus du poignet.

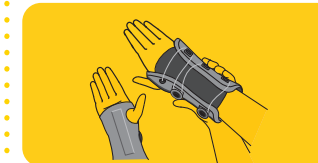

L'attelle est correctement positionnée lorsque le pouce est situé dans le trou du pouce et que la baleine repose confortablement dans le creux de la paume.



Tournez les molettes dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer. Tournez les molettes jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

Pour retirer l'attelle :

Tournez les molettes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer. Glissez la main hors de l'orthèse.

3M (Suisse) S.à r.l.
Consumer Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüslikon
www.3msuisse.ch/futuro

3M