



FUTURO™ CUSTOM FIT HANDLEDSTÖD

601602, 611612



VENTILERANDE
MATERIAL

Ger stöd för handleder med symptom
av karpaltunnelsyndrom.*

PERFEKT FÖR:

Stöd för handleder med symptom på
karpaltunnelsyndrom*, svaga eller
skadade handleder

VIKTIGA FUNKTIONER:

- 1 Två justerbara rattar ger en individanpassad
passform och god stabilisering.
 - 2 Hållbart snör- och rattsystem ersätter band
och sitter stadigt.
- Ergonomisk design med låg profil ger
fingrarna fri rörlighet.

STORLEK:

Artikel nummer	CM
601602 - Höger handled	Hand: 17.8-23.5
611612 - Vänster handled	Handled: 14.6-19.7



ANVÄNDNING:



Vrid rattarna motsols för att lossa.



För in handen i stödet med fliken
centrerad uppe på handleden.



Stabilisatorn är korrekt positionerad när
tummen är i tumhålet och skenan vilar
bekvämt i handflatan.



Vrid rattarna medurs för att dra åt. Justera rattarna
tills passformen är stabil men ändå bekväm.

För att ta av

Vrid rattarna motsols för att lossa. Ta ut handen ur
stödet.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4,
170 67 Solna
Sweden



Avsedd användning: För att ge stöd åt stel, svag eller skadad handled.

*Läkare rekommenderar ofta användning av ett stabilt handledsstöd vid behandling av karpaltunnelsyndrom och andra smärtsamma tillstånd.

Material: Aluminium, Polyester, Nylon, Polyuretan, Polykarbonat, PVC, Stål, Termoplastisk elastomer, Spandex, Rayon.

Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.