



# FUTURO™ ESTABILIZADOR DE MUÑECA CON AJUSTE DE PRECISIÓN

601602, 611612



MATERIAL  
TRANSPIRABLE

Soporte de muñeca para tratar los síntomas del síndrome del túnel carpiano.\*

## IDEAL PARA:

Soporte de muñeca para pacientes con síntomas del síndrome de túnel carpiano, muñecas debilitadas o lesionadas

## CARACTERÍSTICAS:

- 1 Dos diales ajustables permiten un ajuste personalizado y una estabilización firme.
- 2 Sistema de cordones y diales duradero que elimina las correas y mantiene la sujeción.
- Su diseño ergonómico y reducido permite mover los dedos con facilidad.

## TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	CM
Derecha 170991.9	Mano: 17.8-23.5
Izquierda 170992.2	Muñeca: 14.6-19.7



## CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Girar los diales de derecha a izquierda para aflojar la muñequera.



Introducir la mano en la manga con la lengüeta centrada en la parte superior de la muñeca.



El estabilizador está correctamente colocado cuando el pulgar se encuentra en el orificio previsto y la férula descansa cómodamente en la palma.



Girar los diales de izquierda a derecha para apretar. Ajustar todos los diales hasta conseguir una sujeción firme y cómoda.

Para retirar la muñequera

Girar los diales de derecha a izquierda para aflojar la muñequera.

3M España  
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25  
28027 Madrid



Uso previsto: Proporciona soporte a muñecas rígidas, debilitadas o lesionadas.

\*Los médicos suelen recomendar el uso de una muñequera rígida para tratar el síndrome del túnel carpiano y otros trastornos dolorosos de la muñeca.

Composición: Aluminium, Polyester, Nylon, Polyurethane, Polycarbonate, PVC, Steel, Thermoplastic Elastomer, Spandex, Rayon.

Si siente malestar o dolor, o si esos síntomas persisten o aumentan, deje de utilizar el soporte y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.