



FUTURO™ ESTABILIZADOR DE PULSO ADAPTÁVEL

601602, 611612



SUPOORTE
FIRME



MATERIAL
RESPIRÁVEL

Suporte de mão para tratar os sintomas do síndrome do túnel cárpico.*

IDEAL PARA:

Suporte de mão para pacientes com sintomas do síndrome do túnel cárpico, mãos debilitadas ou lesionadas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 Dois botões de controlo ajustáveis proporcionam ajuste personalizado e estabilização firme.
 - 2 O sistema durável de laço e botão de controlo elimina as faixas e permanece seguro.
- O design ergonómico de corte baixo permite o movimento livre dos dedos.

TAMANHOS:

C.N.P	CM
6316224 - Pulso esquerdo	Hand: 17.8-23.5
6316216 - Pulso direito	Wrist: 14.6-19.7




COMO UTILIZAR:



Rode os botões de controlo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para saltar.



Faça deslizar a mão para o design fácil da manga com a aba da manga centrada sobre o pulso.

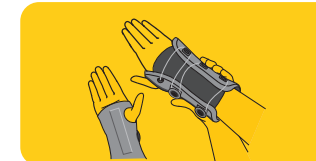

O estabilizador está corretamente posicionado quando o polegar estiver na abertura para o polegar e a tala assentar confortavelmente na palma da mão.



Rode os botões de controlo no sentido dos ponteiros do relógio para apertar. Ajuste os botões de controlo até o ajuste ser firme e confortável.

Para Remover

Rode os botões de controlo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para saltar.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA
1990-138 Lisboa



Utilização prevista: Proporcionar suporte de pulso rígido, fraco ou lesionado.

*Os médicos recomendam frequentemente o uso de um suporte de pulso rígido durante o tratamento da Síndrome do Canal Cárpico e noutros quadros dolorosos dos pulsos.

Composição: Alumínio, Polyester, Nylon, Polyurethane, Polycarbonate, PVC, Steel, Thermoplastic Elastomer, Spandex, Rayon.

Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.