



FUTURO™ CUSTOM DIAL HANDGELENK-SCHIENE ANPASSBAR

601602DABI, 611612DABI



**ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL**

**Bietet Unterstützung für
Handgelenke mit Symptomen des
Karpaltunnelsyndroms*.**

IDEAL FÜR:

Unterstützung für Handgelenke mit
Symptomen des Karpaltunnelsyndroms*,
schwache oder verletzte Handgelenke

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Zwei Einstellräder sorgen für individuelle Passform und feste Stabilisierung.
 - 2 Robustes Schnür- und Einstellsystem macht Bänder unnötig und bietet sicheren Halt.
- Niedrig geschnittenes, ergonomisches Design für freie Fingerbeweglichkeit.

GRÖSSE:


Artikelnummer	PHC	CM
601602DABI - Rechte Hand	6446702	Hand: 17.8-23.5
611612DABI - Linke Hand	6446694	Handgelenk: 14.6-19.7



TRAGEANWEISUNG:



Drehen Sie die Einstellräder zum Lockern gegen den Uhrzeigersinn.

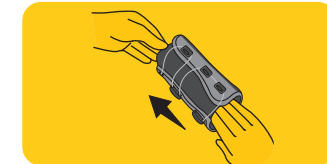

Stecken Sie Ihre Hand in die Easy-Sleeve-Bandage und positionieren Sie die Lasche an der Oberseite des Handgelenks.



Die Bandage ist in der richtigen Position, wenn sich der Daumen im Daumenloch befindet und die Schiene bequem auf der Handfläche liegt.



Drehen Sie die Einstellräder zum Festziehen im Uhrzeigersinn. Passen Sie alle Einstellräder an, bis Sie ein straffes, aber bequemes Tragegefühl haben.

Entfernen
Drehen Sie die Einstellräder zum Lockern gegen den Uhrzeigersinn.

3M Deutschland GmbH, Consumer Health Care
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
www.futuro.de



Empfohlene Anwendung: Unterstützung von steifen, schwachen oder verletzten Handgelenken.

*Zur Behandlung des Karpaltunnelsyndroms oder anderer schmerzhafter Handgelenksverletzungen empfehlen Ärzte oft eine steife Handgelenk-Schiene.

Zusammensetzung: Aluminium, Polyester, Nylon, Polyurethan, Polycarbonat, PVC, Stahl, Thermoplastisches Elastomer, Spandex, Rayon.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.