



# FUTURO™ CUSTOM FIT STABILOIVA RANNETUKI

601602, 611612



HENGITTÄVÄ  
MATERIAALI

Antaa tukea rannekanavaoireyhtämstä oireileville ranteille.\*

## KÖYTTÖTARKOITUS:

Antaa tukea rannekanavaoireyhtämstä\* oireileville ranteille, heikoille tai loukkaantuneille ranteille

## OMINAISUUDET:

- 1 Kaksi säädintä takaavat yksilöllisen istuvuuden ja vakauden.
  - 2 Nauhoihin ja säätimiin perustuvan ratkaisun ansiosta tuki pysyy tiukasti kiinni ilman hihnoja.
- Matala ja ergonominen muotoilu mahdollistaa sormien vapaan liikkumisen.

## KOKO:


Tuotekoodi	CM
601602 - Oikea ranne	Käsi: 17.8-23.5
611612 - Vasen ranne	Ranne: 14.6-19.7



## TUEN ASETTAMINEN:



Löysää kääntämällä säätimiä vastapäivään.

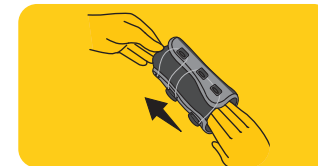

Aseta käsi hihaan niin että hihan kieli on ranteen päällä ja keskellä.



Tuki on kiinnitetty oikein, kun peukalo on peukaloaukossa ja alempi lasta lepää mukavasti kämmenellä.



Kiristä kääntämällä säätimiä myötäpäivään. Säädä, kunnes tuki asettuu lujasti mutta mukavasti.

Irrottaminen:

Löysää kääntämällä säätimiä vastapäivään. Liu'uta käsi pois tuesta.

Käyttötarkoitus: Jäykän, heikon tai vahingoittuneen ranteen tukeminen.

\*Lääkärit suosittelevat usein jäykän rannetuen käyttöä rannekanavaoireyhtymän ja muiden ranteen kiputilojen hallintaan. Koostumus: alumiini, polyesteri, nailon, polyuretaani, polykarbonaatti, PVC, teräs, termoplastinen elastomeeri, elastaani, raion. Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin. 3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Suomen 3M Oy,  
Keilaranta 6,  
02150 ESPOO

3M