



# FUTURO™ AANPASBARE POLSSPALK, CUSTOM DIAL

601602, 611612



STEVIGE  
STEUN



ADEMEND  
MATERIAAL

Geeft steun aan polsen met symptomen van Carpal Tunnel-Syndroom.\*

## IDEAAL VOOR:

Geeft steun aan zwakke en gewonde polsen met symptomen van Carpal Tunnel-Syndroom\*

## HOOFDKENMERKEN:

- 1 Twee verstelbare draaiknoppen zorgen voor een pasvorm op maat en stevige stabilisatie.
  - 2 Duurzaam bind- en draaiknopsysteem maakt riemen overbodig en blijft stevig zitten.
- Laag uitgesneden, ergonomisch ontwerp voor vrije vingerbewegingen.

## MAAT:

Referentie	CNK	CM
601602 - Rechterhand	3085750	Hand: 17.8-23.5
611612 - Linkerhand	3085743	Pols: 14.6-19.7



## DRAAGINSTRUCTIES:



Draai de draaiknoppen linksom voor een lossere pasvorm.



Schuif uw hand eenvoudig in het lange ontwerp met het lipje gecentreerd bovenop de pols.



De stabilisator is correct aangebracht wanneer de duim in het duimgat zit en de spalk comfortabel in de handpalm ligt.



Draai de draaiknoppen rechtsom voor een strakkere pasvorm. Verstel de draaiknoppen totdat de stabilisator strak maar comfortabel zit.

Verwijderen

Draai de draaiknoppen linksom voor een lossere pasvorm.

3M Belgium bvba/sprl  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.NL/futuro



Beoogd gebruik: Ondersteunt een stijve, zwakke of geblesseerde pols.

\*Artsen raden vaak het gebruik van een rigide polsbrace aan voor behandeling van Carpal Tunnel-Syndroom en andere pijnlijke polsaandoeningen.

Samenstelling: Aluminium, Polyester, Nylon, Polyurethaan, Polycarbonaat, PVC, Staal, Thermoplastische Elastomeer, Spandex, Rayon.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts bij ongemak of pijn, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.