



FUTURO™ CUSTOM FIT STABILISERENDE HÅNDEDSSKINNE

601602, 611612



ÅNDBART
MATERIALE

Giver støtte til håndled med symptomer på karpaltunnelsyndrom.*

VELEGNET TIL:

Støtte til håndled med symptomer på karpaltunnelsyndrom*, svage eller skadede håndled

NØGLEFUNKTIONER:

- 1 To justerbare drejeskiver giver personlig pasform og fast stabilisering.
 - 2 Det slidstærke snøresystem med drejeskiver fjerner behovet for stropper og sidder sikkert fast.
- Lavt udskåret ergonomisk design muliggør fri bevægelse af fingrene.

STØRRELSESVALG:

Varenr	CM
216690 - Højre håndled	Hånd: 17.8-23.5
216691 - Venstre håndled	Håndled: 14.6-19.7



SÅDAN BRUGES DEN:



Drej drejeskiverne mod uret for at løsne.



Før hånden ind i det nemme manchettedesign med manchettungen placeret centralt oven på håndleddet.



Stabilisatoren er placeret korrekt, når tommelfingeren er i tommelfingerhullet, og skinnen hviler behageligt i håndfladen.



Drej drejeskiverne med uret for at stramme til. Juster drejeskiverne, indtil den sidder fast, men alligevel føles behagelig.

Aftagning

Drej drejeskiverne mod uret for at løsne. Træk hånden ud af skinnen.

3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark



Tilsigtet anvendelse: Støtte til stive, svage eller skadede håndled.

*Læger anbefaler ofte at bruge en stiv håndledsskinne ved behandling af karpaltunnelsyndrom og andre smertefulde lidelser i håndleddet. Materialesammensætning: Aluminium, Polyester, Nylon, Polyurethan, Polycarbonat, PVC, Stål, Termoplastisk elastomer, Spandex, Rayon. Hvis du oplever ubehag eller smerter som følge af brug, og hvis smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge. 3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.