



FUTURO™ ATTELLE DE POIGNET AJUSTABLE CUSTOM DIAL

601602, 611612



SOUTIEN
FERME



MATÉRIAU
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé.

*Les médecins recommandent généralement l'utilisation d'une attelle rigide pendant le traitement du syndrome du canal carpien, ou d'autres problèmes de poignet douloureux.

Composition: Aluminium, Polyester, Nylon, Polyuréthane, Polycarbonate, PVC, Acier, Élastomère Thermoplastique, Spandex, Rayon.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Fournit un soutien aux poignets
présentant des symptômes du
syndrome du canal carpien.*

INDIQUÉ POUR:

Soutien pour poignets présentant des
symptômes du syndrome du canal carpien*,
poignets faibles ou blessés

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Deux molettes réglables offrent un ajustement personnalisé et une stabilisation ferme.
 - 2 Le système de laçage à molette élimine les sangles et reste sécurisé.
- Design ergonomique permettant un mouvement libre des doigts.

TAILLES:

| Référence | CNK | CM |
|----------------------|---------|-----------------------|
| 601602 - Main Droite | 3085750 | Main: 17.8-23.5 |
| 611612 - Main Gauche | 3085743 | Poignet: 14.6-19.7 |




MODE D'EMPLOI:



Tournez les molettes dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre pour desserrer.



Faites glisser la main dans le fourreau en centrant
la languette sur le dessus du poignet.

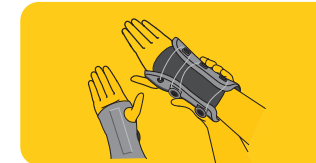

L'attelle est correctement positionnée
lorsque le pouce est situé dans le trou
du pouce et que la baleine repose
confortablement dans le creux de la paume.



Tournez les molettes dans le sens des
aiguilles d'une montre pour resserrer. Tournez
les molettes jusqu'à ce que l'ajustement soit
ferme, mais confortable.

Pour retirer l'attelle :

Tournez les molettes dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre pour desserrer.
Glissez la main hors de l'orthèse.

3M

3M Belgium bvba/sprl
Dép. Consumer Health Care
www.3m.be/futuro-fr