



FUTURO™ GENOUILLÈRE AVEC CHARNIÈRE

48579



Renforts latéraux à double pivotement pour un soutien rigide après une blessure.

INDIQUÉ POUR:

Fournir un soutien aux blessures courantes telles que les entorses et les foulures, support médial/latéral

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Les sangles de fixation fournissent un soutien réglable et un ajustement personnalisable.
- 2 Amortissement du genou pour protection et stabilité.
- 3 Mélange de néoprène durable pour soutien ferme, chaleur et confort.
- 4 Bords lisses et longueur étendue pour plus de confort.

TAILLES:

Référence	PHC	CM
48579	7749314	40.6-55.9



MODE D'EMPLOI:



Avant

Desserrez les sangles avant, puis ouvrez les fermetures et les sangles arrière. Placez le bord le plus large de l'orthèse le long de la cuisse tout en positionnant l'anneau de la rotule au-dessus de la rotule. Fixez la fermeture inférieure de l'orthèse sous l'arrière du genou, puis fermez la fermeture supérieure.




Arrière

Placez les sangles de fixation au travers des boucles et serrez-les pour renforcer le support. Réglez toutes les fermetures jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.



Arrière

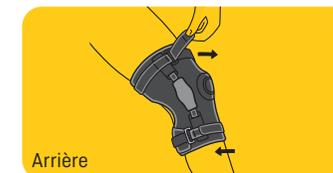

Arrière

Assurez-vous que les charnières latérales restent le long de la ligne médiane de chaque côté de la jambe en utilisant le système d'attache.

Utilisation prévue: Aide à soutenir un genou raide, faible ou blessé.

AVERTISSEMENT: Certaines personnes peuvent être sensibles au néoprène ou au mélange néoprène-caoutchouc.

En cas d'éruption cutanée, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.

Composition: Aluminium, Néoprène, Nylon, Polypropylène, POM, EVA.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

3M (Suisse) S.à r.l. Consumer Health Care
Eggstrasse 93, 8803 Rüslikon
www.3msuisse.ch/futuro

3M