



# FUTURO™ RODILLERA REFORZADA

48579

 **SOPORTE FIRME**



**Estabilizadores dobles laterales que ofrecen un soporte rígido tras sufrir una lesión.**

## IDEAL PARA:

Proporciona sujeción en caso de lesiones comunes como esguinces y torceduras, sujeción medial/lateral

## CARACTERÍSTICAS:

- 1 Las bandas proporcionan una sujeción regulable y un ajuste personalizable.
- 2 Protección de la rótula para mayor estabilidad y protección.
- 3 Mezcla de duradero neopreno que proporciona un soporte firme, calor y comodidad.
- 4 Bordes suaves y mayor longitud para mayor comodidad.

## TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	CM
163452.8	40.6-55.9



## CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Delante

Afloje las correas delanteras; abra las correas traseras y los cierres. Coloque el extremo más ancho del soporte a lo largo del muslo mientras sitúa el anillo de la apertura rotuliana sobre la rótula. Fije el cierre inferior del soporte por debajo de la corva; fije el cierre superior.




Detrás

Pase las correas de la cincha por las hebillas y apriete el soporte adicional. Ajuste todos los cierres hasta conseguir una sujeción firme y cómoda.



Detrás

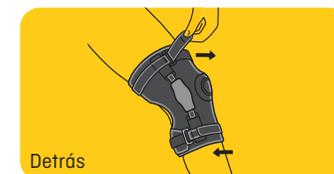

Detrás

Asegúrese, con las correas, de que los refuerzos laterales se mantienen a lo largo de la línea central de cada lado de la pierna.

Uso previsto: Ofrece sujeción a rodillas rígidas, debilitadas o lesionadas.

**PRECAUCIÓN:** Algunas personas pueden ser sensibles al neopreno o a la mezcla de goma y neopreno. En caso de erupción cutánea, dejar de utilizar y consultar a un médico.

Composición: Aluminium, Neoprene, Nylon, Polypropylene, POM, EVA.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

3M España  
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25  
28027 Madrid

